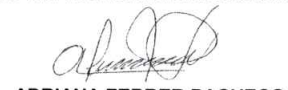


EL REPRESENTANTE LEGAL DE SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO , CERTIFICA QUE DURANTE EL AÑO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 LA ASIGNACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION), ES LA QUE A CONTINUACION SE DETALLA (EN PESOS):

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	%
1	TOTAL DE INGRESOS	9,297,100,000	
2	VALOR DE LOS CONTRATOS CON LA NACION Y CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	
3	RECURSOS ASIGNADOS A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	465,000,000	100.0%
	<b>PRESUPUESTO OK</b>		
	<b>ASIGNACION OK</b>		
3.1	<b>MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA.</b>	<b>228,315,000</b>	<b>49%</b>
3.1.1	Edificios	23,250,000	5%
3.1.2	Instalaciones físicas	116,250,000	25%
3.1.3	Sistema de redes	74,400,000	16%
3.1.4	Áreas adyacentes	9,765,000	2%
3.1.5	Otros	4,650,000	1%
3.2	<b>MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN</b>	<b>236,685,000</b>	<b>51%</b>
3.2.1	<b>Equipo Biomédico</b>	<b>97,650,000</b>	<b>21%</b>
3.2.1.1	De imágenes diagnósticas	9,300,000	2.0%
3.2.1.2	De laboratorio	32,550,000	7.0%
3.2.1.3	De terapia, tratamiento y rehabilitación	27,900,000	6.0%
3.2.1.4	Otros de diagnóstico	13,950,000	3.0%
3.2.1.5	De mantenimiento de la vida	13,950,000	3.0%
3.2.2	<b>Equipo industrial de uso hospitalario</b>	<b>64,635,000</b>	<b>13.9%</b>
3.2.2.1	Plantas eléctricas	4,650,000	1.0%
3.2.2.2	Equipo de lavandería y cocina	1,860,000	0.4%
3.2.2.3	Bombas de agua, calderas	2,325,000	0.5%
3.2.2.4	Autoclaves y esterilización	4,650,000	1.0%
3.2.2.5	Refrigeración y aire acondicionado	4,650,000	1.0%
3.2.2.6	Relacionados con servicios de apoyo	2,325,000	0.5%
3.2.2.7	Otros	44,175,000	9.5%
3.2.3	<b>Muebles de uso administrativo y asistencial</b>	<b>4,650,000</b>	<b>1.0%</b>
3.2.4	<b>Equipo de comunicaciones e informática</b>	<b>69,728,250</b>	<b>15.0%</b>

SE EXPIDE CON DESTINO A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A LOS 5 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021

  
 DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
 GERENTE

  
 ADRIANA FERRER PACHECO  
 REVISOR FISCAL

  
 VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA

07/01/2021

**EL REPRESENTANTE LEGAL DEL HOSPITAL DE SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CERTIFICA, QUE DURANTE EL AÑO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020  
LA ASIGNACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION), ES LA QUE A CONTINUACION  
SE DETALLA (EN PESOS):**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	%	EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE	%	PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	SALDOS POR EJECUTAR A 31 DE DICIEMBRE
1	TOTAL DE INGRESOS	8.632.709.966		15.304.489.904					
2	VALOR DE LOS CONTRATOS CON LA NACION Y CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0							
3	RECURSOS ASIGNADOS A MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	514.000.000	100%	871.030.712	100,0%	407.114.144	100,0%	407.114.144	463.916.568
	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>OK</b>		<b>OK</b>					
	<b>ASIGNACION DE RECURSOS</b>	<b>OK</b>		<b>OK</b>					
3.1	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	272.420.000	53%	207.887.434	23,8%	204.440.386	50,2%	204.440.386	3.447.048
3.1.1	Edificios	25.700.000	5%	124.557.392	14,3%	123.903.264	30,4%	123.903.264	654.128
3.1.2	Instalaciones físicas	143.920.000	28%	37.454.321	4,3%	37.170.979	9,1%	37.170.979	283.341
3.1.3	Sistema de redes	82.240.000	16%	23.517.829	2,7%	22.715.598	5,6%	22.715.598	802.231
3.1.4	Áreas adyacentes	15.420.000	3%	17.420.614	2,0%	16.520.435	4,1%	16.520.435	900.179
3.1.5	Otros	5.140.000	1%	4.937.278	0,5%	4.130.109	1,0%	4.130.109	807.169
3.2	MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN	241.580.000	47%	663.143.278	76,1%	202.673.758	49,8%	202.673.758	460.469.520
3.2.1	Equipo Biomédico	82.240.000	16%	143.720.067	16,5%	121.125.934	29,8%	121.125.934	22.594.133
3.2.1.1	De imágenes diagnósticas	5.140.000	1%	11.323.399	1,3%	6.056.297	1,5%	6.056.297	5.267.102
3.2.1.2	De laboratorio	20.560.000	4%	34.841.228	4,0%	30.281.484	7,4%	30.281.484	4.559.745
3.2.1.3	De terapia, tratamiento y rehabilitación	35.980.000	7%	37.454.321	4,3%	25.436.446	6,2%	25.436.446	12.017.875
3.2.1.4	Otros de diagnóstico	10.280.000	2%	27.001.952	3,1%	26.647.706	6,5%	26.647.706	354.247
3.2.1.5	De mantenimiento de la vida	10.280.000	2%	33.099.167	3,8%	32.704.002	8,0%	32.704.002	395.165
3.2.2	Equipo industrial de uso hospitalario	56.540.000	11%	327.796.453	37,6%	64.615.770	15,9%	64.615.770	263.180.683
3.2.2.1	Plantas eléctricas	5.140.000	1%	33.482.608	3,8%	2.584.631	0,6%	2.584.631	30.897.977
3.2.2.2	Equipo de lavandería y cocina	5.140.000	1%	17.420.614	2,0%	904.621	0,2%	904.621	16.515.993
3.2.2.3	Bombas de agua, calderas	5.140.000	1%	15.436.820	1,8%	1.292.315	0,3%	1.292.315	14.144.504
3.2.2.4	Autoclaves y esterilización	5.140.000	1%	5.373.381	0,6%	646.158	0,2%	646.158	4.727.223
3.2.2.5	Refrigeración y aire acondicionado	5.140.000	1%	25.259.891	2,9%	2.584.631	0,6%	2.584.631	22.675.261
3.2.2.6	Relacionados con servicios de apoyo	5.140.000	1%	43.551.536	5,0%	6.461.577	1,6%	6.461.577	37.089.959
3.2.2.7	Otros	25.700.000	5%	187.271.602	21,5%	50.141.837	12,3%	50.141.837	137.129.765
3.2.3	Muebles de uso administrativo y asistencial	25.700.000	5%	60.972.151	7,0%	2.065.054	0,51%	2.065.054	58.907.096
3.2.4	Equipo de comunicaciones e informática	77.100.000	15%	130.654.607	15,0%	14.867.000	3,65%	14.867.000	115.787.607

SE EXPIDE CON DESTINO A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A LOS 6 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021

  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
GERENTE

  
ADRIANA FERRER PACHECO  
REVISORA FISCAL

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA  
13/01/2021

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE UGRA CENTRO

Dirección CARRERA 9 N 11 74

Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 31/12/2020

Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 228,315,000.00

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AAAA		
	ENFERMERIA TERCER PISO PYP	ANUAL	1-3	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
	MEDICINA TERCER PISO PYP	ANUAL	3-5	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
	ODONTOLOGIA TERCER PISO PYP	ANUAL	8-10	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
	PSICOLOGIA TERCER PISO PYP	ANUAL	10-12	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
	MEDICINA TERCER PISO PYP	ANUAL	15-17	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
	CONSULTORIO 201 ODONTOLOGIA PYP	ANUAL	4-7	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
	CONSULTORIO 202 ODONTOLOGIA PYP	ANUAL	7-9	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
	CONSULTORIO 203 MEDICINA PYP	ANUAL	12-14	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo

## 1. EDIFICIOS

CONSULTORIO 204 SALA DE LACTANCIA PYP	ANUAL	'14-16	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 205 MEDICINA PYP	ANUAL	'19-21	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 206 MEDICINA PYP	ANUAL	'21-23	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 207 PAI CUARTO FRIO PYP	ANUAL	26-28	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 208 ENFERMERIA PYP	ANUAL	'28-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 209 PYP	ANUAL	'28-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 210 PYP	ANUAL	'28-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 101 ODONTOLOGIA	ANUAL	'10-12	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 102 ODONTOLOGIA	ANUAL	'12-14	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 103 HIGIENE ORAL	ANUAL	18-19	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 104 PAI	ANUAL	'19-21	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo

CONSULTORIO 105 MEDICINA	ANUAL	' 24-26	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 106 MEDICINA	ANUAL	' 26-28	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 107 ENFERMERIA	ANUAL	' 1-3	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 108 MEDICINA	ANUAL	' 3-4	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 109 MEDICINA	ANUAL	' 8-9	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 110 MEDICINA	ANUAL	' 10-11	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
CONSULTORIO 111 NUTRICION	ANUAL	' 15-16	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
FARMACIA	ANUAL	' 17-18	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
LABORATORIO	ANUAL	' 21-23	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
TOMA DE MUESTRAS	ANUAL	' 21-23	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
ADMINISTRATIVO LABORATORIO	ANUAL	' 21-23	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
ESTERILIZACION	ANUAL	23-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo
AUDITORIO PRIMER PISO PYP	ANUAL	' 17-19	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.

2. INSTALACIONES FÍSICAS

AUDITORIO TERCER PISO PYP	ANUAL	'23-24	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
GERENCIA	ANUAL	'1-2	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
CALIDAD	ANUAL	'6-9	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
PROGRAMAS ESPECIALES	ANUAL	,12-14	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
SALUD PUBLICA	ANUAL	'14-16	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
TALENTO HUMANO	ANUAL	'19-21	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
TESORERIA	ANUAL	'21-23	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
PIC	ANUAL	'26-28	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
SALA JUNTAS	ANUAL	'28-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
ALMACEN	ANUAL	'2-4	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.

	CONTRATACION - FACTURACION	ANUAL	'4-6	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
	RED SANITARIA	ANUAL	'24-26	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	CUARTO PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	'29-31	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	TERCER PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	'4-7	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	SEGUNDO PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	'7-9	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	PRIMER PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	'12-14	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	PRIMER PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	'14-16	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	CUARTO PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	'19-21	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	TERCER PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	'21-23	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	SEGUNDO PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	26-28	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	PRIMER PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	26-28	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	PRIMER PISO UGRA Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	26-28	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	SEGUNDO PISO ADMINISTRATIVO Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.

RED ELÉCTRICA	ANUAL	'23-24	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Enfermería tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'24-26	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Medicina tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'29-31	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Odontología tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'29-31	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Psicología tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'29-31	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Medicina tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'7-9	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 201 odontología pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'12-14	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 202 odontología pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'14-16	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 203 medicina pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'19-21	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 204 sala de lactancia pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'21-23	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 205 medicina pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	26-28	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 206 medicina pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'28-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 207 país cuarto frio pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.



RED ELÉCTRICA	ANUAL	'7-9	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 208 enfermería pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'12-14	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 209 pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'7-9	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 210 pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 101 odontología revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 102 odontología revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 103 higiene oral revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 104 país revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 105 medicina consultorio revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 106 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 107 enfermería revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 108 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 109 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.

3. SISTEMAS DE REDES

RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 110 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Consultorio 111 nutrición revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Farmacia revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Laboratorio revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Toma de muestras revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Administrativo laboratorio revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Esterilización revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Auditorio primer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Auditorio tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillo tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillo segundo piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	´1-30	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillos primer piso piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.

RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillos primer piso revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Gerencia y sala de juntas revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Calidad revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Programas especiales revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Salud publica revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Talento humano revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Tesorería revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pico revisión estado general toma corrientes, lámparas , interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	sala juntas revisión estado general toma corrientes, lámparas , interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	almacén revisión estado general toma corrientes, lámparas , interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Contratación - facturación revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Sistemas revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.

RED ELÉCTRICA	ANUAL			2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	transferencia eléctrica, cajas eléctricas, toma corrientes y tacos del edificio pyp, ambulatorio y administrativo. revisión de acometidas eléctricas a tableros de protección, revisión de bornes de fases neutros y tierras, tomas de voltajes de línea y de fase, pruebas de tacos de protección que estén en buen funcionamiento, pruebas de circuitos en conectividad y voltaje. polo a tierra, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias.
RED ELÉCTRICA	ANUAL			2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	transformador, revisión y limpieza y mantenimiento de fusibles de protección en arranque principal, limpieza de bornes y fusibles tipo hh en disyuntor principal, pruebas de aislamiento y voltaje en transformador tipo pedestal de 112.5 kva, mantenimiento y ajuste de borneras general en disyuntor, transformador y transferencia. revisión y mantenimiento de breaker generales en tablero general de protección, mantenimiento preventivo.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	1-15	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	tablero general subestación: verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga
RED ELÉCTRICA	ANUAL	1-15	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	tablero principal edificio administrativo: verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga
RED ELÉCTRICA	ANUAL	1-15	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	tablero de distribución parcial edificio administrativo: ( 4 tableros primer piso y 4 tableros 2 piso) estos tableros estan dividios por carga en tomacorrientes , alumbrado y red regulada; se debe hacer verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga

RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-15	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	tablero principal edificio pyp ugra: verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga	
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-15	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	tablero de distribución parcial edificio administrativo: ( 3 tableros primer piso y 3 tableros 2 piso) estos tableros estan dividios por carga en tomacorrientes , alumbrado y red de datos se debe hacer verificación de forma	
RED ELÉCTRICA	ANUAL	'1-15	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	tablero de distribución parcial edificio area de servicios generales y cafeteria se debe hacer verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Sistemas revision estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o <del>desgaste</del>	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	3	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	tercer piso pyp revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	segundo piso pyp revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	5	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	primer piso pyp revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	primer piso odontología revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	7	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	primer piso consultorios revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	8	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	primer piso farmacia revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas	
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	'1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	área administrativa revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas	
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL		15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.

4. AREAS ADYACENTES

LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
		15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.

UNIDAD FINANCIERA	SEMESTRE					
		15	12	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
JARDINES	CUATRIMESTRAL	2	2	2020	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	poda, deshierbé aplicación fertilizante
		15	6	2020	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	poda, deshierbé aplicación fertilizante
		4	10	2020	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	poda, deshierbé aplicación fertilizante
PASILLO TERCER PISO PYP	ANUAL	1-7	3	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo <u>reemplazo de esquineros en mal estado.</u>
PASILLOS SEGUNDO PISO PYP	ANUAL	3-7	5	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo <u>reemplazo de esquineros en mal estado.</u>
PASILLOS PRIMER PISO PISO PYP	ANUAL	1-7	4	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo <u>reemplazo de esquineros en mal estado.</u>
PASILLOS PRIMER PISO	ANUAL	3-7	5	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo <u>reemplazo de esquineros en mal estado.</u>
PASILLOS SEGUNDO PISO ADMINISTRATIVO PISO	ANUAL	1-15	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo <u>reemplazo de esquineros en mal estado.</u>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

*Diana Coy Bello*

\_\_\_\_\_  
DIANA CAROLINA COY BELLO

**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO**

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E- Centro

Dirección Calle 9 # 11-74 Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 31/12/2020 Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 97,650,000

Nombre del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
AGITADOR BASCULANTE BOECO - RS44 - AGI-2	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1995	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión y prueba del sistema eléctrico</li> <li>• Revisión y prueba del sistema Mecánico</li> <li>• Revisión y prueba de los controles</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		
AGITADOR DE MAZZINE - INDULAB - TA09 - AGI-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0636	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión y prueba del sistema eléctrico</li> <li>• Revisión y prueba del sistema Mecánico</li> <li>• Revisión y prueba de los controles</li> <li>• Verificación de la superficie alineada</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de alineación del plato</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 139283 - AMA-2	AC-262 - AC_ODONTOLOGIA_108_CENTRO	1980	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada</li> <li>• Verificación del funcionamiento del panel frontal</li> <li>• Revisión porta amalgama</li> <li>• Revisión selector de velocidad</li> <li>• Revisión de partes roscadas y lubricar</li> <li>• Revisión de funcionamiento del motor</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 139282 - AMA-2-1	AC-263 - AC_ODONTOLOGIA_109_CENTRO	1981	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada</li> <li>• Verificación del funcionamiento del panel frontal</li> <li>• Revisión porta amalgama</li> <li>• Revisión selector de velocidad</li> <li>• Revisión de partes roscadas y lubricar</li> <li>• Revisión de funcionamiento del motor</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT				19 al 23	7	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada</li> <li>• Verificación del funcionamiento del panel frontal</li> </ul>



2 - SERIE 139313 - AMA-2-2	AC-237 - AC_ODONTOLOGIA_201_PYP	1982	SEMESTRAL	06 al 10	12	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión porta amalgama</li> <li>• Revisión selector de velocidad</li> <li>• Revisión de partes roscadas y lubricar</li> <li>• Revisión de funcionamiento del motor</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 139315 - AMA-2-4	AC-238 - AC_ODONTOLOGIA_202_PYP	1984	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada</li> <li>• Verificación del funcionamiento del panel frontal</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión porta amalgama</li> <li>• Revisión selector de velocidad</li> <li>• Revisión de partes roscadas y lubricar</li> <li>• Revisión de funcionamiento del motor</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 101997 - AMA-1-4	AC-254 - AC_ODONTOLOGIA_303_PYP	0574	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada</li> <li>• Verificación del funcionamiento del panel frontal</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión porta amalgama</li> <li>• Revisión selector de velocidad</li> <li>• Revisión de partes roscadas y lubricar</li> <li>• Revisión de funcionamiento del motor</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA- ABACUS -5 - ANH-2	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1996	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				02 al 05	11	2021		
ANALIZADOR DE ORINA- URIT-500C - ANA-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1342	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				02 al 05	11	2021		
BAÑO CEROLÓGICO - MEMMERT - 2200 SERIE Nº L294.0852 - BAÑ-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0638	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación tensión</li> <li>• Verificación interruptor de on/off</li> <li>• Verificación de funcionamiento de la cabina</li> <li>• Verificación del funcionamiento de la resistencia</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación del sensor de temperatura y timer</li> <li>• Lubricación de partes móviles</li> <li>• Verificación del sistema de alarmas de temperatura</li> <li>• Verificación de la rejilla de difusión térmica</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				15 al 19	3	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>

BASCULA DE PISO - SECA - 813 - SERIE N° 8813128142395 - BAS- 1-5	AC-254 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	1273	SEMESTRAL	13 al 17	9	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°1000000091654 - BAS- 2- 8	AC-239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1912	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°5874071151329 - BAS-1-1	AC-248 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	1281	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				19 al 23	7	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>

BASCULA DE PISO - SOEHNLE - PHARO - BAS-1-03	AC-337 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_304_PYP	0991	SEMESTRAL	06 al 12	12	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - HEALTH O METER - SERIE N°1600005823 - BAS-1-13	AC-334 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_206_PYP	0338	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>
				06 al 12	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
DIRECTOR/GERENTE							JEFE DE MANTENIMIENTO	

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°5874071151330 - BAS-1-3	AC-176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1284	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°5874159126552 - BAS-1-4	AC-253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	1283	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - BAS-1-7	AC-252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1285	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091875 - BAS-2	AC-181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	1904	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 100000009167 - BAS-2-1	AC-255 - AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	1905	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091665 - BAS-2-2	AC-180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	1906	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091844 - BAS-2-4	AC-179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_US I_CENTRO	1908	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091848 - BAS-2-5	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	1909	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091857 - BAS-2-7	AC-243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	1911	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> </ul>

BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091858 - BAS-2-9	AC-327 - AC_CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	1913	SEMESTRAL	08 al 12	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - BAS-1	AC_VISITAS DOMICILIARIAS	1257	SEMESTRAL	12 al 16	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - SERIE N° 5490003495 - BAS-1-1	AC-180 _AC_ CONSULTORIO_ MEDICO_103_ USI_ CENTRO	0353	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - SECA - 374 - BPB-2	AC-176 - _AC_ CONSULTORIO_ CYD_1 CENTRO	1914	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>

				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - SECA - 374 - SERIE N° 5374310171727- BPB-2-1	AC-186 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_ 105_USI_ CENTRO	1915	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
				BASCULA PESA BEBE - SECA - 374 - SERIE N° 5374113179654- BPB-2-2	AC-179 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_ 102_USI_ CENTRO	1916	SEMESTRAL	10 al 14
12 al 19	11	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>					
12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION					Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5220001166- BAS-1	AC-248 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_ 208_PYP	0463	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.



BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5220001166- BAS-1- 1	AC-181 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_101_USI_CENTRO	0501	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				16 al 18	11	2021		
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002938 BAS-1- 1	AC-239 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_203_PYP	0478	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002463 _BAS- 1-1	AC-249 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_209_PYP	0534	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION

<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5220001017 - BAS-1-2</p>	<p>AC-255_AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106</p>	<p>0517</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>05 al 09</p>	<p>4</p>	<p>2021</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>04 al 08</p>	<p>10</p>	<p>2021</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>12 al 30</p>	<p>4</p>	<p>2021</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>
<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490003517 - BAS-1-3</p>	<p>AC-253_AC_CONSULTORIO_ MEDICO_302_PYP</p>	<p>0569</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>23 al 26</p>	<p>3</p>	<p>2021</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>27 al 30</p>	<p>9</p>	<p>2021</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>12 al 30</p>	<p>4</p>	<p>2021</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>
<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002407 - BAS-1-7</p>	<p>AC-317_AC_SALA_ERA_CENTRO</p>	<p>0784</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>15 al 18</p>	<p>6</p>	<p>2021</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>06 al 10</p>	<p>12</p>	<p>2021</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>12 al 30</p>	<p>4</p>	<p>2021</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>

<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5220000754 - BAS-1</p>	<p>AC-334_AC_CONSULTORIO _ MEDICO _ 206 _ PYP</p>	<p>0468</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>19 al 23</p>	<p>7</p>	<p>2021</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>06 al 10</p>	<p>12</p>	<p>2021</p>		
				<p>12 al 30</p>	<p>4</p>	<p>2021</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>
<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002943 - BAS-1-1</p>	<p>AC-337_AC_CONSULTORIO _ MEDICO _ 304 _ PYP</p>	<p>0559</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>19 al 23</p>	<p>7</p>	<p>2021</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				<p>06 al 10</p>	<p>12</p>	<p>2021</p>		
				<p>12 al 30</p>	<p>4</p>	<p>2021</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>
<p>BASCULA PESA BEBE - KEX GERMANY - BS01S - PES-1</p>	<p>AC-243_AC_CONSULTORIO _ 207 _ pyp</p>	<p>0483</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>08 al 12</p>	<p>3</p>	<p>2021</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				<p>06 al 10</p>	<p>9</p>	<p>2021</p>		
				<p>12 al 30</p>	<p>4</p>	<p>2021</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>

CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS - CLAY ADAMS - DINAC III - CEN-2	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1997	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de corrientes de fuga</li> <li>• Verificación e inspección del rotor</li> <li>• Verificación del mecanismo de acople y ajuste del rotor</li> <li>• Verificación e inspección de los cepillos del motor</li> <li>• Verificación del estado de seguridad de la tapa</li> <li>• Verificación de los botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Verificación de la velocidad de rotación</li> <li>• Verificación del sistema de freno</li> <li>• Limpieza y desinfección del rotor, los protectores, adaptadores y tubos</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección del rotor, los protectores, adaptadores y tubos</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
CONTRA ANGULO - KV00007 - 500 - SERIE N° 2014139492 - CON-1	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 303_PYP	1293	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
CONTRA ANGULO - KV00007 - 500 - SERIE N° 2014139493 - CON-1-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 110_CENTRO	1294	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
CONTRA ANGULO - KV00007 - 500 - SERIE N° LO EBB336753 - CON-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 110_CENTRO	0734	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>

DESFIBRILADOR INTELIGENTE - CU MEDICAL NF-1200 SERIE N° P1M46L0155 - DES-1	AC_184- AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0074	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de perillas selectoras, paletas, interfaces</li> <li>• Revisión y prueba del sistema eléctrico cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes</li> <li>• Revisión y prueba de la batería y el indicador de carga</li> <li>• Verificación de alarmas</li> <li>• Prueba de carga y descarga</li> <li>• Verificación del selector de descarga al paciente</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	12	2021		
DOPPLER FETAL - HUNTELEIGH - D920- XOA14902-08 - DOP-1-1	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0462	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		
DOPPLER FETAL - HUNTELEIGH - D920- DOP-1	AC_248- AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	0368	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIE DE EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840010 / 00466- DOP-2	AC_186- AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	1924	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840010 /	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_US	1925	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> </ul>

560054 - M17A00840016 / 000472 - DOP-2-1	I_CENTRO			12 al 19	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840017 / 000613 - DOP-2-4	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1928	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840019 / 000630 - DOP-2-6	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1930	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> </ul>
				27 al 30	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840024 / 000509 - DOP-2-7	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	1931	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840027 / 000313 - DOP-2-8	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1932	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>

DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840029 / 000615 - DOP-2-9	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	1933	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				17 al 19	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Limpieza de la unidad central y cable del paciente</li> <li>• Limpieza de los electrodos</li> <li>• Limpieza del cabezal de impresión</li> <li>• Verificación de la tensión de red (110v)</li> <li>• Verificación de la capacidad actual de la batería</li> <li>• Revisión del equipamiento y los accesorios mecánicos, eléctricos y electrónicos</li> <li>• Verificación del fusible para comprobar el cumplimiento de corriente nominal y romper características.</li> <li>• Revisión de las funciones del dispositivo como se describen en las instrucciones de uso.</li> <li>• Revisión de la protección de la resistencia a tierra de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite 0.2ohm.</li> <li>• Revisión de la fuga a tierra actual de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite Control numérico 500µA, SFC 1000µA.</li> <li>• Revisión de la fuga actual del paciente de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite: 10µA (CF).</li> <li>• Revisión del cable del paciente incluyendo el cable principal y los cables de derivación, mida conductividad</li> <li>• Verificación de la configuración del sistema</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
ELECTROCARDIOGRAFO - EDAN - SE-3 - N° SERIE 309025-M12500970019 - ELE-1	AC-184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0722	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Limpieza de la unidad central y cable del paciente</li> <li>• Limpieza de los electrodos</li> <li>• Limpieza del cabezal de impresión</li> <li>• Verificación de la tensión de red (110v)</li> <li>• Verificación de la capacidad actual de la batería</li> <li>• Revisión del equipamiento y los accesorios mecánicos, eléctricos y electrónicos</li> <li>• Verificación del fusible para comprobar el cumplimiento de corriente nominal y romper características.</li> <li>• Revisión de las funciones del dispositivo como se describen en las instrucciones de uso.</li> <li>• Revisión de la protección de la resistencia a tierra de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite 0.2ohm.</li> <li>• Revisión de la fuga a tierra actual de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite Control numérico 500µA, SFC 1000µA.</li> <li>• Revisión de la fuga actual del paciente de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite: 10µA (CF).</li> <li>• Revisión del cable del paciente incluyendo el cable principal y los cables de derivación, mida conductividad</li> <li>• Verificación de la configuración del sistema</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQUI-03	AC-337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0385	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>
				23 al 26	3	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>

EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQUI-1-07	AC-253 - AC_CONSULTORIO MEDICO 302 PYP	0409	SEMESTRAL	27 al 30	9	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1	AC-239 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_203_PYP	0475	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1-02	AC-249 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_209_PYP	0535	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1-03	AC-252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0558	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1-04	AC-253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0568	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				24 al 28	5	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>



EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-05	AC-327 - AC_CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	0706	SEMESTRAL	08 al 12	11	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-10	AC-327 - AC_CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	0911	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2	AC-186- AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	1876	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-1	AC-176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1877	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-2	AC-180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_US I_CENTRO	1878	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-3	AC-181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	1879	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		

								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-5	AC-179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_US I_CENTRO	1881	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-3	AC-248 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_ 208_PYP	0776	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN -EQUI-1	AC_VISITAS DOMICILIARIAS	0044	SEMESTRAL	12 al 16	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>
				01 al 06	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH - ALLYN - POCKET LED - REF:9287-BKL - EQUIP-3	AC_ VISITAS DOMICILIARIAS	2419	SEMESTRAL	12 al 16	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>
				01 al 06	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQUI-1-11	AC_ VISITAS DOMICILIARIAS	0416	SEMESTRAL	12 al 16	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> </ul>
				01 al 06	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>

EQUIPO DE QUIMICA A15-BIOSYSTEM - A15 - SERIE N° 831051480 - EQUI-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0654	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				02 al 05	11	2021		
EQUIPO HUMACOUNT PARA HEMATOLOGIA- HUMACOUNT - HUMAN - EQUI-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0637	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				02 al 05	11	2021		
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1	AC-337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0376	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
FONENDOSCOPIO - GRIS - FON-1-05	AC-184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0359	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
FONENDOSCOPIO - HOUSON - FON-1-09	AC-317_AC_SALA_ERA_CENTRO	0363	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1	AC-239_AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0476	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		

FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2	AC-327 - AC_CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	1869	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2-1	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	1870	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2-2	AC-180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_US I_CENTRO	1871	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2-3	AC-179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_US I_CENTRO	1872	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 19	11	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- 3M - REF: 5870 - FON-5	AC-181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	2417	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		

FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III - FON-2-5	AC-176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1874	SEMESTRAL	19 al 23	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1	AC-248 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_ 208_PYP	0518	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1	AC-249 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_ 209_PYP	0381	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1-1	AC-252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0562	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1-2	AC-253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0570	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		

FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1-4	AC-334_AC_CONSULTORIO _ MEDICO _206 _PYP	0770	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
FONENDOSCOPIO - VINO TINTO - FON-1-02	AC- VISITAS DOMICILIARIAS	0352	SEMESTRAL	12 al 16	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	12	2021		
FONENDOSCOPIO - FON-1	AC- VISITAS DOMICILIARIAS	0045	SEMESTRAL	12 al 16	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	12	2021		
INSERTO DE CAVITRON 25 K - DENTSPLAY - M040234 SERIE N°2014100588 - INS - 1 - 1	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 303_PYP	1300	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje</li> <li>• Limpieza de conductos de presión</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		
INSERTO DE CAVITRON 25 K - DENTSPLAY - M040234 SERIE N°2014100593 - INS - 1 - 5	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 202_PYP	1299	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje</li> <li>• Limpieza de conductos de presión</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - GS-300 - LAM-	AC_327 - CONSULTORIO _ ROSA _ CENTRO	1964	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Verificación del sistema de intensidad lumínica</li> <li>• Revisión del interruptor on/off</li> </ul>

2	CENTRO			08 al 12	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - GS-300 - LAM-2-1	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1965	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Verificación del sistema de intensidad lumínica</li> <li>• Revisión del interruptor on/off</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - GS-300 - LAM-2-3	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1967	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Verificación del sistema de intensidad lumínica</li> <li>• Revisión del interruptor on/off</li> </ul>
				02 al 08	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - LS 135 - LAM-1	AC_248- AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	0561	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Verificación del sistema de intensidad lumínica</li> <li>• Revisión del interruptor on/off</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA DE FOTOCURADO - 3M - ELIPAR 2500 SERIE N°	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_	1067	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro</li> </ul>

3020839 - LAM-1	303_PYP			04 al 08	10	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA DE FOTOCURADO - FNDENTAL - SUN LITE SERIE N° 118003 - LAM-1-1	AC_254-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	0728	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011063 - LFC-2-5	AC_238-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_202_PYP	1974	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011064 - LFC-2	AC_263-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	1969	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM	AC_262-AC CONSULTORIO ODONTOLOGIA	1970	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> </ul>



S/N 1010011075 - LFC-2-1	108 - CENTRO			06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011067 - LFC-2-2	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_201_PYP	1971	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011062 - LFC-2-4	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	1973	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de tensión (110v)</li> <li>• Verificación de encendido y apagado de bombillo</li> <li>• Verificación del ventilador</li> <li>• Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-03	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	0802	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-04	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0803	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-05	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0804	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-07	AC_255- AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	0806	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				04 al 10	10	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS -	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO	0807	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> </ul>

MAR-1-08	304 PYP	0822		06 al 10	12	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validante y corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-23	AC_253-AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0822	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				27 al 30	9	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CVD_CENTRO	1882	SEMESTRAL	19 al 23	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-2	AC_248-AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	1884	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				13 al 17	9	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-3	AC_180-AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_US I_CENTRO	1885	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-4	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	1886	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-5	AC_186-AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	1887	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-6	AC_179-AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_US I_CENTRO	1888	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				16 al 19	11	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-7	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1889	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-8	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	1889	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - LORD - MAR-1-01	AC_327 - CONSULTORIO _ ROSA _ CENTRO	0800	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
MICROMOTOR - KV00005 - 500 SERIE N° 2014136671 - MIC-1-1	AC_254-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	1303	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		
MICROMOTOR - KV00005 - 500 SFRIF N° 2014136672 -	AC_190-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA	1304	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> </ul>

MIC-1-2	110_CENTRO			06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
MICROMOTOR MARCA LYNX L40808105 (2723) CONTRAANGULO EBZ01313 (2721) CABEZA C31121061 (2724) - MIC - 1-4	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	1169	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
MICROMOTOR MARCA NSK EX-203C -SERIAL: ABB30924 (2787) CONTRANGULO (AF 2789) SERIAL EBB33676/ 0197 MARCA : NSK (2789) CABEZA SERIAL: OBF10574 MIC - 1-4	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO	0758	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
MICROMOTOR - NSK - MIC-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	0733	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		
MICRONEBULIZADOR - AMERICAN BATEX - MOD 3231 SERIE N° 811021956 - MIC-1-1	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0987	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del sistema eléctrico</li> <li>• Revisión sistema mecánico generador de presión</li> <li>• Revisión y ajuste de válvulas admisión y escape</li> <li>• Revisión de culata y empaque</li> <li>• Verificación y revisión de filtros</li> <li>• Prueba de presión y flujo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
MICRONEBULIZADOR - THOMAS- SERIE N° 91000028443 - MIC-1	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0047	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del sistema eléctrico</li> <li>• Revisión sistema mecánico generador de presión</li> <li>• Revisión y ajuste de válvulas admisión y escape</li> <li>• Revisión de culata y empaque</li> <li>• Verificación y revisión de filtros</li> <li>• Prueba de presión y flujo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
MICROSCOPIO - OLYMPUS - CXZIFS1 SERIE N° 9582270 - MIC -1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0678	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de la tensión (110v)</li> <li>• Limpieza de oculares y objetivos con papel</li> <li>• Verificación del regulador de intensidad</li> <li>• Verificación del sistema óptico</li> <li>• Verificación de los movimientos macrometricos y micrométricos</li> <li>• Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente</li> <li>• Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque.</li> <li>• Verificación del diafragma</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		

MICROSCOPIO BINOCULAR- OLYMPUS - CH-2- MIC -1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0651	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de la tensión (110v)</li> <li>• Limpieza de oculares y objetivos con papel</li> <li>• Verificación del regulador de intensidad</li> <li>• Verificación del sistema óptico</li> <li>• Verificación de los movimientos macrometricos y micrométricos</li> <li>• Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente</li> <li>• Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque.</li> <li>• Verificación del diafragma</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de la tensión (110v)</li> <li>• Limpieza de oculares y objetivos con papel</li> <li>• Verificación del regulador de intensidad</li> <li>• Verificación del sistema óptico</li> <li>• Verificación de los movimientos macrometricos y micrométricos</li> <li>• Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente</li> <li>• Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque.</li> <li>• Verificación del diafragma</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
MICROSCOPIO BINOCULAR- OLYMPUS - CX 21 - MIC -1 - 1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0652	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de la tensión (110v)</li> <li>• Limpieza de oculares y objetivos con papel</li> <li>• Verificación del regulador de intensidad</li> <li>• Verificación del sistema óptico</li> <li>• Verificación de los movimientos macrometricos y micrométricos</li> <li>• Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente</li> <li>• Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque.</li> <li>• Verificación del diafragma</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de la tensión (110v)</li> <li>• Limpieza de oculares y objetivos con papel</li> <li>• Verificación del regulador de intensidad</li> <li>• Verificación del sistema óptico</li> <li>• Verificación de los movimientos macrometricos y micrométricos</li> <li>• Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente</li> <li>• Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque.</li> <li>• Verificación del diafragma</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 109 - CENTRO	1990	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2-1	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 108 - CENTRO	1991	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2-2	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 201_PYP	1992	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> </ul>

				06 al 10	12	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de los componentes</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2-3	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_202_PYP	1193	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
NEBULIZADOR - BONTEX - ALPHA NEB SERIE N° 0811021954 - NEB-1-1	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0915	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación del sistema eléctrico</li> <li>Revisión sistema mecánico generador de presión</li> <li>Revisión y ajuste de válvulas admisión y escape</li> <li>Revisión de culata y empaque</li> <li>Verificación y revisión de filtros</li> <li>Prueba de presión y flujo</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
PESA BEBE BLANCO - KEX GERMANY - PES - 1	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	0483	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>Verificación de botones</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	9	2021		
PIANO CUENTA CELULAS - DOS TECLAS - PIA - 1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0644	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		
PIANO CUENTA CELULAS - OCHO TECLAS - PIA - 1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0645	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		
PIEZA DE MANO - KAVO - 650C SERIE N° 2014190594 - PIE-1-4	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	1309	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación del eje del micromotor</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				04 al 08	10	2021		

PIEZA DE MANO - NSK - 650C SERIE N° 2014190594 - PIE-1-5	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110-CENTRO	1069	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
PIEZA DE MANO - NSK - PANAAIR SERIE N° DBD60086-AT3A4B42W386H - PIE-1	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	1009	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
PIEZA DE MANO - NSK - PANAAIR SERIE N° ATPX6B438-CBC11620 - PIE-1-1	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO	0378	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
PIPETA - BOECO - 5-50 - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0639	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		
PIPETA - BOECO - 100-1000 SERIE N° 08X5149 - PIP-1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0641	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		

PIPETA - HUMAPETTE - 100 UL - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0657	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
PIPETA - HUMAPETTE - 100 UL - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0656	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
PIPETA - HUMAPETTE - 50 UL - PIP-1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0659	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
PIPETA - HUMAPETTE - 200 UL - PIP-1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0658	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del embolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>

PIPTEADOR - BRAND - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0643	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación del pistón</li> <li>• Verificación del porta puntas</li> <li>• Verificación de ajuste de puntas</li> <li>• Prueba de fugas</li> <li>• Verificación del botón del mecanismo de expulsión</li> <li>• Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar</li> <li>• Lubricación del émbolo y el pistón</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				02 al 05	11	2021		
PULSIOXIMETRO - CHOICEMED - PUL-1-1	AC_186- AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	0723	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de sensores receptor y emisor</li> <li>Verificación de voltaje y amperaje</li> <li>Verificación de baterías.</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Verificación del sistema de alarma y seguridad</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Remplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
PULSIOXIMETRO - EDAN H100B - SERIAL 360101 - M17910510049 - PUL-2	AC_184- AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	1968	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de sensores receptor y emisor</li> <li>Verificación de voltaje y amperaje</li> <li>Verificación de baterías.</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Verificación del sistema de alarma y seguridad</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Remplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				08 al 12	11	2021		
SCALER - NSK - AS2000 - SCA- 2-1	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 108 - CENTRO	1986	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
SCALER - NSK - AS2000 - SCA- 2-2	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 201_PYP	1987	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		



SCALER - NSK - AS2000 - SCA-2-3	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	1988	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
SCALER - NSK - AS2000 - SCA-2-4	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	1989	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				06 al 10	12	2021		
TENSIOMETRO - ALPK2 - SERIE N°875350 - TEN-1-043	AC_248- AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	0254	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				13 al 17	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N° 121116164541 - TEN-1-005	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	0216	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				06 al 10	12	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N° 121116162821 - TEN-1-006	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0217	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				06 al 10	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116143253 - TEN - 1- 075	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	0286	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				16 al 19	11	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116151313 - TEN-1-012	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0223	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				27 al 30	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116164234 +A409- TEN-1-062	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0273	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				06 al 10	12	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116163502 - TEN-1-063	AC_180- AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_US I_CENTRO	0274	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				16 al 19	11	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116162442 - TEN-1-064	AC_327 - CONSULTORIO _ ROSA _ CENTRO	0275	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				08 al 12	11	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116163514- TEN-1-065	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0276	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				27 al 30	9	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116150211- TEN-1-066	AC_184- AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0277	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				08 al 12	11	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116144253 - TEN-1-081	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_US I_CENTRO	0292	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				16 al 19	11	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116151941- TEN-1-082	AC_186- AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	0293	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				06 al 10	12	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N° 1211161555943 - TEN-1-087	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0298	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				13 al 17	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
TENSIOMETRO PEDIATRICO ALPK2 - ANEROIDES SERIE N° 1801185 - TEN-1-5	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0206	SEMESTRAL	08 al 12	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				06 al 10	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION

TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE N°101221184254 - TEN-1-2	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0203	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				06 al 10	12	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE SERIE_061129091703 - TEN-1	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0064	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				13 al 17	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE N°110420174303 - TEN-1-1	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CVD_CENTRO	0202	SEMESTRAL	19 al 23	4	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				08 al 12	11	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831133327 - TEN-1-1	AC_186- AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_US I_CENTRO	1854	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				06 al 10	12	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831133508- TEN-2-01	AC_248- AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	1855	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				13 al 17	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <del>Prueba de funcionamiento Final</del>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831132509- TEN-2-02	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	1856	SEMESTRAL	23 al 26	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				27 al 30	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <del>Prueba de funcionamiento Final</del>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831122659- TEN-2-03	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	1857	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				06 al 10	12	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <del>Prueba de funcionamiento Final</del>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831134327 TEN-2-08	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_US I_CENTRO	1863	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				16 al 19	11	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <del>Prueba de funcionamiento Final</del>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831132937 TEN-2-10	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	1864	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				16 al 19	11	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 1170831132959 TEN-2-11	AC_184- AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	1865	SEMESTRAL	24 al 28	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				08 al 12	11	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831132128 TEN-2-14	AC_180- AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_US I_CENTRO	1868	SEMESTRAL	10 al 14	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				16 al 19	11	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 202_PYP	1999	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				06 al 10	12	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
				19 al 23	7	2021		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos

TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-01	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_201_PYP	2008	SEMESTRAL	06 al 10	12	2021	Ingeniera Biomedica	Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-04	AC_202 - AC_FARMACIA_USI_CENTRO	2002	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				06 al 10	12	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-06	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	2004	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				06 al 10	12	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-08	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO	1998	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				06 al 10	12	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-05	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	1794	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				06 al 10	12	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				15 al 18	6	2021		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos



TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-07	AC_202 - AC_FARMACIA_USI_CENTRO	1796	SEMESTRAL	06 al 10	12	2021	Ingeniera Biomeica	Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-08	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	1797	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				06 al 10	12	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-09	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	1798	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				04 al 08	10	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-13	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1802	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				02 al 05	11	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-14	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1803	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				02 al 05	11	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-15	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1804	SEMESTRAL	03 al 07	5	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display
				02 al 05	11	2021		Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final

				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-18	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	1807	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				04 al 08	10	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-27	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	1816	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				06 al 10	12	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOSELLADORA - EURONDA - EUROMATIC - TER-2	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	2025	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de la tensión (110V) Verificación del pistón sellador Verificación de filtros Verificación de válvulas Verificación de la temperatura Verificación del sistema mecánico Lubricación de partes mecánicas Verificación de la termocupla Verificación del regulador digital Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				06 al 10	12	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOSELLADORA - EURONDA - EUROMATIC - TER-1	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	0860	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de la tensión (110V) Verificación del pistón sellador Verificación de filtros Verificación de válvulas Verificación de la temperatura Verificación del sistema mecánico Lubricación de partes mecánicas Verificación de la termocupla Verificación del regulador digital Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				06 al 10	12	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO	1978	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
				06 al 10	12	2021		
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	1976	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
				06 al 10	12	2021		
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-2	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	1979	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				06 al 10	12	2021		

UNIDAD ODONTOLOGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-3	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_201_PYP	1977	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
				06 al 10	12	2021		
UNIDAD ODONTOLOGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-4	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_202_PYP	1975	SEMESTRAL	19 al 23	7	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
				06 al 10	12	2021		
UNIDAD ODONTOLOGICA - UNI-1	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	0572	SEMESTRAL	05 al 09	4	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
				04 al 08	10	2021		

MONITOR DE SIGNOS VITALES - EDAN - MON-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0085	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de tensión (110v) Verificación del panel de control, perilla e indicadores Verificación del módulo de presión arterial Verificación de brazaletes y sensor de saturación Verificación de sistema de control Verificación de alarmas Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				06 al 10	12	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICICO - THOMAS - ASP-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0086	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de tensión (110v) Revisión y prueba del sistema eléctrico Revisión y prueba del sistema generador de vacío Revisión y limpieza de filtros Verificación regulador de velocidad Verificación del motor Verificación de fugas Verificación de mangueras Revisión y prueba de manovacuometro Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				06 al 10	12	2021		
TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN - SERIE 141127173947- TEN-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0201	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazaletes Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				06 al 10	12	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del

TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN TEN-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0214	SEMESTRAL	06 al 10	12	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	brazaletes Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - SERIE 114D27725 - FON-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0354	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				06 al 10	12	2021		• Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - SERIE K14K133615 - FON-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0400	SEMESTRAL	15 al 18	6	2021	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				06 al 10	12	2021		• Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final



DIRECTOR/GERENTE

KAREN TATIANA MONTAÑEZ CARDENAS

**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO**

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E- Magdalena

Dirección cra 25 # 4a -147 Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 31/12/2020 Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 97,650,000

Nombre del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - MODELO 522KL SERIE N° 5490002756 - BAS -1-4	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0900	TRIMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-05	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0387	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°- N°121116161331 TEN-1-061	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0272	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de fugas</li> <li>• Verificación de estado de pera</li> <li>• Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>• Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>• Prueba de mediciones para verificación</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - HEALTH O METER - MODELO 522KL	AC-151 -			15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> </ul>

METEK - MODELO 522KL SERIE N° - 599T00313 - BAS - 1-01	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0326	SEMESTRAL	23 al 27	8	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1-11	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0365	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación acústica</li> <li>Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>Verificación del estado de las olivas</li> <li>Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-11	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAG DALENA	0810	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpier con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - MODELO 522KL SERIE N° 5490003518 - BAS -1-5	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0910	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>Verificación de botones</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1-09	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0909	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>Revisión del regulador de intensidad</li> <li>Revisión del bombillo</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN FON-1-1	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA	0419	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación acústica</li> <li>Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>Verificación del estado de las olivas</li> </ul>



	GDALENA			23 al 27	8	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
DOPPLER FETAL - HUNTELEIGH - D920-D920 SERIE N° CE 0088 - DOP-1	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0077	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>Prueba acústica del transductor</li> <li>Revisión del selector de volumen</li> <li>Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de sensores receptor y emisor</li> <li>Verificación de voltaje y amperaje</li> <li>Verificación de baterías.</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Verificación del sistema de alarma y seguridad</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
PULSIOXIMETRO - HUNTLEIGH - SERIE N° 750AX0104669-14 - PUL-1	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	1230	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de sensores receptor y emisor</li> <li>Verificación de voltaje y amperaje</li> <li>Verificación de baterías.</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Verificación del sistema de alarma y seguridad</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de fugas</li> <li>Verificación de estado de pera</li> <li>Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>Prueba de mediciones para verificación</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116160034 TEN-1-052	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0263	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de fugas</li> <li>Verificación de estado de pera</li> <li>Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>Prueba de mediciones para verificación</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de fugas</li> <li>Verificación de estado de pera</li> <li>Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>Prueba de mediciones para verificación</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-13	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0812	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>Martillo exclusiva para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
UNIDAD ODONTOLOGICA - AMERICAN DENTAL - V-920 SERIE N° AS-0045 - UNI-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	0883	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de voltaje y amperaje</li> <li>Verificación de intensidad de la lámpara</li> <li>Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón</li> <li>Verificación de válvulas del sistema</li> <li>Verificación de succión y desagües</li> <li>Verificación del sistema de regulación</li> <li>Verificación de fugas</li> <li>Lubricación de partes móviles</li> <li>Verificación de componentes electrónicos y tablero de control</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		

								Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
LAMPARA DE FOTOCURADO - BLUEPHASE - LAM-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_ 105_MAGDALENA	0754	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico
				23 al 27	8	2021		• Verificación del estado y funcionamiento de la fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final

AMALGAMADOR - MILENIUM - OB-338 SERIE N° 006001201306A - AMA-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	0887	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada</li> <li>• Verificación del funcionamiento del panel frontal</li> <li>• Revisión porta amalgama</li> <li>• Revisión selector de velocidad</li> <li>• Revisión de partes roscadas y lubricar</li> <li>• Revisión de funcionamiento del motor</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
CAVITRON SCALER - NSK - NF133 SERIE N° A2701780 - CAV-1-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	0889	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación física del equipo.</li> <li>• Prueba de voltaje y amperaje.</li> <li>• Limpieza de conductos de presión.</li> <li>• Verificación de componentes electrónicos.</li> <li>• Limpieza interna y externa del equipo.</li> <li>• Prueba de funcionamiento.</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
MICROMOTOR - NSK - EX203C SERIE N° AP590128- MIC -1-3	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	1121	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
MICROMOTOR - KV00005 - 500 SERIE N° 2014136670 - MIC-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	1302	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de turbina.</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación de eje de micromotor</li> <li>• Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
PIEZA DE MANO - NSK - PANAIR SERIE N° C2615558 - PIE-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	0884	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
PIEZA DE MANO - NSK - PANAIR SERIE N° DBD60001 - PIE-1-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	0888	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
CONTRA ANGULO - KV00007 - 500 SERIE N° 2014139495 - CON-1-2	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	1295	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				15 al 19	2	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> </ul>

CONTRA ANGULO - CONTRA ANGULO EP291658 (2916) CABEZA OP291658 (2917) - SERIE N° EP291658 - OP291658 - CON-1-4	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	1122	SEMESTRAL	23 al 27	8	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
EQUIPO DIGITAL RXELITY 70 EQUI-1	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	0765	SEMESTRAL	15 al 19	3	2021	Ingeniera Biomedica	• De acuerdo al protocolo del proveedor de mantenimiento.
				13 al 17	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
NEGATOSCOPIO - IMCOL - NEG-1-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	0910	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	• Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos
				23 al 27	8	2021		
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-02	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	1791	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCUA PESA BEBE - HEALTH O METER - MODELO 549KL SERIE N° 5490003550 - BAS-1-2	AC-155 - AC_CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	0926	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> </ul>

BASCULA DE PISO - SECA - 874 SERIE N° 5874071151329 - BAS-1-5	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	1288	SEMESTRAL	23 al 27	8	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-11	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0924	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>Revisión del regulador de intensidad</li> <li>Revisión del bombillo</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN N-60 - FON-1	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0925	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación acústica</li> <li>Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>Verificación del estado de las olivas</li> <li>Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
LAMPARA CUELLO DE CISNE - LAM-1-12	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0103	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Revisión de componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>Verificación del sistema de intensidad lumínica</li> <li>Revisión del interruptor on/off</li> <li>Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
TENSIOMETRO PEDIATRICO - HONSUN - S/N:102769 - TEN-1-4	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0205	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de fugas</li> <li>Verificación de estado de pera</li> <li>Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>Prueba de mediciones para verificación</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION

TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN- SERIE N°121116144752 - TEN-1-069	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0280	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1-16	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	1778	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-12	AC-155 - AC_ CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	0811	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE 1000000091677 - BAS-2-3	AC-156 - AC_ CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	1907	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
				12 al 30	4	2021		
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-12	AC-156 - AC_ CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	0417	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		
TENSIOMETRO PEDIATRICO -	AC-156 -			15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de fugas</li> <li>• Verificación de estado de pera</li> <li>• Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>• Verificación del estado del manómetro y del</li> </ul>

WELCH ALLYN - SERIE 170831133527 - TEN-2-07	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	1861	SEMESTRAL	23 al 27	8	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <i>Prueba de funcionamiento Final</i>
				12 al 30	4	2021		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116164542 - TEN-1-060	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0271	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				23 al 27	8	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <i>Prueba de funcionamiento Final</i>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-20	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0819	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		



DIRECTOR/GERENTE

KAREN TATIANA MONTAÑEZ CARDENAS

## PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E- Monquirá

Dirección Carrera 14 # 16-4 Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 31/12/2020 Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 97,650,000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBE- HEALTH O METER - MODELO 522KL SERIE N° 5490003537 - BAS-1-6	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MO NQUIRA	0966	TRIMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verificación de estado físico</li> <li>· Verificación de accesorios</li> <li>· Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>· Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>· Verificación de botones</li> <li>· Verificación del sistema visual</li> <li>· Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>· Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>· Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>· Verificación de repetibilidad cero</li> <li>· Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>· Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>· Ajuste del sistema</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MO NQUIRA	0965	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Verificación de estado físico</li> <li>· Verificación de accesorios</li> <li>· Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>· Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>· Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>· Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>· Revisión del regulador de intensidad</li> <li>· Revisión del bombillo</li> <li>· Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>· Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
TENSIOMETRO - ALPK2 - SERIE N°563933 - TEN-1-095	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MO NQUIRA	0306	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de fugas</li> <li>Verificación de estado de pera</li> <li>Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>Prueba de mediciones para verificación</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.



BASCULA DE PISO- HEALTH O METER - S/N:1420052858 - BAS-1-08	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	0333	TRIMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>Verificación de botones</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación acústica</li> <li>Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>Verificación del estado de las olivas</li> <li>Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - CAMPANA BLANCA - FON-1-15	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	0369	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación acústica</li> <li>Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>Verificación del estado de las olivas</li> <li>Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-14	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	0813	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos</li> </ul>
NEGATOSCOPIO - IMCOL - NEG-1-4	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	0913	SEMESTRAL	15 al 19	2	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos</li> </ul>
				23 al 27	8	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>Verificación de botones</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> </ul>
BASCULA PESA BEBE- HEALTH O METER - MODELO 522KL SERIE N° 5490003484 - BAS-1-8	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0977	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>Verificación de botones</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>Verificación de botones</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> </ul>

				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-12	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0973	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840014 / 000689 - DOP-2-2	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	1926	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
PULSIOXIMETRO - OXIWATCH - SERIE N° 102124701716 - PUL-1-2	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0984	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de sensores receptor y emisor</li> <li>• Verificación de voltaje y amperaje</li> <li>• Verificación de baterías.</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Verificación del sistema de alarma y seguridad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116145812 - TEN-1-024	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0235	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de fugas</li> <li>• Verificación de estado de pera</li> <li>• Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>• Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>• Prueba de mediciones para verificación</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
				12 al 30	4	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS -	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0820	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> </ul>

MAR-1-21	AC-165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0923	SEMESTRAL	01 al 06	9	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
DOPPLER FETAL - HUNTLEIGH - FDIPX0350257-11 - DOP-1-2	AC-165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0923	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y eléctricos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Prueba acústica del transductor</li> <li>• Revisión del selector de volumen</li> <li>• Verificación de la pantalla y teclas</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
BASCULA PESA BEBE- HEALTH O METER - 549KL SERIE N° 5490003092 - BAS-1- 1	AC-165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0988	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
BASCULA DE PISO- SECA 874DR - SN/10000000091871 con cargador - BAS-2-6	AC-165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	1910	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> <li>• Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>• Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>• Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>• Verificación de repetibilidad cero</li> <li>• Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Ajuste del sistema</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION

EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1-4	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0985	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>• Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>• Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>• Revisión del regulador de intensidad</li> <li>• Revisión del bombillo</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1-2	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0982	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0788	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> <li>• Verificación del estado de los tubos auditivos</li> <li>• Prueba de repetibilidad de resultados</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Verificación del sistema de intensidad lumínica</li> <li>• Revisión del interruptor on/off</li> <li>• Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - 65-300 - LAM- 2-2	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	1966	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Revisión de componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>• Prueba de impedancia y voltajes</li> <li>• Verificación del sistema de intensidad lumínica</li> <li>• Revisión del interruptor on/off</li> <li>• Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Reemplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de fugas</li> <li>• Verificación de estado de pera</li> <li>• Verificación del estado de la válvula de alivio</li> </ul>
				01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de fugas</li> <li>• Verificación de estado de pera</li> <li>• Verificación del estado de la válvula de alivio</li> </ul>

TENSIOMETRO PEDIATRICO HONSUN - SERIE N°104664 - TEN-1-6	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0207	SEMESTRAL	01 al 06	9	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°SERIE N°121116144751 - TEN-1-068	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0279	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				01 al 06	9	2021		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-16	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_ CYD_MONQUIRA	0815	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	· Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo · Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				01 al 06	9	2021		
UNIDAD ODONTOLOGICA - BLUEPHASE - V-920 SERIE N° A50055 - UNI-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ MONQUIRA	0753	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				01 al 06	9	2021		
LAMPARA DE FOTOCURADO -	AC-167 -			01 al 05	3	2021		· Verificación de estado físico · Verificación de accesorios · Prueba de funcionamiento inicial · Verificación de tensión (110v) · Verificación de encendido y apagado de bombillo

VIVADENT-BLUEPH ASE NM - S/N 1010011068 - LFC-2-3	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1972	SEMESTRAL	01 al 06	9	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación del ventilador</li> <li>Verificación del sistema visual y del filtro óptico</li> <li>Verificación del estado y funcionamiento de la fibra</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
AMALGAMADOR - MILENIUM DB-338 SERIE N° 006001201307A - AMA-1-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1008	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de voltaje de entrada</li> <li>Verificación del funcionamiento del panel frontal</li> <li>Revisión porta amalgama</li> <li>Revisión selector de velocidad</li> <li>Revisión de partes roscadas y lubricar</li> <li>Revisión de funcionamiento del motor</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de turbina.</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación de eje de micromotor</li> <li>Prueba de funcionamiento</li> </ul>
MICROMOTOR - NSK - SERIE N° EP291660 - MIC -1-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0998	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de turbina.</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación de eje de micromotor</li> <li>Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de turbina.</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación de eje de micromotor</li> <li>Prueba de funcionamiento</li> </ul>
MICROMOTOR - NSK - SERIE N° EBB33674-PUNTA RECTA- No. OP591721 - MIC -1-4	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1000	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de turbina.</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación de eje de micromotor</li> <li>Prueba de funcionamiento</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
PIEZA DE MANO - KAVO - 650C SERIE N° 2014190521 - PIE-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1305	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
PIEZA DE MANO - NSK - PANA AIR SERIE N° AT26CA3PK9232-CBC20992-LCB23314 - PIE-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0873	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
CONTRA ANGULO - NSK - EX203C SERIE N° ABB30916 - OBB93705 - CON-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0999	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>	
CONTRA ANGULO - NSK - CONTRA ANGULO :AP590130 (2795) CABEZA:OP291660 - EX203C SERIE N° AP590130- OP591730 - CON-1-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ MONQUIRA	1001	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Lubricación de partes mecánicas</li> <li>• Verificación del motor eléctrico</li> <li>• Verificación de las turbinas</li> <li>• Verificación de rodamientos</li> <li>• Verificación de las aspas</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
TERMOHIGROMETRO - EQ&MD - S/N:ethmx813 - TER- 1-21	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ MONQUIRA	0665	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-17	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ MONQUIRA	1806	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL - ALLA FRANCE - 9109 - TEELD-01	AC-171 - AC_VACUNACION_MONQUIRA	1824	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de baterías y contactos</li> <li>• Revisión Botones y display</li> <li>• Verificación de temperatura y humedad</li> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Remplazo de componentes</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

UNIDAD ODONTOLOGICA - BLUEPHASE - V-920 SERIE N° AS-0046-UNI-1	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0743	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				01 al 06	9	2021		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada Verificación del funcionamiento del panel frontal Revisión porta amalgama Revisión selector de velocidad Revisión de partes roscadas y lubricar Revisión de funcionamiento del motor Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final Verificación de turbina. Lubricación de partes mecánicas Verificación de eje de micromotor Prueba de funcionamiento
AMALGAMADOR - ULTRAMAC 2 SDI SERIE N° 101998 - AMA-1-1	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0732	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada Verificación del funcionamiento del panel frontal Revisión porta amalgama Revisión selector de velocidad Revisión de partes roscadas y lubricar Revisión de funcionamiento del motor Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final Verificación de turbina. Lubricación de partes mecánicas Verificación de eje de micromotor Prueba de funcionamiento
				01 al 06	9	2021		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
MICROMOTOR - NSK - EX203C SERIE N° AP590121 - MIC -1	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0745	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				01 al 06	9	2021		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada Verificación del funcionamiento del panel frontal Revisión porta amalgama Revisión selector de velocidad Revisión de partes roscadas y lubricar Revisión de funcionamiento del motor Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final Verificación de turbina. Lubricación de partes mecánicas Verificación de eje de micromotor Prueba de funcionamiento
PIEZA DE MANO -MARCA: NSK-ATJ8CW8K6W-CBC40253 - PANA AIR SERIE N°ATJ8CW8K6W-CBC40253 - PIE-1-2	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0379	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación de las turbinas Verificación de rodamientos Verificación de las aspas Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final
				01 al 06	9	2021		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación de las turbinas Verificación de rodamientos Verificación de las aspas Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final
PIEZA DE MANO -MARCA:	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109		SEMESTRAL	01 al 05	3	2021		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas



NSK- PANA-AIR SERIE N° DBD50374 -PIE-1-4	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0747	SEMESTRAL	01 al 06	9	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
CONTRA ANGULO - NSK - CONTRA ANGULO OBF10572- CABEZA: OP291811 - SERIE N° EP291811- CABEZA:OB87847. - CON-1	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0746	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Lubricación de partes mecánicas</li> <li>Verificación del motor eléctrico</li> <li>Verificación de las turbinas</li> <li>Verificación de rodamientos</li> <li>Verificación de las aspas</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Remplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de baterías y contactos</li> <li>Revisión Botones y display</li> <li>Verificación de temperatura y humedad</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Remplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-03	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1792	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de baterías y contactos</li> <li>Revisión Botones y display</li> <li>Verificación de temperatura y humedad</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Remplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE- HEALTH O METER - 549KL SERIE N° 5490003556 - BAS-1	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0718	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>Verificación de botones</li> <li>Verificación del sistema visual</li> <li>Lubricación de componentes mecánicos</li> <li>Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)</li> <li>Verificación del ajuste de posición cero</li> <li>Verificación de repetibilidad cero</li> <li>Verificación de la batería (pilas o cargador)</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Ajuste del sistema</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1-06	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0716	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías</li> <li>Limpieza de contactos eléctricos</li> <li>Verificación del funcionamiento de las cabezas</li> <li>Revisión del regulador de intensidad</li> <li>Revisión del bombillo</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		

				01 al 05	3	2021		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>• Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN- ML182 SERIE N°81112181003 - TEN-1-032	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0243	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación de estado físico</li> <li>Verificación de accesorios</li> <li>Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>Verificación de fugas</li> <li>Verificación de estado de pera</li> <li>Verificación del estado de la válvula de alivio</li> <li>Verificación del estado del manómetro y del brazalete</li> <li>Prueba de mediciones para verificación</li> <li>Limpieza y desinfección interna y externa</li> <li>Reemplazo de componentes</li> <li>Prueba de funcionamiento Final</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO- HEALTH O METER - S/N:1420052346 - BAS-1-1	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0335	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos</li> <li>• Verificación de botones</li> <li>• Verificación del sistema visual</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
				12 al 30	4	2021	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - NEGRO - FON-1-03	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0357	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de estado físico</li> <li>• Verificación de accesorios</li> <li>• Prueba de funcionamiento inicial</li> <li>• Verificación acústica</li> <li>• Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.</li> <li>• Verificación del estado de las olivas</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-09	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0808	SEMESTRAL	01 al 05	3	2021	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo</li> <li>• Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante</li> </ul>
				01 al 06	9	2021		



DIRECTOR/GERENTE

KAREN TATIANA MONTAÑEZ CARDENAS

**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO**

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE UGRA CENTRO

Dirección CARRERA 9 N 11 74 Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario. \$ 64,635,000.00

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
Camioneta Volkswagen Amarok OXN 028 MODELO 2014	UGRA CENTRO	1340	CUATRIMESTRAL	'1-30	4		Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION:
	UGRA CENTRO			'1-31	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas
	UGRA CENTRO			'1-30	11	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
Camioneta Volkswagen Amarok OXN 028 MODELO 2014	UGRA CENTRO	1340	Anual	'1-15	11	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PICUP DOBLE OXD 482 MODELO 2007	UGRA CENTRO	1338	CUATRIMESTRAL	'1-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION:
	UGRA CENTRO			'1-31	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas
	UGRA CENTRO			'1-30	12	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE AL TNEACTON Y BALANCEO
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PICUP DOBLE OXD 482 MODELO 2007	UGRA CENTRO	1338	Anual	'1-15	11	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
MOVIL MERCEDES BENZ ACCELO915C/44 OXN 000 MODELO 2009	UGRA CENTRO	1337	SEMESTRAL	'1-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION:
	UGRA CENTRO			'1-31	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
MOVIL MERCEDES BENZ ACCELO915C/44 OXN 000 MODELO 2009	UGRA CENTRO	1337	Anual	'1-15	2	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
	UGRA CENTRO			'1-30	4	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el

MOVIL MAZDA T45 T 45 MT3500CC OXD 441 MODELO 1994	UGRA CENTRO	1341	SEMESTRAL	'1-31	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
MOVIL MAZDA T45 T 45 MT3500CC OXD 441 MODELO 1994	UGRA CENTRO	1341	Anual	'1-15	2	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnica mecánica y de gases
AMBULANCIA NISSAN URBAN OXN 042 MODELO 2015	UGRA CENTRO	1337	ANUAL	'1-30	5	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible ,cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, liquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
AMBULANCIA NISSAN URBAN OXN 042 MODELO 2015	UGRA CENTRO	1337	Anual	'1-15	6	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA	MESUAL	17	1	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION DESEMPEÑO DE CALIDAD
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	2	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION ALARMA Y CITOFONO
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	3	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	LIMPIEZA Y LUBRICACION
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	4	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION CUARTO DE MAQUINAS
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	5	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION MAQUINA DE TRACCION
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	6	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION FRENO
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	7	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION LIMITADOR DE VELOCIDAD
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION CONTROL
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION SEGURIDADES DE POZO

ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	10	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION PUERTAS DE HALL
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	11	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION TECHO DE CABINA
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		17	12	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	PREVISION PARTE INFERIOR DE CABINA REVISION FOSO
COMPRESOR DE AIRE ODONTOLOGICOSCHULZ S3 70%ED	ODONTOLOGIA 201 PYP AC_237	166009002011010*COM- 2*2405	SEMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	9	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 18 SERIE N° 2630236	AC_ODONTOLOGIA_109- CENTRO	166009002011002*COM- 1*0424	SEMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	9	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIATHOMASSA2276	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_ MOVIL 1	166009002011003*COM- 1*0076	SEMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	9	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6 SERIE N° 3114562	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_DIAMANTE	166009002011005*COM-1*1066	SEMESTRAL	15-21	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV 6 SERIE N°981362	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_MORCA	166009002011005*COM-1- 1*1118	SEMESTRAL	15-21	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2021	CONTRATISTA EIUH	

COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV6 SERIE N° 0496	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_SUCRE	166009002011006*COM- 1*0039	SEMESTRAL	15-21	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV6 SERIE N°31310099	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_VANEGAS	166009002011006*COM-1- 1*1090	SEMESTRAL	15-21	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV6 SERIE N° 31114361	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_CAMPAMENTO	166009002011006*COM-1- 2*1146	SEMESTRAL	15-21	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_PEDREGAL_ALT	166009002011009*COM-1- 1*1196	SEMESTRAL	15-21	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR DE AIRE ODONTOLOGICOSCHULZ	AC_ALAMCEN ( RESERVA)	9915900016401*COM-1*1372	ANUAL	15-21	6	2021	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION
COMPRESOR ODONTOLOGIATHOMAS	AC_ALAMCEN ( RESERVA)	166009002011008*COM- 1*0056	ANUAL	15-21	6	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE
COMPRESOR ODONTOLOGICOFURNAS	AC_ALAMCEN ( RESERVA)	166009002011001*COM-1*0019	ANUAL	15-21	6	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE

CONGELADOR COLOR NEGROESTEFAN ULTRALAB XXI-01 SERIE N° 020318-HR	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	166009001014001*CON-1*0492	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
ELECTROBOMBA- HIDRO FLOWWEGVERDE	CUARTO BOMBEO	VERDE	SEMESTRAL	01-07	6	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
				01-07	12	2021	CONTRATISTA EIUH	
ELECTROBOMBA- HIDRO FLOWWEGAZUL	CUARTO BOMBEO	AZUL	SEMESTRAL	01-07	6	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
				01-07	12	2021	CONTRATISTA EIUH	
ELECTROBOMBA- IHMIMNARANJA	PATIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	NARANJA	SEMESTRAL	01-07	6	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
				01-07	12	2021	CONTRATISTA EIUH	
ELECTROBOMBA-SIEMENS SIEMENSGRIS 1	AUDITORIO- RED EMERGENCIA	GRIS 1	ANUAL	08-14	8	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
ELECTROBOMBA-SIEMENS SIEMENSGRIS 2	AUDITORIO- RED EMERGENCIA	GRIS 2	ANUAL	08-14	8	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
ELECTROBOMBABLUE PUMAZUL	ALMACEN	AZUL	ANUAL	08-14	8	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
FILTRO DE AGUANIKKENPIMAG	AC_SALA DE ESPERA 2 PISO _pyp	99159000110231*FIL-1*1425	SEMESTRAL	15-21	5	2021	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO : EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	

FILTRO PURIFICADOR DE AGUA KANGAROO	GERENCIA	166590001003003*FIL-1*0297	SEMESTRAL	15-21	5	2021	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTENIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	
GRECACOLDELEC SERIE 414	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	165590001005001*GRE-1*0295	SEMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE EMPAQUES DE LA LLAVE DEL GRIFO PARA SALIDA DE LECHE, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE AGUA, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE CAFÉ, CAMBIO DE RESORTES, REVISIÓN DE PERA, TAPA, REVISION CUERPO-RECIPIENTE PARA AGUA CALIENTE, PORTA NIVEL, BOMBILLO PILOTO, BOTÓN SWTICH, TAPA DE ENTRADA DE AGUA DE LA CALDERA, PORTA NIVEL, LLAVE DEL GRIFO METÁLICO Y SOPORTE DE LA GRECA, PRUEBA FUNCIONAMIENTO.
				15-21	9	2021	CONTRATISTA EIUH	
GRECACOLDELEC SERIE JD	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	165590001005001*GRE-1*0296	SEMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE EMPAQUES DE LA LLAVE DEL GRIFO PARA SALIDA DE LECHE, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE AGUA, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE CAFÉ, CAMBIO DE RESORTES, REVISIÓN DE PERA, TAPA, REVISION CUERPO-RECIPIENTE PARA AGUA CALIENTE, PORTA NIVEL, BOMBILLO PILOTO, BOTÓN SWTICH, TAPA DE ENTRADA DE AGUA DE LA CALDERA, PORTA NIVEL, LLAVE DEL GRIFO METÁLICO Y SOPORTE DE LA GRECA, PRUEBA FUNCIONAMIENTO.
				15-21	9	2021	CONTRATISTA EIUH	
GUADAÑADORASHINDAIWA 845	AC_MANTENIMIENTO_USI_ADMINISTRATIVO	165590001007001*GUA-1	ANUAL	01-07	7	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIAR CON AGUA Y JABON , LIMPIAR EL FILTRO DE COMBUSTIBLE , ENGRASAR LEVEMENTE RODAMIENTOS Y GUAYAS, ROTAR EL EJE DE POSICIÓN MENSUALMENTE
LAVADORA SAMSUNGDE 33 LIBRAS	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	165523002001001*LAV-1*0300	ANUAL	01-07	7	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACION DE FILTROS, VERIFICACION DE SISTEMA DE LLENADO, VERIFICACIÓN SISTEMA DE DESAGÜE, VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO TABLERO DE CONTROL, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE FILTRO BOMBA, VERIFICACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA SI APLICA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE AMPERAJE Y FRECUENCIA, VERIFICACIÓN DE GOLPES Y FUGAS, VERIFICAR VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO, VERIFICAR SISTEMA DE ARRANQUE, VERIFICAR QUE MANGUERAS Y ACCESORIOS NO PRESENTEN GRIETAS, RUPTURAS O ESTÉN DORADAS LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUZA Y
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILPUMA LA5700	AC_HIGIENE_ORAL_3_TERCER_PISO	166009002011004*MOT-1*0808	SEMESTRAL	20-24	2	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	8	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTROPHY MA 5700A SERIE N° PA226151	AC_HIGIENE_ORAL_2_RAQUER	166009002011007*MOT-1*0803	SEMESTRAL	20-24	2	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	8	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	



MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMAS 100067500 SERIE N° 050200201601	AC_HIIGIENE_ORAL_1_RUBIELA	166009002012002*MOT-1*799	SEMESTRAL	20-24	2	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	8	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMAS SERIE N° 050200201993	AC_HIIGIENE_ORAL_4_STELLA	166009002012003*MOT-1*810	SEMESTRAL	20-24	2	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	8	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILPUMA LA5700	ALMACEN BAJA ADMIN	166009002012001*MOT-1*0389	ANUAL	10	7	2021	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMASMS13	ALMACEN BAJA ADMIN	166009002012001*MOT-1*390	ANUAL	10	7	2021	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMAS	ALMACEN BAJA ADMIN	166009002012001*MOT-1*391	ANUAL	10	7	2021	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION
NEVERACHALLENGERCV430 170526-4304130083	AC_CUARTO FRIO	166009001026003*NEV-2-1*1955	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
NEVERACHALLENGERCV430 SERIE 170921-430413900039	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	166009001026003*NEV-2-1-1*1954	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO
				01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
NEVERACHALLENGERCRI52 SERIE 180223-01562	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	166009001026004*NEV-2-2*1956	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	

NEVERACHALLENGERCR152 SERIE 180223-01550	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	166009001026004*NEV-2-2-1*1957	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
NEVERACENTRALES CCN253FYJBEO SERIE N° 1326267503	AC_LACTANCIA_MATERNA_PY P_SEGUNDO_PISO	166501001011002*NEV-1*0481	SEMESTRAL	08-14	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
#REFI	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	166501001011001*NEV-1*0245	SEMESTRAL	08-14	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
NEVERAULTRALAB2102VR	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	166009001026002*NEV-2*2019	SEMESTRAL	08-14	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
OZONIZADORELECTROWATER	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MORCA	166590001002002*OZO-1-2*1120	SEMESTRAL	15-21	5	2021	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	

OZONIZADORELECTROWATER	AC_MANTENIMIENTO_USI_A ADMINISTRATIVO	166590001002001*OZO- 1*0305	SEMESTRAL	15-21	5	2021	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	
OZONIZADORELECTROMOTOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_CAMPAMENTO	166590001002002*OZO-1- 3*1150	SEMESTRAL	15-21	5	2021	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	
PURIFICADOR DE AGUANIKKEN	AC_SERVICIOS_GENERALES_ USI_ADM	166590001003002*PUR-1*0299	SEMESTRAL	15-21	5	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA , CAMBIO DE FILTROS SI SE REQUIERE
				15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	
PLANCHA VAPORELAGENERAL ELECTRIC	AC_SERVICIOS_GENERALES_ USI_ADM	1250	SEMESTRAL	15-21	5	2021	CONTRATISTA EIUH	REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS, VERIFICACION DE VOLTAJE , VERIFICACION DE FUGAS DE AGUA O VAPOR, LIIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
				15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	
PLANTA ELECTRICAHYPOWER P17E1	AC_MANTENIMIENTO_USI_A ADMINISTRATIVO	164501001001001*PLA-1*0289	SEMESTRAL	01-07	3	2021	CONTRATISTA EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				01-07	9	2021	CONTRATISTA EIUH	
PLANTA ELECTRICAHONDA ES 100BS SERIE N° 60929747	AC_CONDUCTOR_UNIDAD_M OVIL_OXD441	164501001001004*PLA-1*0401	SEMESTRAL	08-14	3	2021	CONTRATISTA EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				08-14	9	2021	CONTRATISTA EIUH	
PLANTA ELECTRICAKIPORKDE 6.500	AC_CONDUCTOR_UNIDAD_M	164501001001004*PLA-1-	SEMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO DE LA

T3 SERIE N° 31310010555	OVL_2	1*0402	SERIE N°	15-21	9	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
REFRIGERADOR VESTFROST MODELO MK304 SERIE N° 20090254585	AC_CUARTO FRIO	166009001014003*REF-1*0493	CUATRIMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
			CUATRIMESTRAL	15-21	7	2021	CONTRATISTA EIUH	
			CUATRIMESTRAL	15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	
REFRIGERADOR VEST FROST MK304 SERIE N° 20090254581	AC_CUARTO FRIO	166009001014004*REF-1- 1*0942	CUATRIMESTRAL	15-21	3	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
			CUATRIMESTRAL	15-21	7	2021	CONTRATISTA EIUH	
			CUATRIMESTRAL	15-21	11	2021	CONTRATISTA EIUH	
REFRIGERADOR VERTICAL ULTRALAB XXI-02VR	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	166009001014006*REF-2*1994	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
			SEMESTRAL	01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	
REFRIGERADOR ICASA ATE-9DU	BODEGA ALMACEN	166002001012001*REF-1*0634	SEMESTRAL	01-07	7	2021	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION
REFRIGERADOR HACEB4565L SERIE N° R134A	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	166009001014004*REF-1*0846	SEMESTRAL	01-07	7	2021	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION

SECADORA DE CARGA FRONTAL BLANCA QUANTUM 8*4 KGQUANTUMSD6-BQ	AC_SERVICIOS_GENERALES_ USI_ADM	165523002001002*SEC-1*2410	ANUAL	10	7	2021	CONTRATISTA	LIMPIEZA DE FILTRO , LIMPIEZA DEL SENSOR DE HUMEDAD, VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE AGUA, LIMPIEZA DEL CONDENSADOR, LIMPOIEZA INTERNA DE TAMBOR Y LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION DE VOLTAJE Y CONEXIONES
TERMOSELLADORAEUROSEA UROSEAL2001 SERIE N° ED140001	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_C ENTRO	166007001003001*TER-1*0860	ANUAL	10	7	2021	CONTRATISTA	LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERNA DEL EQUIPO, INSPECCIONAR LOS CABLES Y CONEXIONES POR POSIBLES DAÑOS O CONTACTOS FLOJOS , INSPECCIONAR LA TERMOCUPLA POR IMPUREZAS O DETERIORO DE LA MISMA PARA EVITAR LA DESCALIBRACIÓN DE LA MISMA
TERMOSELLADORAEURONDAEURO M ATIC	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_C ENTRO	166007005002002*TER- 2*2025	ANUAL	10	7	2021	CONTRATISTA	LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERNA DEL EQUIPO, INSPECCIONAR LOS CABLES Y CONEXIONES POR POSIBLES DAÑOS O CONTACTOS FLOJOS , INSPECCIONAR LA TERMOCUPLA POR IMPUREZAS O DETERIORO DE LA MISMA PARA EVITAR LA
VENTILADOR INDUSTRIAL	AUDITORIO	N/A	ANUAL	10	7	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
DESTILADOR	ALMACEN BAJA ADMIN	166501001027001*DES-1*0866	ANUAL			2021	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION
DESTILADOR BOECO	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_C ENTRO	166501001027002*DES-2*2422	ANUAL			2021	CONTRATISTA EIUH	*LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, DESINCRUSTACIÓN DE CALCÁREOS, REVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRE TEMPERATURA Y EL SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, MÓVIL, CON TANQUE, UNIDAD DE RECIRCULACIÓN, RADIADOR Y NIVEL DE AGUA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL. INFORME DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, INFORME DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO, STICKER DE
AUTOCLAVE 3 BANDEJAS	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_C ENTRO	166007001002003*AUT- 1*0861	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA ELECTRÓNICO. (REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, TERMINALES, CONECTORES, TECLADO, DISPLAY). REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. (RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO, CABLE DE POTENCIA, FUSIBLES)
				01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, VÁLVULA DE DESCARGA AIRE/VAPOR, VÁLVULA DE DRENAJE REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TANQUE, CUBIERTA, BANDEJA DIFUSORA. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_C ENTRO	166007005002001*AUT- 2*2024	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA ELECTRÓNICO. (REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, TERMINALES, CONECTORES, TECLADO, DISPLAY). REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. (RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO, CABLE DE POTENCIA, FUSIBLES)
				01-07	10	2021	CONTRATISTA EIUH	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, VÁLVULA DE DESCARGA AIRE/VAPOR, VÁLVULA DE DRENAJE REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TANQUE, CUBIERTA, BANDEJA DIFUSORA. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE	ALMACEN BAJA ADMINISTRATIVA	166002001005001*AUT- 1*0649	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA EIUH	TRAMITES PARA REPOSICION

*Diana Carolina Coy Bello*

DIRECTOR/GERENTE

DIANA CAROLINA COY BELLO

**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO**

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE MAGDALENA

Dirección CARRERA 25 # 44 A-147

Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario. \$ 64,635,000.00

Nombre del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ 283380	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_106_MAGDALENA	166009002011002*COM-1-1*0871	SEMESTRAL	01-07	4	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2021		
PLANTA ELECTRICAKIPORS/N:31310010562	AC_SALA_DE_ENERGIA_MAGDALENA	164501001001003*PLA-1*1732	SEMESTRAL	01-07	3	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	CAMBIO DE ACELITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FISICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	9	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
REFRIGERADORVESTFROST SERIE Nº 82515641	AC_VACUNACION_MAGDALENA	166009001014003*REF-1-1*0494	CUATRIMESTRAL	01-07	3	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	7	2021		
				01-07	11	2021		
070717ADORFECTROWATER	AC_CONSULTORIO_ODONTO	166590001002001*OZO-1-	SEMESTRAL	01-07	5	2021	CONTRATISTA	EN EL PRIMER MANTEIEMENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO : EL EL SEGUNDO

	LOGIA_106_MAGDALENA	2*927	SEMESTRAL	01-07	11	2021	MANTENIMIENTO EIUH	MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
PURIFICADOR DE AGUANIKKEN WATER FALL	AC_CITAS_MAGDALENA	166590001003001*PUR-1-1*1026	SEMESTRAL	01-07	5	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	EN EL PRIMER MANTEIIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				01-07	11	2021		

*Diana Carolina Coy Bello*

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
DIANA CAROLINA COY BELLO





**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO**

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE MONQUIRA

Dirección Carrera 14 N° 16 - 41 Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 15 DE DICIEMBRE DE 2020 Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario. \$ 64,635,000.00

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ SERIE N° 2665585	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	166009002011002*COM-1-2*1005	SEMESTRAL	08-14	4	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO ( TAQUE , MOTOR , CABEZAL ) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	10	2021		
PLANTA ELECTRICAGENERAC SERIE N° 5823638	AC_CUARTO_DE_SISTEMAS_MONQUIRA	164501001001002*PLA-1*1050	SEMESTRAL	08-14	4	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FISICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				08-14	9	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
REFRIGERADORULTRALAB SERIE N° 02-03-18-HR	AC_VACUNACION_MONQUIRA A	166009001014002*CON-1*1040	CUATRIMESTRAL	08-14	4	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	7	2021		
				08-14	11	2021		
REFRIGERADOR DE 127 LTSVESTFROST S/N 20150766718	AC_CUARTO FRIO MONQUIRA	166009001014005*REF-1*0496	CUATRIMESTRAL	08-14	4	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO ( FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	7	2021		
				08-14	11	2021		
OZONIZADORELECTROWATER	AC_MONQUIRA	166590001002002*OZO-1*0992	SEMESTRAL	08-14	5	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				08-14	11	2021		

OZONIZADORELECTROWATER	AC_MONQUIRA	166590001002002*OZO-1-1*0997	SEMESTRAL	08-14	5	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				08-14	11	2021		
PURIFICADOR DE AGUA	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	1026	SEMESTRAL	08-14	5	2021	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				08-14	11	2021		

*Diana Coy Bello*

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
DIANA CAROLINA COY BELLO



**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA**

SN3000-PMH

Nombre de la institución

SALUD SOGAMOSO E.S.E.

Dirección

Kra 9 N° 11 - 74 (UGRA)

Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración

31/12/2020


Vigencia

2021

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. \$

69,728,250.00


Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*UBIQUITI*NANO BEAM M5 400	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001003001*0157*ANT-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				6	11	2021		
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*UBIQUITI*NANO BEAM M5 400	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001003001*0158*ANT-1-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				6	11	2021		
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*UBIQUITI*NANO BEAM M5 400	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001003001*0159*ANT-1-2	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				6	11	2021		
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*UBIQUITI*NANO BEAM M5 400	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001003001*0160*ANT-1-3	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				6	11	2021		
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*UBIQUITI*NANO BEAM M5 400	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001003001*0161*ANT-1-4	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				6	11	2021		
ANTENA UBIQUITI NANO BEAM M5 400*UBIQUITI*NANO BEAM M5 400	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001003001*0162*ANT-1-5	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				6	11	2021		
CABINA DE SONIDO*AMPIRE *EON ONE	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001009002*0218*CAB-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y verificar que este en correcto funcionamiento.
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004001*1426*CAM-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004001*1394*CAM-1-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004001*1395*CAM-1-2	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004002*1396*CAM-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1400*CAM-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1401*CAM-1-01	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1402*CAM-1-02	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		

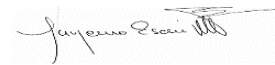

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1403*CAM-1-03	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1404*CAM-1-04	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1405*CAM-1-05	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1406*CAM-1-06	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1407*CAM-1-07	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1408*CAM-1-08	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1409*CAM-1-09	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	165502001004003*1410*CAM-1-10	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
CAMARAS D-LINK*D-LINK*2.8	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	165502001004004*1424*CAM-1-1	SEMESTRAL	5	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_CALIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001001*0233*COM-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	167002001001001*0233*COM-1-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL (3797)*3797	AC_REVISOR_FISCAL_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0108*COM-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_AUXILIAR_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001002*0126*COM-1-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		

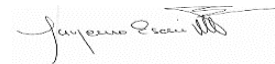

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_AD MINISTRATIVO	167002001001002*0283*COM-1-4	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_TALENTO_HUMANO_USI_AD MINISTRATIVO	167002001001029*2430*COMP-ESC 6-2	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_PLANEACIÓN_USI_ADMINIS TRATIVO	167002001001003*0087*COM-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIV O	167002001001003*0091*COM-1-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_COMUNICACIONES_USI_AD MINISTRATIVO	167002001001003*0210*COM-1-4	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI _ADMINISTRATIV	167002001001003*0234*COM-1-5	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU DELL*3797	AC_CALL_CENTER_1_USI_CENTR O	167002001001004*0817*COM-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CALL_CENTER_2_USI_CENTR O	167002001001004*0825*COM-1-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOG ICO_201_PYP	167002001001005*0434*COM-1-02	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_MEDICO_105 _USI_CENTRO	167002001001005*0457*COM-1-03	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENT RO	167002001001005*0526*COM-1-06	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301 _PYP	167002001001005*0555*COM-1-07	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_MEDICO_302 _PYP	167002001001005*0565*COM-1-08	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOG IA_303_PYP	167002001001005*0580*COM-1-09	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001005*0671*COM-1-10	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_AUDITOR_EN_SALUD	167002001001005*0711*COM-1-14	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CITAS MODULO_3 _USI_CENTRO	167002001001005*0826*COM-1-16	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		

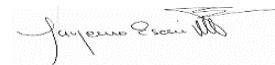

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	167002001001005*0993*COM-1-22	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001029*2429*COMP-ESC- 6-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001006*0128*COM-1	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_MEDICO_208 _PYP	167002001001006*0969*COM-1-2	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_ SEGUNDO_PISO	167002001001009*0371*COM-1-3	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102 _USI_CENTRO	167002001001009*0435*COM-1-4	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167002001001009*0549*COM-1-5	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIV O	167002001001009*0588*COM-1-6	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				4	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_ADMINISTRATIVO_HIGIENE ORAL	167002001001009*0920*COM-1-9	TRIMESTRAL	6	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				11	9	2021		
				6	11	2021		




DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO




Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167002001001010*0116*COM-1-1	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				11	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167002001001011*0134*COM-1-02	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				11	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO *M3598	AC_CALL CENTER 6 CENTRO	167002001001011*0173*COM-1-03	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				11	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONTABILIDAD_USI_ADMIN ISTRATIVO	167002001001011*0204*COM-1-04	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				5	6	2021		
				11	9	2021		
				6	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_TALENTO_HUMANO_USI_AD MINISTRATIVO	167002001001029*2431*COMP-ESC- 6-3	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CALIDAD_USI_ADMINISTRA TIVO	167002001001011*0325*COM-1-09	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001011*0333*COM-1-10	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRA TIVO	167002001001011*0363*COM-1-11	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001011*0429*COM-1-12	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		

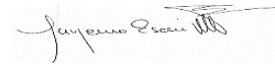

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CUARTO FRIO	167002001001011*0495*COM-1-14	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS_106_USI_CE	167002001001011*0499*COM-1-15	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	167002001001011*0514*COM-1-16	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	167002001001011*0529*COM-1-17	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CITAS_1_USI_CENTRO	167002001001011*0537*COM-1-18	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CONSULTORIO_CRONICOS_PYP	167002001001011*0943*COM-1-24	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	167002001001018**COM-2-5	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167002001001018*2030*COM-2	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CALL CENTER 5 CENTRO	167002001001021*2327*COMP-ESCR-3	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		

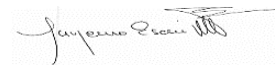

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*ED6E 72Z-N	AC_CALL_CENTER_3	167002001001021*2328*COMP- ESCR-3-1	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*Q6600	AC_CONSULTORIO_NUTRICION_ 106	167002001001021*2329*COMP- ESCR-3-2	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*Q6600	AC_AUXILIAR TALENTO HUMANO	167002001001021*2331*COMP- ESCR-3-4	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*Q6600	AC_ASESORA JURIDICA	167002001001021*2332*COMP- ESCR-3-5	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*Q6600	AC_CITAS_2_USI_CENTRO	167002001001021*2333*COMP- ESCR-3-6	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*Q6600	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	167002001001021*2335*COMP- ESCR-3-8	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU COMPUMAX*Q6600	AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	167002001001021*2336*COMP- ESCR-3-9	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*THINK CENTRE M700	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MO VIL 1	167002001001020*2046*COM-2	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*THINKPAD L470	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_ME DICO	167002001001020*2120*COM-2-1	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*THINKPAD L470	AC_AUXILIAR DE ENFERMERIA MOVIL	167002001001022*2326*COM-POR-3-2	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*THINKPAD L470	AC_COMUNICACIONES_USI_AD MINISTRATIVO	167002001001023*2322*COM-PORT-4	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*LENOVO*THINKPAD L470	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USI_ADMINI	167002001002001*0354*COM-1-4	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				11	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*THINKPAD L470	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_OD ONTOLOGIA	167002001002001*1184*COM-1-9	TRIMESTRAL	13	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*LEONOVO*THINKPAD L470	AC_MEDICO ASISTENCIAL MOVIL	167002001002002*0264*COM-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *TINI M710	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MO VIL 1	167002001002003*0050*COM-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *THINKPAD L470	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167002001002003*0054*COM-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *SATELLITE PRO A40	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_OXD4 41	167002001002003*0326*COM-1-2	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA *SATELLITE PRO A40	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_AD MINISTRATIVO	167002001002003*0370*COM-1-4	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA* *SATELLITE PRO A40	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167002001002004*0742*COM-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*SATELLITE PRO A41	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167002001002005*0148*COM-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*SATELLITE PRO A42	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRA TIVO	167002001002005*0335*COM-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR PORTATIL*TOSHIBA*SATELLITE PRO A43	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITA LARIO_USI_ADMINI	167002001002006*1747*COM- PORT-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M10AX	AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	167002001001017*1743*COM-ESCR- 2-2	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M10AX	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIV O	167002001001017*1744*COM-ESCR- 2-3	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M10AX	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167002001001017*1745*COM-ESCR- 2-4	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
FOTOCOPIADORA *KYOCERA*FS3040MFP	AC_ARCHIVO_DIGITAL_USI_AD MINISTRATIVO	165590001011005*1748*IMP- FOTOC-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA BIXOLON*BIXOLON *SPR-380	AC_LONCHERA_EXTRAMURAL_EN FERMERIA	166502001001001*1021*IMP-1-4	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		

DIRECTOR/GERENTE

Jefe de Mantenimiento

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
IMPRESORA *HP* LASERJET ENTERPRISE	AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	166502001001002*0362*IMP-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA *HP* LASERJET ENTERPRISE	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	166502001001003*0127*IMP-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA *HP* LASERJET ENTERPRISE	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	166502001001003*0317*IMP-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA *HP* LASERJET ENTERPRISE	AC_CITAS MEDICAS 4 USI CENTRO	166502001001004*0550*IMP-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA PARA CODIGOS DE BARRAS*ZEBRA *REF 6C420	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001005*1331*IMP-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA*HP*600	AC_CITAS_1_USI_CENTRO	166502001001006*0856*IMP-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA*SAMSUNG *M2020	AC_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001007*0120*IMP-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA*SAMSUNG *M2020	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001007*0223*IMP-1-2	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA*SAMSUNG *M2020	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USI_ADMINI	166502001001007*0338*IMP-1-4	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
IMPRESORA*SAMSUNG *M2020	AC_DIRECCION_ADMINISTRATI VA_FINAN_ADMINI	166502001001007*0958*IMP-1-7	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA*SAMSUNG *M2020	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	166502001001007*1022*IMP-1-8	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
ESCANER*EPSON*WORKFORCE	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI _ADMINISTRATIV	166502001001011*1736*ESC-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
ESCANER*EPSON*WORKFORCE	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_AD MINISTRATIVO	166502001001011*1737*ESC-1-1-1	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA TERMICA *EPSON*TM- 2011	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	166502001001012*2028*IMP-2	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA *EPSON*ECOTANK	AC_COMUNICACIONES_USI_AD MINISTRATIVO	166502001001014**IMP-2	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
ESCANER*EPSON*WORKFORCE	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_AD MINISTRATIVO	166502001001015*2022*ESC-2	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
ESCANER*EPSON*WORKFORCE	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRA TIVO	166502001001016*2413*ESC-3	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI _ADMINISTRATIV	166502001001017*2026*IMP-2	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				18	9	2021		
				13	11	2021		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	166502001001017*2301*IMP-2-01	TRIMESTRAL	20	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				25	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	166502001001017*2302*IMP-2-02	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				12	6	2021		
				25	9	2021		
				13	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	166502001001017*2303*IMP-2-03	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	166502001001017*2304*IMP-2-04	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	166502001001017*2305*IMP-2-05	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	166502001001017*2306*IMP-2-06	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CUARTO FRIO	166502001001017*2309*IMP-2-09	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	166502001001017*2310*IMP-2-10	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_LIDER_SALUD_PUBLICA_USI_ADMINISTRATIV	166502001001017*2223*IMP-2-11	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		



\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO




Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001017*2321*IMP-2-12	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	166502001001017*2358*IMP-2-13	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	166502001001017*2359*IMP-2-14	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	166502001001017*2360*IMP-2-15	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	166502001001017*2361*IMP-2-16	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	166502001001017*2362*IMP-2-17	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	166502001001017*2385*IMP-2-18	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001018*2337*IMP-3	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	166502001001018*2338*IMP-3-1	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	166502001001018*2339*IMP-3-2	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001018*2342*IMP-3-5 ** ** **	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001018*2343*IMP-3-6	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_PSICOLOGIA CENTRO	166502001001019*2389*IMP-4	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIV	166502001001019*2402*IMP-4-1	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_CITAS_2_USI_CENTRO	166502001001019*2395*IMP-4-3	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_CONSULTORIO_VACUNACION_204_PYP	166502001001019*2396*IMP-4-4	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_PUNTO IAMI_P_Y_P	166502001001019*2352*IMP-4-5	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_COORDINACION SIAU	166502001001019*2353*IMP-4-6	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		

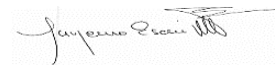

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO


Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	166502001001019*2409*IMP-4-8	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA *HP-LASER 107W*107W	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_201_PYP	166502001001019*2406*IMP-4-9	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*HP*PRO M428	AC_ASESORA JURIDICA	166502001001020*2399*IMP-5	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_TALENTO_HUMANO_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011401*0667*IMP-1-1	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
IMPRESORA LASER*SAMSUNG*M2020	AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL_2	9915900011402*0672*IMP-1-1	TRIMESTRAL	27	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				19	6	2021		
				25	9	2021		
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0174*RAD-1	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0175*RAD-1-01	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0176*RAD-1-02	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0177*RAD-1-03	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0178*RAD-1-04	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0179*RAD-1-05	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0180*RAD-1-06	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	167001001004001*0181*RAD-1-07	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		



DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0182*RAD-1-08	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0183*RAD-1-09	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0184*RAD-1-10	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0185*RAD-1-11	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0186*RAD-1-12	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0187*RAD-1-13	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0188*RAD-1-14	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0189*RAD-1-15	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0190*RAD-1-16	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0191*RAD-1-17	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
RADIO ENLACE NANO BENA NBE-M5-16*UBIQUITI*NANO BENA NBE-M5-16	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	167001001004001*0192*RAD-1-18	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar copia de seguridad de radios, verificar alineación y frecuencias de uso para su correcto funcionamiento
				20	11	2021		
TELÉFONO PARA RECEPCIÓN IP*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIV	9915900011103*2049*TRECEP-2	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2050*TEL-2	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	9915900011104*2051*TEL-2-01	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADM INISTRATIVO	9915900011104*2052*TEL-2-02	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_DIRECCION_ADMINISTRATIVA_FINAN_ADMINI	9915900011104*2053*TEL-2-03	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_COORDINACION_ASISTENCIAL_USI_ADMINIST	9915900011104*2054*TEL-2-04	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CALIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2055*TEL-2-05	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		

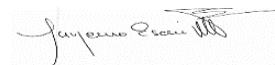

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2056*TEL-2-06	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_LIDER_SALUD_PUBLICA_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2062*TEL-2-12	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_TALENTO_HUMANO_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2063*TEL-2-13	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				20	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2064*TEL-2-14	SEMESTRAL	19	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2065*TEL-2-15	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONTRATACION_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2066*TEL-2-16	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_PLANEACIÓN_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2067*TEL-2-17	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2068*TEL-2-18	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2070*TEL-2-19	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	9915900011104*2071*TEL-2-20	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CALL_CENTER_3	9915900011104*2072*TEL-2-21	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	9915900011104*2073*TEL-2-22	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	9915900011104*2074*TEL-2-23	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	9915900011104*2075*TEL-2-24	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	9915900011104*2076*TEL-2-25	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ODONTOLOGIA_110-CENTRO	9915900011104*2077*TEL-2-26	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	9915900011104*2078*TEL-2-27	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_MEDICO_208_PYP	9915900011104*2079*TEL-2-28	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		

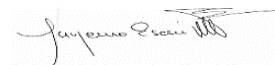

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	9915900011104*2080*TEL-2-29	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	9915900011104*2081*TEL-2-30	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	9915900011104*2082*TEL-2-31	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	9915900011104*2083*TEL-2-32	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO PSICOLOGIA 3 PISO	9915900011104*2084*TEL-2-33	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	9915900011104*2085*TEL-2-34	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_AUXILIAR_COOR_ASISTENCIAL_USI_ADMINIS	9915900011104*2086*TEL-2-35	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_SIAU_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2087*TEL-2-36	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_PUNTO IAMI_P_Y_P	9915900011104*2088*TEL-2-37	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	9915900011104*2089*TEL-2-38	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	9915900011104*2096*TEL-2-45	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	9915900011104*2097*TEL-2-46	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	9915900011104*2098*TEL-2-47	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_201_PYP	9915900011104*2099*TEL-2-48	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_SALUD_OCUPACIONAL	9915900011104*2100*TEL-2-49	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ASESORA JURIDICA	9915900011104*2101*TEL-2-50	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	9915900011104*2102*TEL-2-51	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	9915900011104*2103*TEL-2-52	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		

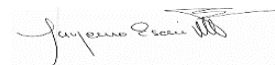

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO


Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_MANTENIMIENTO_HOSPITALARIO_USI_ADMINI	9915900011104*2104*TEL-2-53	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO MEDICO 210 PYP	9915900011104*2105*TEL-2-54	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CALL_CENTER_1_USI_CENTRO	9915900011104*2106*TEL-2-55	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CALL_CENTER_2_USI_CENTRO	9915900011104*2107*TEL-2-56	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CALL_CENTER_4_USI_CENTRO	9915900011104*2108*TEL-2-57	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CALL CENTER 5 CENTRO	9915900011104*2109*TEL-2-58	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CITAS MEDICAS 6 USI CENTRO	9915900011104*2110*TEL-2-59	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CITAS MEDICAS 4 USI CENTRO	9915900011104*2111*TEL-2-60	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CITAS_EDIFICIO PYP	9915900011104*2112*TEL-2-61	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CITAS MODULO_3_USI_CENTRO	9915900011104*2113*TEL-2-62	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CITAS_2_USI_CENTRO	9915900011104*2114*TEL-2-63	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CITAS_1_USI_CENTRO	9915900011104*2115*TEL-2-64	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2116*TEL-2-65	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_VACUNACION_204_PYP	9915900011104*2117*TEL-2-66	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CUARTO FRIO	9915900011104*2118*TEL-2-67	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS_106_USI_CENTRO	9915900011104*2119*TEL-2-68	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_ARCHIVO_DIGITAL_USI_ADMINISTRATIVO	9915900011104*2069*TEL-2-69	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_PSIKOLOGIA CENTRO	9915900011105*2390*TEL-3	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		

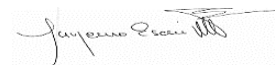

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_COORDINACION SIAU	9915900011105*2401*TEL-3-1	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla
				27	11	2021		
TELEVISOR*L6*UHD	AC_CENTRO AMIGABLE TERCER_PISO_PYP	167001001008001*0592*AC_256	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				27	11	2021		
TELEVISOR*L6*UHD	AC_SALA_ESPERA_TERCER_PISO _PYP	167001001008001*0594*AC_257	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				27	11	2021		
TELEVISOR*L6*UHD	AC_PORTERIA_	167001001008002*0455*AC_234	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				27	11	2021		
TELEVISOR*L6*UHD	AC_SALA_ESPERA_CAMPAMENTO	167001001008003*1136*AC_115	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				27	11	2021		
TELEVISOR*L6*UHD	AC_BARRIO COLOMBIA	167001001008004*0456*AC_338	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				27	11	2021		
TELEVISOR*SONY*55X727E	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	167001001008007*2359*AC_223_1	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				27	11	2021		
VIDEO PROYECTOR*EPSON *PAP 10	AC_COMUNICACIONES_USI_ADMINISTRATIVO	167001001012002*0212*VID-1	SEMESTRAL	26	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y verificar que este en correcto funcionamiento.
				27	11	2021		

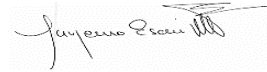

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO



## PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO E.S.E.

Dirección Kra 25 N° 4A - 147 (UBA MAGDALENA)

Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 02/01/2021

Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. \$ 69,728,250.00

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	ULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	167002001001002*0894*COM-1-8	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	167002001001005*0906*COM-1-19	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	167002001001005*0914*COM-1-20	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	167002001001006*0128*COM-1-1	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	167002001001011*0938*COM-1-23	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CITAS_MAGDALENA	167002001001011*0954*COM-1-25	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	ULTORIO_ODONTOLOGIA_106_MAGDALENA	167002001001011*1030*COM-1-27	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_VACUNACION_MAGDALENA	167002001001021*2334*COMP-ESCR-3-7	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		

*Juan Carlos P. ...*

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_FARMACIA_MAGDALENA	167002001001017*1741*COM-ESCR- 2	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	C_SALA_DE_ENERGIA_MAGDALENA	165502001004002*1398*CAM-1-2	SEMESTRAL	4	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				5	11	2021		
IMPRESORA BIXOLON*BIXOLON *SPR-380	AC_CITAS_MAGDALENA	166502001001001*0538*IMP-1	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
IMPRESORA BIXOLON*BIXOLON *SPR-380	AC_CITAS_MAGDALENA	166502001001001*0956*IMP-1-3	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
IMPRESORA*HP*600	AC_CITAS_MAGDALENA	166502001001002*0316*IMP-1	TRIMESTRAL	5	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				4	6	2021		
				3	9	2021		
				5	11	2021		
TELÉFONOS IP G S PHONE*GRANDSTREAM*GXP1610	AC_CITAS_MAGDALENA	9915900011104*2091*TEL-2-40	SEMESTRAL	4	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla LED, los
				5	11	2021		
TELEVISOR*SONY*55X727E	C_CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	167001001008002*0937*TEL-1-1	SEMESTRAL	4	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				5	11	2021		

DIRECTOR/GERENTE

Jayeno Esari MB  
JEFE DE MANTENIMIENTO

**PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA**

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO E.S.E.

Dirección KRA 14 # 16-41 (UBA MONQUIRA) Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 02/01/2021 Vigencia 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. \$ 69,728,250.00

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI	167002001001002*0751*COM-1-6	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQ	167002001001005*0719*COM-1-15	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQ	167002001001005*0978*COM-1-21	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MON	167002001001005*1004*COM-1-23	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_CITAS_MONQUIRA	167002001001021*2330*COMP-ESCR-3-3	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	AC_FARMACIA_MONQUIRA	167002001001017*1742*COM-ESCR-2-1	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	165502001004002*1399*CAM-1-3	SEMESTRAL	11	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				12	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	165502001004003*1418*CAM-1-18	SEMESTRAL	11	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				12	11	2021		

*[Firma manuscrita]*

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
JEFE DE MANTENIMIENTO

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	165502001004003*1419*CAM-1-19	SEMESTRAL	11	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				12	11	2021		
CAMARA DE VIGILANCIA LENTE DE 2.8*DAHUA*2.8	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	165502001004003*1420*CAM-1-20	SEMESTRAL	11	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Ajustar y verificar los contactos eléctricos, los soportes y el enfoque de las cámaras, realizar limpieza externa, limpieza de lentes donde se requiere, efectuar todos los cambios para
				12	11	2021		
COMPUTADOR DE ESCRITORIO*CPU LENOVO*M3598	E_AUXILIAR_ADMON_FACTURACION	167002001001009*0121*COM-1	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza interna, verificación de las conexiones internas y externas, limpieza del monitor, del mouse y del teclado. Realizar eliminación de temporales, cambio de host y optimización del equipo.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
IMPRESORA TERMICA *EPSON*TM-2011	AC_CITAS_MONQUIRA	165590001011003*1739*IMP-1-4	TRIMESTRAL	12	3	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza de polvo en la parte externa y en los cables de alimentación de energía y se verifica que este en correcto funcionamiento.
				11	6	2021		
				10	9	2021		
				12	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_AUXILIAR_ADMON_FACTURACION	9915900011104*2061*TEL-2-11	SEMESTRAL	11	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla LED, los
				12	11	2021		
TELÉFONOS IP 6 S PHONE*GRANDSTREAM*6XP1610	AC_CITAS_MONQUIRA	9915900011104*2090*TEL-2-39	SEMESTRAL	11	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar verificación de la entrada de voltaje, Inspección ocular, se hace limpieza externa del equipo, aspiración y sopleteo en todas sus partes electrónicas, limpiar la pantalla LED, los
				12	11	2021		
TELEVISOR*SONY*55X727E	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	167001001008002*1013*TEL-1-2	SEMESTRAL	11	6	2021	Profesional universitario gestion de recursos informaticos	Realizar limpieza del polvo y suciedad de los respiraderos, limpiar la pantalla, revisar que no este expuesto al agua o humedad excesiva y que el área este bien ventilada.
				12	11	2021		

DIRECTOR/GERENTE

Jefe de Mantenimiento

**PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL**

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE MONQUIRA

Dirección CARRERA 14 # 16 41

Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 31/12/2020

Vigencia 2021

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$ 4,650,000.00

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	166009001020001CAM-1-100967	ANUAL	1-7	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, revision tapizeria y reposicion.
CAMILLA DIVAN	AC_SALA_ERA_113_USI_MONQUIRA	166009001020001CAM-1-110975	ANUAL	1-7	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, <u>revisión tapizeria y reposicion.</u>
CAMILLA DIVAN	AC_VACUNACION_MONQUIRA	166009001020001CAM-1-121044	ANUAL	1-7	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, <u>revisión tapizeria y reposicion.</u>
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_EN_FERMERIA_MONQUIRA	166009001020002CAM-10715	ANUAL	1-7	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, <u>revisión tapizeria y reposicion.</u>
SILLA DE RUEDAS	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	166009001021001SIL-1-30936	ANUAL			2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y ajuste de partes y verificación de aire de llantas
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	166009001024001CAR-1-40714	ANUAL	1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUIRA	166009001024001CAR-1-60750	ANUAL	1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
VITRINA METALICA DE UN CUERPO	AC_CUARTO_DE_RESIDUOS_MONQUIRA	166501001024001VIT-1-150944	ANUAL	1-31	10	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
VITRINA METALICA	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	166501001024002VIT-1-071101	ANUAL	1-31	10	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_SALA_ERA_113_USI_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-070008	ANUAL	1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-130014	ANUAL	1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-140015	ANUAL	1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_EN_FERMERIA_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-150016	ANUAL	1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección

CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-160017	ANUAL	'1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_VACUNACION_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-170018	ANUAL	'1-30	9	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
MESA DE MAYO	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	9915900010201MES-1-060078	ANUAL	'1-31	10	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-170135	ANUAL	'1-31	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-200138	ANUAL	'1-31	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-290147	ANUAL	'1-31	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-300148	ANUAL	'1-31	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-310149	ANUAL	'1-31	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_VACUNACION_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-320150	ANUAL	'1-31	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_SALA_ERA_113_USI_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-330151	ANUAL	'1-31	8	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección

*Diana Carolina Bello*

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

\_\_\_\_\_  
DIANA CAROLINA COY BELLO