

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE UGRA CENTRO

Dirección CARRERA 9 N 11 74 Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 31/12/2021 Vigencia 2022

Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. \$ 215,000,000

CONCEPTO	UBICACIÓN	PERIODICIDAD	FECHA			RESPONSABLES	ACTIVIDADES
			DD	MM	AAAA		
	MEDICINA TERCER PISO PYP	ANUAL	1-4	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo, puerta y ventanas.
	CONSULTORIO 201 ODONTOLOGIA PYP	ANUAL	4-8	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo reparación de <u>humedades en el techo, puerta y ventanas.</u>
	CONSULTORIO 202 ODONTOLOGIA PYP	ANUAL	18-22	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo reparación de humedades en el techo, puerta y ventanas.
	CONSULTORIO 203 MEDICINA PYP	ANUAL	25-29	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo, reparación de humedades en el techo, puerta y ventanas.
	CONSULTORIO 204 SALA DE LACTANCIA PYP	ANUAL	14-18	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo en el techo, puerta y ventanas.
	CONSULTORIO 209 PYP	ANUAL	28-31	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo en el techo, puerta y ventanas.
	CONSULTORIO 108 ODONTOLOGIA	ANUAL	2-6	5	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de <u>humedades en el techo</u>
	CONSULTORIO 109 ODONTOLOGIA	ANUAL	9-13	5	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de <u>humedades en el techo</u>

1. EDIFICIOS

PSICOLOGIA	ANUAL	16-20	5	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
CONSULTORIO 102 MEDICINA	ANUAL	13-17	6	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
CONSULTORIO 103 MEDICINA	ANUAL	11-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
CONSULTORIO 104 ENFERMERIA	ANUAL	25-29	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
CONSULTORIO 105 MEDICINA	ANUAL	1-5	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
CONSULTORIO 106 MEDICINA	ANUAL	8-12	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
FARMACIA	ANUAL	1-7	2	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
LABORATORIO	ANUAL	16-23	5	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
TOMA DE MUESTRAS	ANUAL	24-31	5	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
ADMINISTRATIVO LABORATORIO	ANUAL	21-25	2	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
ESTERILIZACION	ANUAL	21-30	6	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u>
AUDITORIO PRIMER PISO PYP	ANUAL	16-31	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Revisar areas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparacion de <u>humedades en el techo</u> , remplazo de esquineros en mal estado.

2. INSTALACIONES FÍSICAS	VENTANILLA	ANUAL	14-18	2	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
	PORTERIA	ANUAL	24-31	1	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
	ALMACEN	ANUAL	1-5	9	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo , remplazo de esquineros en mal estado.
	RED SANITARIA	ANUAL	28-31	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	CUARTO PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	28-31	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	TERCER PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	11-19	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SEGUNDO PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	1-4	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	PRIMER PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED SANITARIA	ANUAL	9-16	5	2021	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	PRIMER PISO PYP Revisión desagües sanitarios, posetas, lavamanos prueba funcionamiento.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	6-13	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	CUARTO PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	13-21	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	TERCER PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
	RED HIDRÁULICA	ANUAL	13-21	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SEGUNDO PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.

RED HIDRÁULICA	ANUAL	21-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	PRIMER PISO PYP Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
RED HIDRÁULICA	ANUAL	9-16	5	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	PRIMER PISO UGRA Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
RED HIDRÁULICA	ANUAL	17-24	5	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SEGUNDO PISO ADMINISTRATIVO Revisión para detección de escapes, cambio de sistemas de empaques de redes sanitarias (puhs sanitarios y orinales), engrase empaquetadura push y sanitarios.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Enfermería tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Medicina tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Odontología tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Psicología tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Medicina tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 201 odontología pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 202 odontología pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 203 medicina pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 204 sala de lactancia pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.

RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 205 medicina pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 206 medicina pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 207 país cuarto frío pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 208 enfermería pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 209 pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 - 30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 210 pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 101 odontología revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 102 odontología revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 103 higiene oral revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 104 país revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 105 medicina consultorio revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 106 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.

3. SISTEMAS DE REDES

RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 107 enfermería revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 108 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 109 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 110 medicina revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Consultorio 111 nutrición revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Farmacia revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Laboratorio revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Toma de muestras revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Administrativo laboratorio revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Esterilización revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Auditorio primer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Auditorio tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.

RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	3	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillo tercer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillo segundo piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	3	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillos primer piso pyp revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	6	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pasillos primer piso revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Gerencia y sala de juntas revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Calidad revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Programas especiales revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Salud publica revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Talento humano revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Tesorería revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	Pico revisión estado general toma corrientes, lámparas , interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	sala juntas revisión estado general toma corrientes, lámparas , interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.


RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	almacén revisión estado general toma corrientes, lámparas , interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Contratación - facturación revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	01-15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Sistemas revisión estado general toma corrientes, lámparas, interruptores y reposición en caso de encontrar un mal funcionamiento o desgaste.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	transferencia eléctrica, cajas eléctricas, toma corrientes y tacos del edificio pyp, ambulatorio y administrativo. revisión de acometidas eléctricas a tableros de protección, revisión de bornes de fases neutros y tierras, tomas de voltajes de línea y de fase, pruebas de tacos de protección que estén en buen funcionamiento, pruebas de circuitos en conectividad y voltaje, polo a tierra, revisión de voltajes, cambio toma corrientes por deterioro, cambio luminarias.
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30		2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	transformador, revision y limpieza y mantenimiento de fusibles de protección en arranque principal, limpieza de bornes y fusibles tipo hh en disyuntor principal, pruebas de aislamiento y voltaje en transformador tipo pedestal de 112.5 kva, mantenimiento y ajuste de borneras general en disyuntor, transformador y transferencia. revisión y mantenimiento de breaker generales en tablero
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	tablero general subestación: verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	tablero principal edificio administrativo: verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga

RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	tablero de distribución parcial edificio administrativo: (4 tableros primer piso y 4 tableros 2 piso) estos tableros estan dividios por carga en tomacorrientes , alumbrado y red regulada; se debe hacer verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	tablero principal edificio pyp ugra: verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	tablero de distribución parcial edificio administrativo: (3tableros primer piso y 3 tableros 2 piso) estos tableros estan dividios por carga en tomacorrientes , alumbrado y red regulada; se debe hacer verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga
RED ELÉCTRICA	ANUAL	15 -30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	tablero de distribución parcial edificio area de servicios generales y cafeteria se debe hacer verificación de forma física , conexiones y bornes , verificación de puntos calientes , pruebas de continuidad, verificación de voltajes, revisión de puesta a tierra, revisión de encintado y ajuste de accesorios como barraje y tornillos, pruebas de funcionamiento y de carga
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	1-31	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	tercer piso pyp revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	1-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	segundo piso pyp revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	2-31	5	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	primer piso pyp revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas
RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	1-30	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	primer piso odontología revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas

	RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	1-31	7	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	primer piso consultorios revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas
	RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	1-31	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	primer piso farmacia revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas
	RED DE VOZ Y DATOS	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	área administrativa revisión redes voz y datos organización de cableado y revisión y ajuste de canaletas
4. AREAS ADYACENTES	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
			1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
			1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
			1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
			1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
			1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
			1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis físicoquímico.

	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	1-10	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
	LAVADO TANQUES	SEMESTRAL	13-28	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Lavado y desinfección de tanques con análisis fisicoquímico.
	JARDINES	CUATRIMESTRAL	1-15	2	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	poda, deshierbé aplicación fertilizante
	JARDINES	CUATRIMESTRAL	6-21	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	poda, deshierbé aplicación fertilizante
	JARDINES	CUATRIMESTRAL	3-18	10	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	poda, deshierbé aplicación fertilizante
	SALA DE ESPERA 3 PISO PYP	ANUAL	1-10	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisar áreas afectadas por humedad y Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo, remplazo de esquineros. Revisar áreas afectadas por humedad y
5. OTROS	ESCALERAS 2 PISO PYP	ANUAL	11-25	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Realizar el mantenimiento preventivo, pintura y resanes de muros, revisión y reparación de humedades en el techo, remplazo de esquineros en mal estado.

DIRECTOR/GERENTE

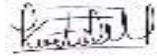

KAREN TATIANA CARDENAS MONTAÑEZ

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E- Monquirá

Dirección Carrera 14 # 16-4 Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 27 de diciembre de 2021 Vigencia 2022

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 97,305,000

Nombre del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBE- HEALTH O METER - MODELO 522KL SERIE N° 5490003537 - BAS-1-6	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0966	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1	AC-163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA (TEMPORAL 14)	0965	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
				01 al 09	9	2022		
TENSIOMETRO - ALPK2 - SERIE N°563933 - TEN-1-095	AC_163 AC_CONSULTORIO_PORCEDIMIENTO_S_MONQUIRA	0306	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazaletes Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

BASCULA DE PISO- HEALTH O METER - S/N:1420052858 - BAS-1-08	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MO NQUIRA (TEMPORAL 14)	0333	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022		
FONENDOSCOPIO - CAMPANA BLANCA - FON-1-15	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MO NQUIRA	0369	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-14	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MO NQUIRA (TEMPORAL 14)	0813	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				01 al 09	9	2022		
NEGATOSCOPIO - IMCOL - NEG-1-4	AC- 163 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MO NQUIRA (TEMPORAL 14)	0913	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos eléctricos
				01 al 09	9	2022		
BASCULA DE PISO - BASC_P-1	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MO NQUIRA		SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos,
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE- HEALTH	AC- 164 -			07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos

OMETER - MODELO 522KL SERIE N° 5490003484 - BAS-1-8	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0977	SEMESTRAL	01 al 09	9	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-12	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0973	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840014 / 000689 - DOP-2-2	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	1926	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de sensores receptor y emisor • Verificación de voltaje y amperaje • Verificación de baterías. • Verificación del sistema visual • Verificación del sistema de alarma y seguridad • Limpieza y desinfección interna y externa • Remplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
PULSIOXIMETRO - CHOICEMED - SERIE N° 102124701716 - PUL-1-1	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0723	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de sensores receptor y emisor • Verificación de voltaje y amperaje • Verificación de baterías. • Verificación del sistema visual • Verificación del sistema de alarma y seguridad • Limpieza y desinfección interna y externa • Remplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de sensores receptor y emisor • Verificación de voltaje y amperaje • Verificación de baterías. • Verificación del sistema visual • Verificación del sistema de alarma y seguridad • Limpieza y desinfección interna y externa • Remplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116144751- TEN-1-068	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0279	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de fugas • Verificación de estado de pera • Verificación del estado de la válvula de alivio • Verificación del estado del manómetro y del brazalete • Prueba de mediciones para verificación • Limpieza y desinfección interna y externa • Remplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de fugas • Verificación de estado de pera • Verificación del estado de la válvula de alivio • Verificación del estado del manómetro y del brazalete • Prueba de mediciones para verificación • Limpieza y desinfección interna y externa • Remplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

INFANTOMETRO- INF-1-17	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0044	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
TALLIMETRO-SECA-213 - TAL-1-2	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	1291	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
TALLIMETRO-KRAMER- TAL-1-14	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	1107	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-21	AC- 164 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MONQUIRA	0820	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				01 al 09	9	2022		
TALLIMETRO - KRAMER - TAL-1-14	AC_163 AC_CONSULTORIO_PORCEDIMIENTO_S_MONQUIRA	1107	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				01 al 09	9	2022		
FONENDOSCOPIO - WELCH ALLYN - NEGRO FON-1	AC_163 AC_CONSULTORIO_PORCEDIMIENTO_S_MONQUIRA	972	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación acústica Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia
				01 al 09	9	2022		
BASCUA DE PISO- SECA 874DR - SN/1000000091871 con cargador - BAS-2-6	AC_163 AC_CONSULTORIO_PORCEDIMIENTO_S_MONQUIRA	1910	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		

				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - BASC_P-3	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CY D_MONQUIRA		SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg)
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-4	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CY D_MONQUIRA	0985	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
				01 al 09	9	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMANN - FON-1-2	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CY D_MONQUIRA	0982	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CY D_MONQUIRA	0788	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - GS-300 - LAM-	AC- 165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CY	1966	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos • Prueba de impedancia y voltajes • Verificación del sistema de intensidad lumínica • Revisión del interruptor on/off

REFLECTIVO - 00-000 - ENF-2-2	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA (TEMPORAL 14)	0200		01 al 09	9	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del interruptor de on/off Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara Lubricación de partes mecánicas Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
TENSIOMETRO PEDIATRICO - HONSUN - SERIE N°104664 - TEN-1-6	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0207	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°SERIE N°121116145812 - TEN-1-024	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0235	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> Prueba de mediciones para verificación
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INFANTOMETRO - MADERA - INF-1-18	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0045	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
TALLIMETRO - KRAMER- TAL-1-24	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	1117	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-16	AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_CYD_MONQUIRA	0815	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante

UNIDAD ODONTOLOGICA - BLUEPHASE - V-920 SERIE Nº A50055 - UNI-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0753	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico
				01 al 09	9	2022		Verificación de accesorios
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NM - S/N 1010011068 - LFC-2-3	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1972	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Prueba de funcionamiento inicial
				01 al 09	9	2022		Verificación de voltaje y amperaje
AMALGAMADOR - MILENIUM - DB-338 SERIE Nº 006001201307A - AMA-1-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1008	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de intensidad de la lámpara
				01 al 09	9	2022		Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón
MICROMOTOR - NSK - SERIE Nº EP291660 - MIC -1-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0998	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de válvulas del sistema
				01 al 09	9	2022		Verificación de succión y desagües
MICROMOTOR - NSK - SERIE Nº EBB33674-PUNTA RECTA- No. OP591721 - MIC -1-4	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1000	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación del sistema de regulación
				01 al 09	9	2022		Verificación de fugas
PIEZA DE MANO - NSK - PANA AIR SERIE NºDBD60087-MBD60519 - PIE-1 -1	CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_	0878	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Lubricación de partes móviles
				01 al 09	9	2022		Verificación de componentes electrónicos y tablero de control


PIEZA DE MANO - KAVO - 650C SERIE N° 2014190521 - PIE-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1305	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
PIEZA DE MANO - NSK - PANA AIR SERIE N° AT2GCA3PK9232-CBC20992-LCB23314 - PIE-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0873	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
CONTRA ANGULO - NSK - EX203C SERIE N° ABB30916 - OBB93705 - CON-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0999	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas
				01 al 09	9	2022		
CONTRA ANGULO - NSK - CONTRA ANGULO :AP590130 (2795) CABEZA:OP291660 - EX203C SERIE N° AP590130-OP591730 - CON-1-1	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1001	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas
				01 al 09	9	2022		
TERMOHIGROMETRO - EQ&MD - S/N:ethmx813 - TER-1-21	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0665	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022		
				07 al 11	3	2022		<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos

TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-17	AC-167 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1806	SEMESTRAL	01 al 09	9	2022	Ingeniera Biomedica	Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO- ALLA FRANCE -4404808- TEHI-28	AC-171 - AC_VACUNACION_MONQUIRA	1817	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL - ALLA FRANCE - 9109 - TEELD-01	AC-171 - AC_VACUNACION_MONQUIRA	1824	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
UNIDAD ODONTOLOGICA - BLUEPHASE - V-920 SERIE N° AS-0046- UNI-1	AC_168 AC_CONSULTORIO_HIGIENE_ORAL_MONQUIRA	0743	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control
				01 al 09	9	2022		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NM - S/N 1010011068 - LFC-2-3	CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_	1972	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de tensión (110v) Verificación de encendido y apagado de bombillo Verificación del ventilador Verificación del sistema visual y del filtro óptico Verificación del estado y funcionamiento de la fibra Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes
				01 al 09	9	2022		

AMALGAMADOR - ULTRAMAC - 2 SDI SERIE N° 101998 - AMA-1-1	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0732	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada • Verificación del funcionamiento del panel frontal
				01 al 09	9	2022		• Revisión porta amalgama • Revisión selector de velocidad • Revisión de partes roscadas y lubricar • Revisión de funcionamiento del motor • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
MICROMOTOR - NSK - EX203C SERIE N° AP590121 - MIC -1	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0745	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento
				01 al 09	9	2022		
CAVITRON SCALER ULTRASONICO - NSK - CAV-1	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGI_109_USI_MONQUI	0744	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de la vibración Verificación de los controles de frecuencias Verificación del control de la refrigeración Verificación de componentes electrónicos y mecánicos Limpieza y desinfección interna y externa
				01 al 09	9	2022		
PIEZA DE MANO -MARCA: NSK ATJ8CW8K6W-CBC40253 - PANA AIR SERIE N°ATJ8CW8K6W-CBC40253 - PIE-1-2	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0379	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
PIEZA DE MANO -MARCA: NSK PANA-AIR SERIE N° DBD50374 -PIE-1-4	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0747	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
CONTRA ANGULO - NSK - CONTRA ANGULO OBF10572-CABEZA: OP291811 - SERIE N° EP291811- CABEZA:OB87847. - CON-1	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	0746	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas
				01 al 09	9	2022		

TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-03	AC-182 - AC_CONSULTORIO_109_ODONTOLOGIA_MONQUIRA	1792	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE- HEALTH O METER - 549KL SERIE N° 5490003556 - BAS-1	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0718	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-06	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0716	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
				01 al 09	9	2022		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN- ML182 SERIE N°81112181003 - TEN-1-032	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	0243	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos

BASCULA DE PISO- HEALTH O METER - S/N:1420052346 - BAS-1-1	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0335	SEMESTRAL	01 al 09	9	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - NEGRO - FON-1-03	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0357	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación acústica Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. Verificación del estado de las olivas
				01 al 09	9	2022		Verificación de estado físico
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQU-1-07	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0785	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías Limpieza de contactos eléctricos Verificación del funcionamiento de las cabezas Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial
				01 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
TALLIMETRO - KRAMER - TAL-1-23	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	1116	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-09	AC- 185 - AC_ CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIR A	0808	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpia con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				01 al 09	9	2022		

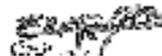

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución	Salud Sogamoso E.S.E- Magdalena
Dirección	cra 25 # 4a -147
Fecha de Elaboración	27 de diciembre de 2021
Municipio	Sogamoso
Vigencia	2022
Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico.	\$ 97,305,000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - MODELO 522KL SERIE N° 5490002756 - BAS -1-4	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0900	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-05	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0387	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°- N°121116161331 TEN-1-061	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	0272	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de fugas • Verificación de estado de pera • Verificación del estado de la válvula de alivio • Verificación del estado del manómetro y del brazalete • Prueba de mediciones para verificación • Limpieza y desinfección interna y externa • Remplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - HEALTH	AC-151 -			21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)

O METRO - MODELO 522KL SERIE N° - 599T00313 - BAS -1-01	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	0326	SEMESTRAL	22 al 26	8	2022		<ul style="list-style-type: none"> Verificación del ajuste de posición cero Verificación de repetibilidad cero Verificación de la batería (pilas o cargador) Limpieza y desinfección interna y externa Ajuste del sistema Prueba de funcionamiento Final 	
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1-11	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	0365	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación acústica Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. Verificación del estado de las olivas Verificación del estado de los tubos auditivos Prueba de repetibilidad de resultados Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final 	
				22 al 26	8	2022			
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-11	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0810	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpieza con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante 	
				22 al 26	8	2022			
BASCULA PESA BEBES - HEALTH O METER - MODELO 522KL SERIE N° 5490003518 - BAS -1-5	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	0910	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) Verificación del ajuste de posición cero Verificación de repetibilidad cero Verificación de la batería (pilas o cargador) Limpieza y desinfección interna y externa Ajuste del sistema Prueba de funcionamiento Final 	
				22 al 26	8	2022			
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI- 1-09	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	0909	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías Limpieza de contactos eléctricos Verificación del funcionamiento de las cabezas Revisión del regulador de intensidad Revisión del bombillo 	
				22 al 26	8	2022			
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1-1	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	0419	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación acústica Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. Verificación del estado de las olivas Verificación del estado de los tubos auditivos Prueba de repetibilidad de resultados Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final 	
				22 al 26	8	2022			

DOPPLER FETAL - HUNTELEIGH - D920-D920 SERIE N° CE 0088 - DOP-1	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	0077	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes
				22 al 26	8	2022		
PULSIOXIMETRO - HUNTELEIGH - SERIE N° 750AX0104669-14 - PUL-1	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	1230	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de sensores receptor y emisor Verificación de voltaje y amperaje Verificación de baterías. Verificación del sistema visual Verificación del sistema de alarma y seguridad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-13	AC-152 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MA GDALENA	0812	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				22 al 26	8	2022		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - 101997 - AMA-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _105_MA GDALENA	0574	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada Verificación del funcionamiento del panel frontal Revisión porta amalgama Revisión selector de velocidad Revisión de partes roscadas y lubricar Revisión de funcionamiento del motor Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
				22 al 26	8	2022		
LAMPARA DE FOTOCURADO - BLUEPHASE - LAM-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _105_MA GDALENA	0754	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico • Verificación del estado y funcionamiento de la fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
LAMPARA DE FOTOCURADO -	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO	0728	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de tensión (110v) Verificación de encendido y apagado de bombillo Verificación del ventilador Verificación del sistema visual y del filtro óptico

SUNLITE -118003	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _106_MAGDALENA	0720	SEMESTRAL	22 al 26	8	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación del sistema visual y del filtro óptico Verificación del estado y funcionamiento de la fibra Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
PIEZA DE MANO 650C - KAVO - 2014190594	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _106_MAGDALENA	1309	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación del eje del micromotor Verificación de las turbinas Verificación de rodamientos Verificación de las aspas Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
UNIDAD ODONTOLOGICA	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _106_MAGDALENA	0870	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión
				22 al 26	8	2022		
INSERTO CAVITRON - DENTS PLAY - 2014100588	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _106_MAGDALENA	1300	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de la vibración Verificación de los controles de frecuencias Verificación del control de la refrigeración Verificación de componentes electrónicos y mecánicos Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
MICROMOTOR KV00005 / CONTRANGULO KV00007 / MICROMOTOR 2014136671 / CONTRANGULO 2014139492	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _106_MAGDALENA	1303 1293	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación del eje del micromotor Verificación de rodamientos Verificación de las aspas Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display

TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-09	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _106_MA6DALENA	1798	SEMESTRAL	22 al 26	8	2022	EMPRESA CONTRATADA	Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

AMALGAMADOR - MILENIUM OB-338 SERIE N° 006001201306A - AMA-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _105_MAGDALENA	0887	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada Verificación del funcionamiento del panel frontal Revisión porta amalgama Revisión selector de velocidad Revisión de partes roscadas y lubricar Revisión de funcionamiento del motor Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
MICROMOTOR - NSK - EX203C SERIE N° AP590128- MIC -1-3	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _105_MAGDALENA	1121	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de turbina. Lubricación de partes mecánicas Verificación de eje de micromotor Prueba de funcionamiento
				22 al 26	8	2022		
MICROMOTOR - KV00005 - 500 SERIE N° 2014136670 - MIC-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _105_MAGDALENA	1302	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de turbina. Lubricación de partes mecánicas Verificación de eje de micromotor Prueba de funcionamiento
				22 al 26	8	2022		
PIEZA DE MANO - NSK - PANA AIR SERIE N° C2615558 - PIE-1	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _105_MAGDALENA	0884	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación de las turbinas Verificación de rodamientos Verificación de las aspas Limpieza y desinfección interna y externa Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
CONTRA ANGULO - KV00007 - 500 SERIE N° 2014139495 - CON-1-2	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO _105_MAGDALENA	1295	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación de las turbinas Verificación de rodamientos Verificación de las aspas Limpieza y desinfección interna y externa
				22 al 26	8	2022		
				21 al 25	2	2022		<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios


CONIRA ANGULO - CONIRA ANGULO EP291658 (2916) - CABEZA OP291658 (2917) - SERIE N° EP291658 - OP291658 - CON-1-4	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	1122	SEMESTRAL	22 al 26	8	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación de las turbinas Verificación de rodamientos Verificación de las espas Limpieza y desinfección interna y externa
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-02	AC-153 - AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_105_MAGDALENA	1791	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - MODELO 549KL SERIE N° 5490003550 - BAS-1-2	AC-155 - AC_CONSULTORIO_CVD_MAGDALENA	0926	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874 SERIE N° 5874071151329 - BAS-1-5	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	1288	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg)
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-11	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	0924	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				22 al 26	8	2022		

FONENDOSCOPIO - LITTMAN - N-60 - FON-1	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0925	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
LAMPARA CUELLO DE CISNE - LAM-1-12	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0103	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos • Prueba de impedancia y voltajes • Verificación del sistema de intensidad lumínica • Revisión del interruptor on/off • Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara • Lubricación de partes mecánicas • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
TENSIOMETRO PEDIATRICO HONSUN - S/N:102769 - TEN- 1-4	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0205	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN- SERIE Nº121116144752 - TEN-1-069	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA GDALENA	0280	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN - FON-1-16	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MA GDALENA	1778	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		

MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-12	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	0811	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				22 al 26	8	2022		
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE 1000000091677 - BAS-2-3	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	1907	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) Verificación del ajuste de posición cero Verificación de repetibilidad cero Verificación de la batería (pilas o cargador) Limpieza y desinfección interna y externa Ajuste del sistema
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-12	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	0417	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías Limpieza de contactos eléctricos Verificación del funcionamiento de las cabezas Revisión del regulador de intensidad
				22 al 26	8	2022		
TENSIOMETRO PEDIATRICO WELCH ALLYN - SERIE 170831133527 - TEN-2-07	AC-151 - AC_CONSULTORIO_101_MAGDALENA	1861	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116164542 - TEN-1-060	AC-151 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	0271	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
DOPPLER FETAL - HUNTLEIGH - FDIPX0350257-11 - DOP-1-2	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	0923	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Revisión de componentes electrónicos y eléctricos Prueba de impedancia y voltajes Prueba crítica del transductor
				22 al 26	8	2022		

BASCULA PESA BEBE- HEALTH O METER - 549KL SERIE N° 5490003092 - BAS-1 1	AC-165 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA 6DALENA	0988	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				22 al 26	8	2022		
				11 al 29	4	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-20	AC-156 - AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MA 6DALENA	0819	SEMESTRAL	21 al 25	2	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y
				22 al 26	8	2022		

DIRECTOR/GERENTE

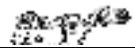

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución Salud Sogamoso E.S.E- Centro

Dirección Calle 9 # 11-74 Municipio Sogamoso

Fecha de Elaboración 27 de diciembre de 2021 Vigencia 2022

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomédico. \$ 97,305,000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
AGITADOR BASCULANTE BOECO - RS44 - AGI-2	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1995	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión y prueba del sistema eléctrico • Revisión y prueba del sistema Mecánico • Revisión y prueba de los controles • Verificación de la superficie alineada • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
AGITADOR DE MAZZINE - INDULAB - TAO9 - AGI-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0636	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión y prueba del sistema eléctrico • Revisión y prueba del sistema Mecánico • Revisión y prueba de los controles • Verificación de la superficie alineada • Lubricación de partes mecánicas • Verificación de alineación del plato • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 139283 - AMA-2	AC-262 - AC_ODONTOLOGIA_108_CENTRO	1980	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada • Verificación del funcionamiento del panel frontal • Revisión porta amalgama • Revisión selector de velocidad • Revisión de partes roscadas y lubricar • Revisión de funcionamiento del motor • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 139282 - AMA-2-1	AC-263 - AC_ODONTOLOGIA_109_CENTRO	1981	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada • Verificación del funcionamiento del panel frontal • Revisión porta amalgama • Revisión selector de velocidad • Revisión de partes roscadas y lubricar • Revisión de funcionamiento del motor • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		

AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 139313 - AMA-2-2	AC-237 - AC_ODONTOLOGIA_201_PYP	1982	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada • Verificación del funcionamiento del panel frontal • Revisión porta amalgama • Revisión selector de velocidad • Revisión de partes roscadas y lubricar • Revisión de funcionamiento del motor • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		Verificación de estado físico
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 - SERIE 139315 - AMA-2-4	AC-238 - AC_ODONTOLOGIA_202_PYP	1984	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada • Verificación del funcionamiento del panel frontal • Revisión porta amalgama • Revisión selector de velocidad • Revisión de partes roscadas y lubricar • Revisión de funcionamiento del motor • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA- ABACUS -5 - ANH-2	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1996	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				07 al 11	11	2022		
ANALIZADOR DE ORINA- URIT-500C - ANA-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1342	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				07 al 11	11	2022		
BAÑO SEROLOGICO - MEMMERT - 2200 SERIE N° L294.0852 - BAÑ-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0638	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación tensión • Verificación interruptor de on/off • Verificación de funcionamiento de la cabina • Verificación del funcionamiento de la resistencia • Verificación del sensor de temperatura y timer • Lubricación de partes móviles • Verificación del sistema de alarmas de temperatura • Verificación de la rejilla de difusión térmica • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual
				14 al 18	3	2022		• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual

BASCULA DE PISO - SECA - 813 - SERIE N° 8813128142395 BAS- 1-5	AC-254 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	1273	SEMESTRAL	12 al 16	9	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°1000000091654 - BAS- 2-8	AC-239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1912	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual
				05 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°5874071151329 - BAS-1-1	AC_248 AC_CONSULTORIO_MEDICO_ASINTI MAT	1281	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual
				19 al 123	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
				18 al 22	7	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual

BASCULA DE PISO - SECA - BASC_P-2	AC-337 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_304_PYP	2457	SEMESTRAL	01 al 09	12	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - HEALTH O METER - SERIE N°1600005823 - BAS-1-13	AC-334 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_206_PYP	0338	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual
				05 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°5874071151330 - BAS-1-3	AC-176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1284	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual
				08 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos

BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N°5874159126552 - BAS-1-4	AC-253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	1283	SEMESTRAL	26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DE PISO - SECA - 874DR - BAS-1-7	AC-252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1285	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091875 - BAS-2	AC-181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	1904	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO -				04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg,

SECA - 874DR - SERIE N° 100000009167 - BAS-2-1	AC-205 - AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	1905	SEMESTRAL	03 al 07	10	2022		<ul style="list-style-type: none"> 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091665 - BAS-2-2	AC-180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI _CENTRO	1906	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 18	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091844 - BAS-2-4	AC-179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI _CENTRO	1908	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				14 al 18	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos

BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091848 - BAS-2-5	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	1909	SEMESTRAL	01 al 09	12	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) Verificación del ajuste de posición cero Verificación de repetibilidad cero Verificación de la batería (pilas o cargador) Limpieza y desinfección interna y externa Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091857 - BAS-2-7	AC-243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	1911	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual
				05 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) Verificación del ajuste de posición cero Verificación de repetibilidad cero Verificación de la batería (pilas o cargador) Limpieza y desinfección interna y externa Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA DIGITAL DE PISO - SECA - 874DR - SERIE N° 1000000091858 - BAS-2-9	AC-327 - AC_CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	1913	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual
				08 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) Verificación del ajuste de posición cero Verificación de repetibilidad cero Verificación de la batería (pilas o cargador) Limpieza y desinfección interna y externa Ajuste del sistema
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 15	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos Verificación de botones Verificación del sistema visual Lubricación de componentes mecánicos Verificación de pesos con masas patrón (5kg,

BASCULA DIGITAL DE PISO - BAS-1	AC_VISITAS DOMICILIARIAS	1257	SEMESTRAL	01 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - SERIE N° 5490003495 - BAS-1-1	AC-180 _AC_ CONSULTORIO_ MEDICO_103_ USI_ CENTRO	0353	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				11 al 18	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - SECA - 374 - BPB-2	AC-176 - _AC_ CONSULTORIO_ CYD_ 1 CENTRO	1914	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				08 al 11	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg,

BASCULA PESA BEBE - SECA - 374 - SERIE N° 5374310171727 BPB-2-1	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	1915	SEMESTRAL	01 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - SECA - 374 - SERIE N° 5374113179654 BPB-2-2	AC-179 _AC_ CONSULTORIO_ MEDICO_ 102_USI _CENTRO	1916	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5220001166- BAS-1-1	AC-181 _AC_ CONSULTORIO_ MEDICO_ 101_USI_CENTRO	0501	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBÉ - HEALTH O METER - 522KL	AC_245 AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP	0700	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones
				05 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

INFANTOMETRO - MADERA - INF-1-10	AC_245 AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP	0037	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				05 al 09	9	2022		Remplazo de componentes
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002926 BAS-1- 2	AC-239 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_203_PYP	0692	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				05 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002463 _BAS-1- 1	AC-249 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_209_PYP	0534	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				12 al 16	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INFANTOMETRO - MADERA - INF -1-04	AC-255 - AC_CONSULTORIO_NUTRICION _106	0031	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo.
				03 al 07	10	2022		Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
PULSIOXIMETRO	AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106		SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de sensores receptor y emisor Verificación de voltaje y amperaje Verificación de baterías. Verificación del sistema visual
				03 al 07	10	2022		

TALLIMETRO - SECA - TAL 1-1	AC-255 - AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	1290	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				03 al 07	10	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías Limpieza de contactos eléctricos Verificación del funcionamiento de las cabezas
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN -13010 - EQU-1	AC-255 - AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	0696	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías Limpieza de contactos eléctricos Verificación del funcionamiento de las cabezas
				03 al 07	10	2022		• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE Nº 5490002938 - BAS-1- 2	AC-255_AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106	0478	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				03 al 07	10	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - 170831133857 - TEN-1 077	AC-255_AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106	0288	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del
				03 al 07	10	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - 170831133857 TEN-2-09	AC-255_AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106	1862	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del
				03 al 07	10	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1	AC-255_AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106	1225	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas
				03 al 07	10	2022		

<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5220001017 - BAS-1-2</p>	<p>AC-255_AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106</p>	<p>0517</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>04 al 08</p>	<p>4</p>	<p>2022</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				<p>03 al 07</p>	<p>10</p>	<p>2022</p>		
				<p>11 al 29</p>	<p>4</p>	<p>2022</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>
<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490003517 - BAS-1-3</p>	<p>AC-253_AC_CONSULTORIO_ MEDICO_302_PYP</p>	<p>0569</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>22 al 25</p>	<p>3</p>	<p>2022</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				<p>26 al 30</p>	<p>9</p>	<p>2022</p>		
				<p>11 al 29</p>	<p>4</p>	<p>2022</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>
<p>BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002407 - BAS-1-7</p>	<p>AC-317_AC_SALA_ERA_CENTRO</p>	<p>0784</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>13 al 17</p>	<p>6</p>	<p>2022</p>	<p>Ingeniera Biomedica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				<p>01 al 09</p>	<p>12</p>	<p>2022</p>		
				<p>11 al 29</p>	<p>4</p>	<p>2022</p>	<p>EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION</p>	<p>Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.</p>

BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5220000754 - BAS-1	AC-334_AC_CONSULTORIO _ MEDICO _ 206 _ PYP	0468	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				05 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - HEALTH O METER - 522KL - SERIE N° 5490002943 - BAS-1-1	AC-337_AC_CONSULTORIO _ MEDICO _ 304 _ PYP	0559	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
BASCULA PESA BEBE - KEX GERMANY - BS015 - PES-1	AC_CONSULTORIO_ASINTOMATICO	0483	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema
				19 al 123	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS - CLAY ADAMS - DINAC III - CEN-2	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1997	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de corrientes de fuga • Verificación e inspección del rotor • Verificación del mecanismo de acople y ajuste del rotor • Verificación e inspección de los cepillos del motor • Verificación del estado de seguridad de la tapa • Verificación de los botones • Verificación del sistema visual • Verificación de la velocidad de rotación • Verificación del sistema de freno • Limpieza y desinfección del rotor, los protectores, adaptadores y tubos • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Remplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
CONTRA ANGULO - KV00007 - 500 - SERIE N° 2014139493 - CON-1-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 110_CENTRO	1294	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas
				01 al 09	12	2022		
CONTRA ANGULO - KV00007 - 500 - SERIE N° LO EBB336753 CON-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 110_CENTRO	0734	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas
				01 al 09	12	2022		
DESFIBRILADOR INTELIGENTE - CU MEDICAL NF-1200 SERIE N° P1M46L0155 - DES-1	AC_184- AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0074	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de perillas selectoras, paletas, interfaces • Revisión y prueba del sistema eléctrico cable de alimentación, conector, porta fusible, conexión a tierra y demás componentes • Revisión y prueba de la batería y el indicador de carga • Verificación de alarmas
				08 al 11	11	2022		
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION

DOPPLER FETAL - HUNTELEIGH - D920- DOP-1	AC_248 AC_CONSULTORIO_MEDICO_ASINTI MAT	0368	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
				19 al 123	9	2022		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIE DE EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840010 / 00466- DOP-2	AC_255 AC_CONSULTORIO_ NUTRICION_106	1924	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
				03 al 07	10	2022		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840012 / 000472 - DOP-2-1	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI _CENTRO	1925	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
				14 al 18	11	2022		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840017 / 000613 - DOP-2-4	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1928	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
				01 al 09	12	2022		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840019 / 000630 - DOP-2-6	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1930	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
				26 al 30	9	2022		
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840024 / 000509 - DOP-2-7	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	1931	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
				12 al 16	9	2022		

DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840027 / 000313- DOP-2-8	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1927	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos
				05 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas
DOPPLER FETAL - EDAN - SERIAL EQUIPO / BATERIA 560054 - M17A00840029 / 000615 - DOP-2-9	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	1933	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y eléctricos
				14 al 18	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de impedancia y voltajes • Prueba acústica del transductor • Revisión del selector de volumen • Verificación de la pantalla y teclas • Lubricación de partes mecánicas
ELECTROCARDIOGRAFO - EDAN - SE-3 - Nº SERIE 309025-M12500970019 - ELE-1	AC-184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0722	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de funcionamiento inicial • Limpieza de la unidad central y cable del paciente • Limpieza de los electrodos • Limpieza del cabezal de impresión • Verificación de la tensión de red (110v) • Verificación de la capacidad actual de la batería • Revisión del equipamiento y los accesorios mecánicos, eléctricos y electrónicos • Verificación del fusible para comprobar el cumplimiento de corriente nominal y romper características. • Revisión de las funciones del dispositivo como se describen en las instrucciones de uso. • Revisión de la protección de la resistencia a tierra de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite 0,2ohm. • Revisión de la fuga a tierra actual de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite Control numérico 500µA, SFC 1000µA. • Revisión de la fuga actual del paciente de acuerdo con IEC 601-1/1988: Límite: 10µA (CF). • Revisión del cable del paciente incluyendo el cable principal y los cables de derivación, mida conductividad • Verificación de la configuración del sistema • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQUI-03	AC-337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0385	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías • Limpieza de contactos eléctricos

				01 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQUI-1-07	AC-253 - AC_CONSULTORIO MEDICO 302 PYP	0409	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1	AC-239 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_ 203_PYP	0475	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				05 al 09	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-02	AC-249 _ AC_ CONSULTORIO_ MEDICO_ 209_PYP	0535	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				12 al 16	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-03	AC-252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0558	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-04	AC-253 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0568	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-1	AC-327 - AC_CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	0461	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				08 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI	1876	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías

EQUI-2	_CENTRO			01 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> Baterías • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Verificación de estado físico
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-1	AC-176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1877	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				08 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Revisión del bombillo
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-2	AC-180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	1878	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				11 al 18	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-3	AC-181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	1879	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				14 al 18	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - POCRET LED - EQUI-2-5	AC-179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	1881	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				14 al 18	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQUI-1-3	AC_248 AC_CONSULTORIO_MEDICO_ASINTI_MAT	0776	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías
				19 al 23	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de contactos eléctricos • Verificación del funcionamiento de las cabezas • Revisión del regulador de intensidad • Prueba de funcionamiento inicial
CENTRIFUGA DIGITAL 24 TUBOS - INDULAB - 04- ESPECIAL - CEN-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	2452	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de corrientes de fuga • Verificación e inspección del rotor • Verificación del mecanismo de acople y ajuste del rotor
				07 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación e inspección de los cepillos del motor • Verificación del estado de seguridad de la tapa • Verificación de los botones • Verificación del sistema visual • Verificación de la velocidad de rotación • Verificación del sistema de freno

EQUIPO DE QUIMICA A15-BIOSYSTEM - A15 - SERIE N° 831051480 - EQUI-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0654	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				07 al 11	11	2022		
EQUIPO HUMACOUNT PARA HEMATOLOGIA- HUMACOUNT - HUMAN - EQUI-1	AC-177 - AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0637	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Contratista / Ingeniera Biomedica	De acuerdo a protocolo del proveedor. Equipo intervenido por la casa matriz.
				07 al 11	11	2022		
FONENDOSCOPIO - ALPK2 - FON-1	AC-337 - AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0376	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
FONENDOSCOPIO - GRIS - FON-1-05	AC-184 - AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0359	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		
FONENDOSCOPIO - HOUSON - FON-1-09	AC-317_AC_SALA_ERA_ CENTRO	0363	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN	AC-239_AC_CONSULTORIO_	0476	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.

FON-1	MEDICO_203_PYP	0379		05 al 09	9	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2	AC-327 - AC_CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	1869	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2-1	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI_CENTRO	1870	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2-2	AC-180 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI_CENTRO	1871	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 18	11	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-2-3	AC-179 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI_CENTRO	1872	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III- FON-1-2	AC-181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	0352	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas

VINOTINTO - FON-1-02	_CENTRO			14 al 18	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
FONENDOSCOPIO - LITTMAN CLASSIC C III - FON-2-5	AC-176 - AC_CONSULTORIO_CVD_1_CENTRO	1874	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				08 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
FONENDOSCOPIO - LITTMAN FON-1	AC_248 AC_CONSULTORIO_MEDICO_ASINTI MAT	0518	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				19 al 123	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
FONENDOSCOPIO - LITTMAN FON-1	AC-249 _ AC_CONSULTORIO_ MEDICO_209_PYP	0381	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				12 al 16	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
FONENDOSCOPIO - LITTMAN FON-1-1	AC-252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0562	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.
				26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
FONENDOSCOPIO - LITTMAN FON-1-2	AC-253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0570	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia.

				26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa
FONENDOSCOPIO - LITTMAN FON-1-4	AC-334_AC_CONSULTORIO _ MEDICO _ 206 _ PYP	0770	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				05 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
INSERTO DE CAVITRON 25 K-DENTSPLAY - M040234 SERIE N°2014100593 - INS - 1 - 5	AC_238-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_202_PYP	1299	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo • Prueba de voltaje y amperaje • Limpieza de conductos de presión • Verificación de componentes electrónicos • Limpieza interna y externa del equipo • Prueba de funcionamiento
				01 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo • Prueba de voltaje y amperaje • Limpieza de conductos de presión • Verificación de componentes electrónicos • Limpieza interna y externa del equipo • Prueba de funcionamiento
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - GS-300 - LAM-2	AC_327 - CONSULTORIO _ ROSA _ CENTRO	1964	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos • Prueba de impedancia y voltajes • Verificación del sistema de intensidad lumínica • Revisión del interruptor on/off • Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara • Lubricación de partes mecánicas • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos • Prueba de impedancia y voltajes • Verificación del sistema de intensidad lumínica • Revisión del interruptor on/off • Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara • Lubricación de partes mecánicas • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - GS-300 - LAM-2-1	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1965	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos • Prueba de impedancia y voltajes • Verificación del sistema de intensidad lumínica • Revisión del interruptor on/off • Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara • Lubricación de partes mecánicas • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				26 al 30	9	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos • Prueba de impedancia y voltajes • Verificación del sistema de intensidad lumínica • Revisión del interruptor on/off • Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara • Lubricación de partes mecánicas • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final

LAMPARA CUELLO DE CISNE - WELCH ALLYN - GS-300 - LAM-2-3	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1967	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Revisión de componentes electrónicos y mecánicos • Prueba de impedancia y voltajes • Verificación del sistema de intensidad lumínica • Revisión del interruptor on/off • Verificación posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara • Lubricación de partes mecánicas • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
AMALGAMADOR - ULTRAMAT 2 -101998 -AMA1-1	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	0732	SEMESTRAL	01 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada Verificación del funcionamiento del panel frontal Revisión porta amalgama Revisión selector de velocidad Revisión de partes roscadas y lubricar Revisión de funcionamiento del motor Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				03 al 07	10	2022		
PIEZA DE MANO - 650C- NSK- PANA AIR -C2615558	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP		SEMESTRAL	01 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación del eje del micromotor Verificación de las turbinas Verificación de rodamientos Verificación de las aspas Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				03 al 07	10	2022		
LAMPARA DE FOTOCURADO -	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_	0754	SEMESTRAL	01 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico • Verificación del estado y funcionamiento de la

LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011063 - LFC-2-5	303_PYP				03 al 07	10	2022		<ul style="list-style-type: none"> fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011063 - LFC-2-5	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 202_PYP	1974	SEMESTRAL		18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico • Verificación del estado y funcionamiento de la fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
					01 al 09	12	2022		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011064 - LFC-2	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 09 - CENTRO	1969	SEMESTRAL		18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico • Verificación del estado y funcionamiento de la fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
					01 al 09	12	2022		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011075 - LFC-2-1	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 08 - CENTRO	1970	SEMESTRAL		18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico • Verificación del estado y funcionamiento de la fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
					01 al 09	12	2022		
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011075 - LFC-2-1	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_2	1971	SEMESTRAL		18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico

VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011067 - LFC-2-2	01_PYP			01 al 09	12	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del estado y funcionamiento de la fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
LAMPARA DE FOTOCURADO - VIVADENT-BLUEPH ASE NAM S/N 1010011062- LFC-2-4	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 110_CENTRO	1973	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de tensión (110v) • Verificación de encendido y apagado de bombillo • Verificación del ventilador • Verificación del sistema visual y del filtro óptico • Verificación del estado y funcionamiento de la fibra • Limpieza y desinfección interna y externa • Reemplazo de componentes • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-03	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	0802	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				05 al 09	12	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-04	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0803	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				12 al 16	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-05	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0804	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				26 al 30	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-07	AC_255- AC_CONSULTORIO_NUTRICION_106	0800	SEMESTRAL	04 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				03 al 07	10	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-08	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0807	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				01 al 09	12	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - MAR-1-23	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0822	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				26 al 30	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CYD_CENTRO	1882	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo • Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				08 al 11	11	2022		

MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-2	AC_248 AC_CONSULTORIO_MEDICO_ASINTI MAT	1884	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				19 al 123	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-3	AC_180- AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI _CENTRO	1885	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				11 al 18	11	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-4	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	1886	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				14 al 18	11	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-5	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI _CENTRO	1887	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				01 al 09	12	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-6	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI _CENTRO	1888	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				14 al 18	11	2022		
TALLIMETRO - SECA- TAL-1	AC-239 _AC_CONSULTORIO_ MEDICO_203_PYP	1289	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpeza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo
				05 al 09	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-7	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	1889	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				05 al 09	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - BUCK - MAR-2-8	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP		SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				05 al 09	9	2022		
MARTILLO DE REFLEJOS - LORD - MAR-1-01	AC_327 - CONSULTORIO _ ROSA _ CENTRO	0800	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo Martillo exclusivo para puntos de reflejos y estimulante
				08 al 11	11	2022		
MICROMOTOR -NSK -CABEZA OBJX0842 / CONTRANGULO EP291658 / MICROMOTOR AP590128	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 303_PYP		SEMESTRAL	01 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación del eje del micromotor Verificación de rodamientos
				03 al 07	10	2022		
MICROMOTOR - KV00005 - 500 SERIE N° 2014136671 - MIC-1-1	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 303_PYP	1303	SEMESTRAL	01 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de turbina. Lubricación de partes mecánicas Verificación de eje de micromotor Prueba de funcionamiento
				03 al 07	10	2022		

MICROMOTOR - KV00005 - 500 SERIE N° 2014136672 - MIC-1-2	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	1304	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento
				01 al 09	12	2022		
MICROMOTOR MARCA LYNX L40808105 (2723) CONTRAANGULO EBZ01313 (2721) CABEZA C31121061 (2724) - MIC - 1-4	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	1169	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento
				01 al 09	12	2022		
MICROMOTOR-MARCA NSK- EX-203C -SERIAL: ABB30924 (2787) CONTRANGULO (AF 2789) SERIAL EBB33676/ 0197 MARCA : NSK (2789) CABEZA SERIAL: OBF10574 MIC - 1-4	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO	0758	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento
				01 al 09	12	2022		
MICROMOTOR - NSK - MIC-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	0733	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de turbina. • Lubricación de partes mecánicas • Verificación de eje de micromotor • Prueba de funcionamiento
				01 al 09	12	2022		
MICRONEBULIZADOR - AMERICAN BATEX - MOD 3231 SERIE N° 811021956 - MIC-1-1	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0987	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del sistema eléctrico • Revisión sistema mecánico generador de presión • Revisión y ajuste de válvulas admisión y escape • Revisión de culata y empaque • Verificación y revisión de filtros • Prueba de presión y flujo • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
MICRONEBULIZADOR - THOMAS- SERIE N° 91000028443 - MIC-1	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0047	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del sistema eléctrico • Revisión sistema mecánico generador de presión • Revisión y ajuste de válvulas admisión y escape • Revisión de culata y empaque • Verificación y revisión de filtros • Prueba de presión y flujo • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
MICROSCOPIO - OLYMPUS -	AC 177-		SEMESTRAL	02 al 06	5	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de la tensión (110v) • Limpieza de oculares y objetivos con papel • Verificación del regulador de intensidad • Verificación del sistema óptico • Verificación de los movimientos macrométricos

CXZIFS1 SERIE N° 9582270 - MIC -1	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0678		07 al 11	11	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> micrométricos • Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente • Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque. • Verificación del diafragma • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
MICROSCOPIO BINOCULAR-OLYMPUS - CH-2- MIC -1	AC_177-AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0651	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de la tensión (110v) • Limpieza de oculares y objetivos con papel • Verificación del regulador de intensidad • Verificación del sistema óptico • Verificación de los movimientos macrometricos y micrométricos
				07 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente • Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque. • Verificación del diafragma • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
MICROSCOPIO BINOCULAR-OLYMPUS - CX 21 - MIC -1 - 1	AC_177-AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0652	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de la tensión (110v) • Limpieza de oculares y objetivos con papel • Verificación del regulador de intensidad • Verificación del sistema óptico • Verificación de los movimientos macrometricos y micrométricos
				07 al 11	11	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente • Prueba del ajuste del mecanismo de enfoque. • Verificación del diafragma • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2	AC_263-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	1990	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2-1	AC_262-AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO	1991	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos

				01 al 09	12	2022		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de documentos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2-2	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_2 01_PYP	1992	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
MICROMOTOR * PIEZA DE MANO *2 CONTRA ANGULO (RECTO-TIPO V) - MIC-2-3	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_202_PYP	1193	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
NEBULIZADOR - BONTEX - ALPHA NEB SERIE N° 0811021954 - NEB-1-1	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0915	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del sistema eléctrico • Revisión sistema mecánico generador de presión • Revisión y ajuste de válvulas admisión y escape • Revisión de culata y empaque • Verificación y revisión de filtros • Prueba de presión y flujo • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
INFANTOMETRO-MADERA- INF-1-07	AC-243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	0034	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios
				05 al 09	9	2022		
TALLIMETRO - SECA- TAL-3	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	2045	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				05 al 09	9	2022		
BASCULA PESA BEBÉ - HEALTH O METER -522KL- 5220001166- BAS-1	AC_243 - AC_CONSULTORIO_207_PYP	0463	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos • Verificación de botones • Verificación del sistema visual • Lubricación de componentes mecánicos • Verificación de pesos con masas patrón (5kg, 10kg y 20 kg) • Verificación del ajuste de posición cero • Verificación de repetibilidad cero • Verificación de la batería (pilas o cargador) • Limpieza y desinfección interna y externa • Ajuste del sistema • Prueba de funcionamiento Final
				05 al 09	9	2022		
PIANO CUENTA CELULAS -	AC_177-	0744	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante

DOS TECLAS - PIA - 1	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO			07 al 11	11	2022	Ingeniera Biomedica	o corrosivo
PIANO CUENTA CELULAS - OCHO TECLAS - PIA - 1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0645	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo
				07 al 11	11	2022		
PIEZA DE MANO - NSK - PANA AIR SERIE N° DBD60086-AT3A4B42W386H - PIE-1	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 09 - CENTRO	1009	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
PIEZA DE MANO - NSK - PANA AIR SERIE N° PANA AIR SERIE N° OBGZ0759	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 08 - CENTRO		SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
PIEZA DE MANO - NSK - PANA AIR SERIE N° ATPX6B438-CBC11620 - PIE-1-1	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 08 - CENTRO	0378	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Lubricación de partes mecánicas • Verificación del motor eléctrico • Verificación de las turbinas • Verificación de rodamientos • Verificación de las aspas • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
PIPETA - BOECO - 5-50 - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0639	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del pistón • Verificación del porta puntas • Verificación de ajuste de puntas • Prueba de fugas • Verificación del botón del mecanismo de expulsión • Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar • Lubricación del émbolo y el pistón • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		

PIPETA - BOECO - 100-1000 SERIE N° 08X5149 - PIP-1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0641	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del pistón • Verificación del porta puntas • Verificación de ajuste de puntas • Prueba de fugas • Verificación del botón del mecanismo de expulsión • Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar • Lubricación del embolo y el pistón • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
PIPETA - HUMAPETTE - 100 UL - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0657	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del pistón • Verificación del porta puntas • Verificación de ajuste de puntas • Prueba de fugas • Verificación del botón del mecanismo de expulsión • Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar • Lubricación del embolo y el pistón • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
PIPETA - HUMAPETTE - 100 UL - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0656	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del pistón • Verificación del porta puntas • Verificación de ajuste de puntas • Prueba de fugas • Verificación del botón del mecanismo de expulsión • Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar • Lubricación del embolo y el pistón • Limpieza y desinfección interna y externa
				07 al 11	11	2022		
PIPETA - HUMAPETTE - 50 UL - PIP-1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0659	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del pistón • Verificación del porta puntas • Verificación de ajuste de puntas • Prueba de fugas • Verificación del botón del mecanismo de expulsión • Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar • Lubricación del embolo y el pistón • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		

PIPETA - HUMAPETTE - 200 UL - PIP-1-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0658	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del pistón • Verificación del porta puntas • Verificación de ajuste de puntas • Prueba de fugas • Verificación del botón del mecanismo de expulsión • Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar • Lubricación del embolo y el pistón • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
PIPETEADOR - BRAND - PIP-1	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0643	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación del pistón • Verificación del porta puntas • Verificación de ajuste de puntas • Prueba de fugas • Verificación del botón del mecanismo de expulsión • Limpiar los anillos en O, el émbolo y las paredes interiores del cilindro antes de lubricar • Lubricación del embolo y el pistón • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				07 al 11	11	2022		
PULSIOXIMETRO - CHOICEMED - PUL-1-1	AC_186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI _CENTRO	0723	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de sensores receptor y emisor Verificación de voltaje y amperaje Verificación de baterías. Verificación del sistema visual Verificación del sistema de alarma y seguridad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
PULSIOXIMETRO - EDAN H100B - SERIAL 360101 - M17910510049 - PUL-2	AC_184- AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	1968	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de sensores receptor y emisor Verificación de voltaje y amperaje Verificación de baterías. Verificación del sistema visual Verificación del sistema de alarma y seguridad Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		
SCALER - NSK - AS2000 - SCA- 2-1	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1	1986	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del

	08 - CENTRO			01 al 09	12	2022		equipo. • Prueba de funcionamiento.
SCALER - NSK - AS2000 - SCA-2-2	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_2 01_PYP	1987	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				01 al 09	12	2022		• Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
SCALER - NSK - AS2000 - SCA-2-3	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 09 - CENTRO	1988	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				01 al 09	12	2022		• Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
SCALER - NSK - AS2000 - SCA-2-4	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 110_CENTRO	1989	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
				01 al 09	12	2022		• Verificación física del equipo. • Prueba de voltaje y amperaje. • Limpieza de conductos de presión. • Verificación de componentes electrónicos. • Limpieza interna y externa del equipo. • Prueba de funcionamiento.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°101221183443 - TEN-1-037	AC_248 AC_CONSULTORIO_MEDICO_ASINTI MAT	0248	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				19 al 123	9	2022		
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION

TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N° 121116164541 - TEN-1-005	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	0216	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <i>Prueba de funcionamiento Final</i>
				05 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N° 121116162821 - TEN-1-006	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0217	SEMESTRAL	07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <i>Prueba de funcionamiento Final</i>
				05 al 09	9	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116143253 - TEN - 1- 075	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI_CENTRO	0286	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <i>Prueba de funcionamiento Final</i>
				14 al 18	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TALLIMETRO - KRAMER - TAL-1-012 0223	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	1102	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes <i>Prueba de funcionamiento Final</i>
				26 al 30	9	2022		

TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116151313 - TEN-1-012	AC_252 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_301_PYP	0223	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				26 al 30	9	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INFANTOMETRO- 1-08	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0035	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial
				01 al 09	12	2022		Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE N°170831133137 - TEN-2-04	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	1858	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				01 al 09	12	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
PULSIOXIMETRO - 205009209048	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP		SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial
				01 al 09	12	2022		Verificación de sensores receptor y emisor Verificación de voltaje y amperaje Verificación de baterías. Verificación del sistema visual Verificación de estado físico
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116164234 +A409- TEN-1-062	AC_337- AC_CONSULTORIO MEDICO 304 PYP	0273	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				01 al 09	12	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116163502 - TEN-1-063	AC_180- AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI _CENTRO	0274	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				11 al 18	11	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TALLIMETRO - SECA - TAL-2-4	AC_327 - CONSULTORIO _ ROSA _ CENTRO	1895	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116162441 - TEN-1-001	AC_327 - CONSULTORIO _ ROSA _ CENTRO	0212	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				08 al 11	11	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN - SERIE N°121116163514- TEN-1-065	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0276	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				26 al 30	9	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH	AC 184-			23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del

ALYN - SERIE N°121116150211- TEN-1-066	AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	0277	SEMESTRAL	08 al 11	11	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALYN - SERIE N°121116144253 - TEN-1-081	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI _CENTRO	0292	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				14 al 18	11	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALYN - SERIE N°121116151941- TEN-1-082	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI _CENTRO	0293	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				01 al 09	12	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALYN - SERIE N° 1211161555943 - TEN-1-087	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0298	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				12 al 16	9	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				07 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio

TENSIOMETRO PEDIATRICO - ALPK2 - ANEROIDES SERIE N° 1801185 - TEN-1-5	AC_239 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_203_PYP	0206	SEMESTRAL	05 al 09	9	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE N°101221184254 - TEN-1-2	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0203	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				01 al 09	12	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INFANTOMETRO-SECA- INF-1-02	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0029	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes
				12 al 16	9	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TALLIMETRO-SECA- TAL-2	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	1891	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes
				12 al 16	9	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE SERIE_061129091703 - TEN-1	AC_249 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_209_PYP	0064	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				12 al 16	9	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO - WELCH ALLYN DURACHOCK - 121116163211 - TEN-1-080	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CYD_CENTRO	0291	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera <u>Verificación del estado de la válvula de alivio</u>
				08 al 11	11	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

INFANTOMETRO - SECA -0213 - INF-2	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CYD_CENTRO	1896	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes
				08 al 11	11	2022		
TALLIMETRO - SECA -213	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CYD_CENTRO	1894	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes
				08 al 11	11	2022		
NEGATOSCOPIO - IMCOL - NEG-1-1	AC_162 AC_RAYOS X_USI_CENTRO	0910	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	• Verificar voltaje y amperaje, intensidad de la luz, contactos electricos
				19 al 23	9	2022		
EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO / PERIAPICAL - ELITE 70 - 896	AC_162 AC_RAYOS X_USI_CENTRO	2489	SEMESTRAL	14 al 18	3	2022	Ingeniera Biomedica	• De acuerdo al protocolo del proveedor de mantenimiento.
				19 al 23	9	2022		
						2023	CONTROL DE CALIDAD	Cada 2 años (según 482) es decir en 2023
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE N°110420174303 - TEN-1-1	AC_176 - AC_CONSULTORIO_CYD_CENTRO	0202	SEMESTRAL	18 al 22	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INFANTOMETRO-SECA-213 - INF-2-3	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI _CENTRO	1899	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831133327 - TEN-1-1	AC-186 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_105_USI _CENTRO	1854	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		

				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831133508- TEN-2-01	AC_248 AC_CONSULTORIO_MEDICO_ASINTI MAT	1855	SEMESTRAL	7 al 11	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete
				19 al 123	9	2022		Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INFANTOMETRO-MADERA- INF-1-09	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	0036	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				26 al 30	9	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial
PULSIOXIMETRO- 205009201667	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP		SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de sensores receptor y emisor Verificación de voltaje y amperaje Verificación de baterías.
				26 al 30	9	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831132509- TEN-2-02	AC_253- AC_CONSULTORIO_MEDICO_302_PYP	1856	SEMESTRAL	22 al 25	3	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				26 al 30	9	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - EQU-1-11	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	0416	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías Limpieza de contactos eléctricos Verificación del funcionamiento de las cabezas
				05 al 09	12	2022		Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial
TALLIMETRO-KRAMER- TAL-1-06	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	1099	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				05 al 09	12	2022		

INFANTOMETRO - INF-1-01	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	0048	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				05 al 09	12	2022		Verificación de estado físico
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831122659- TEN-2-03	AC_334 - AC-CONSULTORIO MEDICO_206_PYP	1857	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				05 al 09	12	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
INFANTOMETRO - SECA - INF 2-2	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI _CENTRO	1898	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		Verificación de estado físico
TALLIMETRO -SECA - 213 TAL 2-1	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI _CENTRO	1892	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		Verificación de estado físico
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831134327 TEN-2-08	AC_179- AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_USI _CENTRO	1863	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022		EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION
INFANTOMETRO - MADERA - INF -1-11	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	0038	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				14 al 18	11	2022		Verificación de estado físico
				09 al 13	5	2022		Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera

TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831132937 TEN-2-10	AC_181 - AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_USI _CENTRO	1864	SEMESTRAL	14 al 18	11	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 1170831132959 TEN-2-11	AC_184- AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTO S_106_USI_CE	1865	SEMESTRAL	23 al 27	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				08 al 11	11	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
INFANTOMETRO - SECA - INF 2-2	AC_180- AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI _CENTRO	1897	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 18	11	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
TALLIMETRO - SECA - 213 TAL -2-2- 1893	AC_180- AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI _CENTRO	1893	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 18	11	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Limpieza y desinfección con jabón suave, no sulfatante, oxidante o corrosivo. Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 170831132128 TEN-2-14	AC_180- AC_CONSULTORIO_MEDICO_103_USI _CENTRO	1868	SEMESTRAL	09 al 13	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 18	11	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
PIEZA DE MANO - KAVO - 650C SERIE N°2014190523 - PIE-1-3	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 202_PYP	1308	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico Verificación del eje del micromotor Verificación de las turbinas
				01 al 09	12	2022		

TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_202_PYP	1999	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-01	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_201_PYP	2008	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-04	AC_202 - AC_FARMACIA_USI_CENTRO	2002	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-06	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109 - CENTRO	2004	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - 9915900011302 TEH-2-06	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO		SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.

TERMOHIGROMETRO - KEX - RT812 - TEH-2-08	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_1 08 - CENTRO	1998	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
EQUIPO DE ORGANOS - WELCH ALLYN - 13010 - EQU-1-2	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	0502	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje de entrada o voltaje de baterías <u>Limpieza de contactos eléctricos</u>
				01 al 09	12	2022		
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-05	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	1794	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-07	AC_202 - AC_FARMACIA_USI_CENTRO	1796	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-08	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_ 110_CENTRO	1797	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes <u>Prueba de funcionamiento Final</u>
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO- TEHI-04	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	0793	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display <u>Verificación de temperatura y humedad</u>
				07 al 11	11	2022		

				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - TEH-209	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	2006	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico
				07 al 11	11	2022		Verificación de accesorios
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-13	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1802	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico
				07 al 11	11	2022		Verificación de accesorios
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-14	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1803	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico
				07 al 11	11	2022		Verificación de accesorios
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-15	AC_177- AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	1804	SEMESTRAL	02 al 06	5	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico
				07 al 11	11	2022		Verificación de accesorios
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
AUTOCLAVE- AUTOMAT- 8000 AUT-1	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	2024	SEMESTRAL	25 al 29	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico
				24 al 28	10	2022		Verificación de accesorios
AUTOCLAVE- AUTOMAT- 8000 AUT-1	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	0861	SEMESTRAL	25 al 29	4	2022	Ingeniera Biomedica	Prueba de funcionamiento inicial
				24 al 28	10	2022		Verificación de voltajes Verificación de fugas Verificación de válvulas Verificación sistema de control (temperatura y

TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-18	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	1807	SEMESTRAL	25 al 29	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				24 al 28	10	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOHIGROMETRO - ALLA FRANCE - 4404808 - TEHI-27	AC_317- AC_SALA-ERA-CENTRO	1816	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de baterías y contactos Revisión Botones y display Verificación de temperatura y humedad Limpieza y desinfección interna y externa Remplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				01 al 09	12	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TERMOSELLADORA - EURONDA - EUROM ATIC - TER-2	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	2025	SEMESTRAL	25 al 29	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de la tensión (110v) Verificación del pistón sellador Verificación de filtros Verificación de válvulas Verificación de la temperatura Verificación del sistema mecánico Lubricación de partes mecánicas Verificación de la termocupla
				24 al 28	10	2022		
TERMOSELLADORA - EURONDA - EUROM ATIC - TER-1	AC_203 - AC_ESTERILIZACION_USI_CENTRO	0860	SEMESTRAL	25 al 29	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de la tensión (110v) Verificación del pistón sellador Verificación de filtros Verificación de válvulas Verificación de la temperatura Verificación del sistema mecánico Lubricación de partes mecánicas Verificación de la termocupla
				24 al 28	10	2022		
UNIDAD ODONTOLOGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2	AC_262- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_108 - CENTRO	1978	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación

				01 al 09	12	2022		Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control
UNIDAD ODONTOLOGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-1	AC_190- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_110_CENTRO	1976	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple
				01 al 09	12	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple
UNIDAD ODONTOLOGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-2	AC_263- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_109_CENTRO	1979	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control Limpieza de filtros de succión Revisión de jeringa triple Revisión del eyector
				01 al 09	12	2022		Limpieza y desinfección interna y externa Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico
CONTRANGULO- KV00007 CON 1-1	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_201_PYP	1294	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico
				01 al 09	12	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico
CONTRANGULO-NSK-CON-1	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_201_PYP	0734	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico
				01 al 09	12	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Lubricación de partes mecánicas Verificación del motor eléctrico
UNIDAD ODONTOLOGICA - AMERICAN DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-3	AC_237- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_201_PYP	2299	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación

				01 al 09	12	2022		Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y Verificación de estado físico
UNIDAD ODONTOLÓGICA - AMERICANA DENTAL - SLIM ELECTRICA - UNI-2-4	AC_238- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_202_PYP	1975	SEMESTRAL	18 al 22	7	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles
				01 al 09	12	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control
UNIDAD ODONTOLÓGICA - UNI-1	AC_254- AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_303_PYP	0572	SEMESTRAL	01 al 08	4	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de voltaje y amperaje Verificación de intensidad de la lámpara Revisión del sistema hidráulico y electrónico del sillón Verificación de válvulas del sistema Verificación de succión y desagües Verificación del sistema de regulación Verificación de fugas Lubricación de partes móviles Verificación de componentes electrónicos y tablero de control
				03 al 07	10	2022		Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de tensión (110v) Verificación del panel de control, perilla e indicadores Verificación del módulo de presión arterial Verificación de brazaletes y sensor de saturación Verificación de sistema de control Verificación de alarmas Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
MONITOR DE SIGNOS VITALES - EDAN - MON-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0085	SEMESTRAL	13 al 17	6	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de tensión (110v) Verificación del panel de control, perilla e indicadores Verificación del módulo de presión arterial Verificación de brazaletes y sensor de saturación Verificación de sistema de control Verificación de alarmas Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				12 al 16	12	2022		Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0086	SEMESTRAL	12 al 16	12	2022	Ingeniera Biomedica	Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de tensión (110v) Revisión y prueba del sistema eléctrico Revisión y prueba del sistema generador de vacío Revisión y limpieza de filtros

ELECTRICO - THOMAS - ASP-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0000	SEMESTRAL	11 al 29	4	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación regulador de velocidad Verificación del motor Verificación de fugas Verificación de mangueras Revisión y prueba de manovacuometro Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN - SERIE 141127173947- TEN-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0201	SEMESTRAL	12 al 16	12	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes
				11 al 29	4	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
TENSIOMETRO PEDIATRICO - WELCH ALLYN TEN-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0214	SEMESTRAL	12 al 16	12	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de estado físico Verificación de accesorios Prueba de funcionamiento inicial Verificación de fugas Verificación de estado de pera Verificación del estado de la válvula de alivio Verificación del estado del manómetro y del brazalete Prueba de mediciones para verificación Limpieza y desinfección interna y externa Reemplazo de componentes Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022		
				11 al 29	4	2022	EMPRESA CONTRATADA CALIBRACION	Realizar calibración del equipo con elementos certificados por la empresa a realizar la calibración.
FONENDOSCOPIO - LITTMAN SERIE 114D27725 - FON-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0354	SEMESTRAL	12 al 16	12	2022	Ingeniera Biomedica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas • Verificación del estado de los tubos auditivos • Prueba de repetibilidad de resultados • Limpieza y desinfección interna y externa • Prueba de funcionamiento Final
				11 al 29	4	2022		
FONENDOSCOPIO - LITTMAN SERIE K14K133615 - FON-1	AC_260 - AC_ AMBULANCIA_NISSAN	0400	SEMESTRAL	12 al 16	12	2022	Ingeniera Biomedica+H477:H541	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de estado físico • Verificación de accesorios • Prueba de funcionamiento inicial • Verificación acústica • Verificación de estado de campana de alta y baja frecuencia. • Verificación del estado de las olivas

				11 al 29	4	2022	<ul style="list-style-type: none">• Verificación del estado de los tubos auditivos• Prueba de repetibilidad de resultados• Limpieza y desinfección interna y externa• Prueba de funcionamiento Final
--	--	--	--	----------	---	------	---

DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE MAGDALENA


Dirección Carrera 14 N° 16 - 41 (usi integrada) Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 7 DE DICIEMBRE DE 2021 Vigencia 2022

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario. \$ 150,000,000.00

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ 283380	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_106_MAGDALENA	166009002011002*COM-1-1*0871	SEMESTRAL	01-07	3	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	9	2022		
PLANTA ELECTRICAKIPORS/N:31310010562	AC_SALA_DE_ENERGIA_MAGDALENA	164501001001003*PLA-1*1732	SEMESTRAL	01-07	3	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FISICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				01-07	9	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
REFRIGERADORVESTFROST SERIE N° 82515641	AC_VACUNACION_MAGDALENA	166009001014003*REF-1-1*0494	CUATRIMESTRAL	01-07	3	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH (ESTE ESTA FUERA DE USO) GUARDADO	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	7	2022		
				01-07	11	2022		
020127400F1ECT0W4TFP	AC_CONSULTORIO_ODONTO	166590001002001*OZO-1-	SEMESTRAL	01-07	5	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH (EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO

	LOGIA_106_MAGDALENA	2*927		01-07	11	2022	ESTE ESTA FUERA DE USO) GUARDADO	MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
PURIFICADOR DE AGUANIKKEN WATER FALL	AC_CITAS_MAGDALENA	166590001003001*PUR-1- 1*1026	SEMESTRAL	01-07	5	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO : EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				01-07	11	2022		

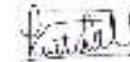

DIRECTOR/GERENTE

KAREN TATIANA CARDENAS MONTAÑEZ

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE MONQUIRA


Dirección Carrera 14 N° 16 - 41(usi integrada) Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 7 DE DICIEMBRE DE 2021 Vigencia 2022

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario. \$ 150,000,000.00

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ SERIE N° 2665585	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	166009002011002*COM-1-2*1005	SEMESTRAL	08-14	4	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALIVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	10	2022		
PLANTA ELECTRICAGENERAC SERIE N° 5823638	AC_CUARTO_DE_SISTEMAS_MONQUIRA	164501001001002*PLA-1*1050	SEMESTRAL	08-14	4	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERÍA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FISICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				08-14	10	2022		
REFRIGERADORULTRALAB SERIE N° 02-03-18-HR	AC_VACUNACION_MONQUIRA	166009001014002*CON-1*1040	CUATRIMESTRAL	08-14	4	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	7	2022		
				08-14	11	2022		
REFRIGERADOR DE 127 LTSVESTFROST S/N 20150766718	AC_CUARTO FRIO MONQUIRA	166009001014005*REF-1*0496	CUATRIMESTRAL	08-14	4	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	7	2022		
				08-14	11	2022		
OZONIZADORELECTROWATER	AC_MONQUIRA	166590001002002*OZO-1*0992	SEMESTRAL	08-14	5	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH (ESTE ESTA FUERA DE USO) GUARDADO	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				08-14	11	2022		

OZONIZADORELECTROWATER	AC_MONQUIRA	166590001002002*OZO-1-1*0997	SEMESTRAL	08-14	5	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH (ESTE ESTA FUERA DE USO) GUARDADO	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				08-14	11	2022		
PURIFICADOR DE AGUA	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	1026	SEMESTRAL	08-14	5	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				08-14	11	2022		

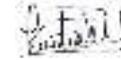

DIRECTOR/GERENTE

KAREN TATIANA CARDENAS MONTAÑEZ

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

SN3000-PMH

Nombre de la institución **SALUD SOGAMOSO ESE UGRA CENTRO**

Dirección **CARRERA 9 N 11 74**

Municipio **SOGAMOSO**

Fecha de Elaboración **31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Vigencia **2022**

Recursos asignados para el mantenimiento al equipo industrial de uso hospitalario. \$

150,000,000.00

Nombre del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
Camioneta Volkswagen Amarok OXN 028 MODELO 2014	UGRA CENTRO	1340	CUATRIMESTRAL	01-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, líquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
	UGRA CENTRO			01-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
	UGRA CENTRO			01-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
Camioneta Volkswagen Amarok OXN 028 MODELO 2014	UGRA CENTRO	1340	Anual	01-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PICUP DOBLE OXD 482 MODELO 2007	UGRA CENTRO	1338	CUATRIMESTRAL	01-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, líquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
	UGRA CENTRO			01-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
	UGRA CENTRO			01-30	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PICUP DOBLE OXD 482 MODELO 2007	UGRA CENTRO	1338	Anual	01-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
MOVIL MERCEDES BENZ ACCELO915C/44 OXN 000 MODELO 2009	UGRA CENTRO	1337	SEMESTRAL	01-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales,
	UGRA CENTRO			01-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
MOVIL MERCEDES BENZ ACCELO915C/44 OXN 000 MODELO 2009	UGRA CENTRO	1337	Anual	01-30	2	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
MOVIL MAZDA T45 T 45 MT3500CC OXD 441 MODELO 1994	UGRA CENTRO	1341	SEMESTRAL	01-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, líquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO
	UGRA CENTRO			01-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	
MOVIL MAZDA T45 T 45 MT3500CC OXD 441 MODELO 1994	UGRA CENTRO	1341	Anual	01-30	2	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
AMBULANCIA NISSAN URBAN OXN 042 MODELO 2015	UGRA CENTRO	1337	ANUAL	01-30	5	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	SINCRONIZACION: Revisar sistema inyección, cuerpo de aceleración, sensores, conectores, 1 filtro de aire, 1 filtro de combustible cables de alta , 4 bujías SISTEMA DE FRENOS: Desmontar las 4 llantas y las campanas para verificar el estado de pastillas, bandas de frenos, cilindros, mordazas, bujes, revisar fugas de líquidos, limpieza y lubricación, tensión de freno de emergencia. DIRECCION Y SUSPENSION: Levantar vehículo en el elevador para realizar inspección visual y dinámica en el tren delantero y trasero, estado de amortiguadores, capelas espirales, muelles, terminales axiales, bujes, tijeras, ejes, rodamientos, caja dirección fuelles, cardanes, fugas de aceite, alineación y balanceo, rotación de llantas. REVISION NIVELES: De caja de transferencia, frenos, aceite de motor (presentación en 1/4 sellado, líquido refrigerante, cambio de fluidos, si se requiere. REVISION DE CORREAS : Inspección, estado y tensión de las correas REVISION SISTEMA ELECTRICO : Inspección de luces, encendido tablero, eleva vidrios limpia brisas, batería, conectores, cables swiches, alternador arranque, colector, ENGRASE, ALINEACION Y BALANCEO

AMBULANCIA NISSAN URBAN OXN 042 MODELO 2015	UGRA CENTRO	1337	Anual	01-30	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	Revisión técnico mecánica y de gases
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA	MESUAL	15	1	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION DESEMPEÑO DE CALIDAD
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	2	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION ALARMA Y CITOFONO
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	3	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	LIMPIEZA Y LUBRICACION
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	4	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION CUARTO DE MAQUINAS
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	5	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION MAQUINA DE TRACCION
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	6	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION FRENO
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	7	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION LIMITADOR DE VELOCIDAD
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	8	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION CONTROL
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	9	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION SEGURIDADES DE POZO
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	10	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION PUERTAS DE HALL
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	11	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	REVISION TECHO DE CABINA
ASCENSOR ANDES ELEVADORES CAP 6 PASAJEROS	EDIFICIO PYP	NA		15	12	2022	Gerente, profesional Ambiente físico, contratistas	PREVISION PARTE INFERIOR DE CABINA REVISION FOSO
COMPRESOR DE AIRE ODONTOLOGICOSCHULZ S3 70%ED	ODONTOLOGIA 201 PYP AC_237	166009002011010*COM-2*2405		SEMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH
			15-21		9	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 18 SERIE N° 2630236	AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	166009002011002*COM-1*0424	SEMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) . REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO . VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE. REVOLUCIONES DEL COMPRESOR. REVISION DE VÁLVULAS ALVIO. REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO. REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIATHOMASSA2276	AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_M OVIL 1	166009002011003*COM-1*0076	SEMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) . REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO . VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE. REVOLUCIONES DEL COMPRESOR. REVISION DE VÁLVULAS ALVIO. REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO. REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6 SERIE N° 3114562	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_DIAMANTE	166009002011005*COM-1*1066	SEMESTRAL	15-21	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) . REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO . VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE. REVOLUCIONES DEL COMPRESOR. REVISION DE VÁLVULAS ALVIO. REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO. REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV 6 SERIE N°981362	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_MORCA	166009002011005*COM-1*1118	SEMESTRAL	15-21	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) . REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO . VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE. REVOLUCIONES DEL COMPRESOR. REVISION DE VÁLVULAS ALVIO. REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO. REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2022	CONTRATISTA EIUH	

COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV6 SERIE N° 0496	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_SUCRE	166009002011006*COM-1*0039	SEMESTRAL	15-21	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PRESION DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV6 SERIE N°31310099	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGIA_VANEGAS	166009002011006*COM-1-1*1099	SEMESTRAL	15-21	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PRESION DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ MSV 6MSV6 SERIE N° 31114361	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_CAMPAMENTO	166009002011006*COM-1-2*1146	SEMESTRAL	15-21	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PRESION DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR ODONTOLOGIASCHULZ	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_PEDREGAL_ALT	166009002011009*COM-1-1*1196	SEMESTRAL	15-21	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PRESION DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				15-21	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
COMPRESOR DE AIRE ODONTOLOGICOSCHULZ	AC_ALAMCEN (RESERVA)	9915900016401*COM-1*1372	ANUAL	15-21	6	2022	CONTRATISTA EIUH	REPOSICION
COMPRESOR ODONTOLOGIATHOMAS	AC_ALAMCEN (RESERVA)	166009002011008*COM-1*0056	ANUAL	15-21	6	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PRESION DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
COMPRESOR ODONTOLOGICOFURNAS	AC_ALAMCEN (RESERVA)	166009002011001*COM-1*0019	ANUAL	15-21	6	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO (TAQUE , MOTOR , CABEZAL) , REVISION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACION DE PRESION DE ENCENDIDO Y APAGADO , VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, REVOLUCIONES DEL COMPRESOR, REVISION DE VÁLVULAS ALVIO, REVISION DEL ESTDO FISICO Y MEDICIÓN MANÓMETRO, REVISION DE MANGUERAS Y TUBOS DE CONEXION, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
CONGELADOR COLOR NEGROESTEFAN ULTRALAB XX1-01 SERIE N° 020318-HR	BODEGA ALMACEN ACTIVOS FIJOS	166009001014001*CON-1*0492	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FISICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACION DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACION(VNTLADOR SI APLICA), VERIFICACION DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACION DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACION DE TEMPERATURA, VERIFICACION DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
ELECTROBOMBA- HIDRO FLOWWEGVERDE	CUARTO BOMBEO	VERDE	SEMESTRAL	01-07	6	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR, VERIFICACION DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISION DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
				01-07	12	2022	CONTRATISTA EIUH	
ELECTROBOMBA- HIDRO FLOWWEGAZUL	CUARTO BOMBEO	AZUL	SEMESTRAL	1-8	3	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR, VERIFICACION DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISION DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
				1-8	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
ELECTROBOMBA- IHMIMNARANJA	PATIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO	NARANJA	SEMESTRAL	1-8	3	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACION DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR, VERIFICACION DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISION DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
				1-8	9	2022	CONTRATISTA EIUH	

ELECTROBOMBA-SIEMENS SIEMENSGRIS 1	AUDITORIO- RED EMERGENCIA	GRIS 1	ANUAL	1-8	8	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISION DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
ELECTROBOMBA-SIEMENS SIEMENSGRIS 2	AUDITORIO- RED EMERGENCIA	GRIS 2	ANUAL	1-8	8	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISION DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
ELECTROBOMBABLUE PUMAZUL	ALMACEN	AZUL	ANUAL	1-5	8	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELECTRICA, REVOLUCIONES DEL MOTOR,VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO , REVISION DE PRESION DEL FLUIDO, REVISION DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
FILTRO DE AGUANIKKENPIMAG	AC_SALA DE ESPERA 2 PISO PYP	99159000110231*FIL-1*1425	SEMESTRAL	15-21	5	2022	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO ; EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
FILTRO PURIFICADOR DE AGUANIKK	GERENCIA	166590001003003*FIL-1*0297	SEMESTRAL	15-21	5	2022	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEIMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA CON PAÑOS NO DE PAPEL Y LAVAR FILTRO ; EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL KIT DEL FILTRO (INCLUYE PIEDRAS , ESPONJAS SUPERIORES Y MICROESPONJAS INTERNAS Y FITRO DE VARIAS CAPAS)
				15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
GRECACOLDELEC SERIE 414	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	165590001005001*GRE-1*0295	SEMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE EMPAQUES DE LA LLAVE DEL GRIFO PARA SALIDA DE LECHE, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE AGUA, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE CAFÉ, CAMBIO DE RESORTES, REVISION DE PERA, TAPA, REVISION CUERPO-RECIPIENTE PARA AGUA CALIENTE, PORTA NIVEL, BOMBILLO PILOTO, BOTÓN SWITCH, TAPA DE ENTRADA DE AGUA DE LA CALDERA, PORTA NIVEL, LLAVE DEL GRIFO METÁLICO Y SOPORTE DE LA GRECA, PRUEBA FUNCIONAMIENTO.
				15-21	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
GRECACOLDELEC SERIE JD	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	165590001005001*GRE-1*0296	SEMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE EMPAQUES DE LA LLAVE DEL GRIFO PARA SALIDA DE LECHE, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE AGUA, EMPAQUES DE GRIFO PARA LA SALIDA DE CAFÉ, CAMBIO DE RESORTES, REVISION DE PERA, TAPA, REVISION CUERPO-RECIPIENTE PARA AGUA CALIENTE, PORTA NIVEL, BOMBILLO PILOTO, BOTÓN SWITCH, TAPA DE ENTRADA DE AGUA DE LA CALDERA, PORTA NIVEL, LLAVE DEL GRIFO METÁLICO Y SOPORTE DE LA GRECA, PRUEBA FUNCIONAMIENTO.
				15-21	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
GUADAÑADORASHINDAIWA B45	AC_MANTENIMIENTO_USI_ADM INISTRATIVO	165590001007001*GUA-1	ANUAL	01-07	7	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIAR CON AGUA Y JABON , LIMPIAR EL FILTRO DE COMBUSTIBLE , ENGRASAR LEVEMENTE RODAMIENTOS Y GUAYAS, ROTAR EL EJE DE POSICIÓN MENSUALMENTE
LAVADORA SAMSUNGDE 33 LIBRAS	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	165523002001001*LAV-1*0300	ANUAL	01-07	7	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACIÓN DE FILTROS, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE LLENADO, VERIFICACIÓN SISTEMA DE DESAGÜE, VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO TABLERO DE CONTROL, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE FILTRO BOMBA, VERIFICACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA SI APLICA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE AMPERAJE Y FRECUENCIA, VERIFICACIÓN DE GOLPES Y FUGAS, VERIFICAR VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO, VERIFICAR SISTEMA DE ARRANQUE, VERIFICAR QUE MANGUERAS Y ACCESORIOS NO PRESENTEN GRIETAS, RUPTURAS O ESTÉN DOBLADAS, LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUZA Y MOTAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILPUMA LA5700	AC_HIGIENE_ORAL_3_TERCER PISO	166009002011004*MOT-1*0808	SEMESTRAL	20-24	2	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	8	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILPUMA MA 5700A SERIE N° PA226151	AC_HIGIENE_ORAL_2_RAQUEL	166009002011007*MOT-1*0803	SEMESTRAL	20-24	2	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	8	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMAS 100067500 SERIE N° 050200201601	AC_HIGIENE_ORAL_1_RUBIELA	166009002012002*MOT-1*799	SEMESTRAL	20-24	2	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	8	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMAS	AC_HIGIENE_ORAL_4_STELLA	166009002012003*MOT-1*810	SEMESTRAL	20-24	2	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN

SERIE N° 050200201993			SEMESTRAL	01-07	8	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILPUMA LA5700	ALMACEN BAJA ADMIN	166009002012001*MOT-1*0389	ANUAL	10	7	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMASMS13	ALMACEN BAJA ADMIN	166009002012001*MOT-1*390	ANUAL	10	7	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
MOTOR PARA UNIDAD PORTATILTHOMAS	ALMACEN BAJA ADMIN	166009002012001*MOT-1*391	ANUAL	10	7	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN VÁLVULAS DE EYECCION , VERIFICACIÓN MANGUERAS EMPALME, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERACHALLENGERCV430 170526-4304130083	AC_CUARTO FRIO	166009001026003*NEV-2-1*1955	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE,
				01-07	10	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERACHALLENGERCV430 SERIE 170921-430413900039	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	166009001026003*NEV-2-1-1*1954	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE,
				01-07	10	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERACHALLENGERC152 SERIE 180223-01562	AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	166009001026004*NEV-2-2*1956	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE,
				01-07	10	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERACHALLENGERC152 SERIE 180223-01550	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	166009001026004*NEV-2-2-1*1957	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE,
				01-07	10	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERACENTRALES CONZ53FYJBE0 SERIE N° 1326267503	AC_LACTANCIA_MATERNA_PYP_SEGUNDO_PISO	166501001011002*NEV-1*0481	SEMESTRAL	08-14	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE,
				08-14	10	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
NEVERA SAMSUNG	AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	166501001011001*NEV-1*0245	SEMESTRAL	08-14	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE,
				08-14	10	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y MECANICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

NEVERAULTRALAB2102VR	AC_FARMACIA_USI_CENTRO	166609001026002*NEV-2*2019	SEMESTRAL	08-14	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTLADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				08-14	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
OZONIZADORELECTROWATER	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_MORCA	166590001002002*OZO-1-2*1120	SEMESTRAL	15-21	5	2022	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
OZONIZADORELECTROWATER	AC_MANTENIMIENTO_USI_ADM INISTRATIVO	166590001002001*OZO-1*0305	SEMESTRAL	15-21	5	2022	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
OZONIZADORELECTROMOTOR	AC_CONSULTORIO_ODONTOL OGICO_CAMPAMENTO	166590001002002*OZO-1-3*1150	SEMESTRAL	15-21	5	2022	CONTRATISTA EIUH	EN EL PRIMER MANTEMIENTOS SE DEBE LIMPIAR EQUIPO DE MANERA EXTERNA Y LAVAR FILTRO ; EL EL SEGUNDO MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE SE DEBE CAMBIAR EL FILTRO DE CARBON ACTIVADO
				15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
PURIFICADOR DE AGUANIKKEN	AC_SERVICIOS_GENERALES_U SI_ADM	166590001003002*PUR-1*0299	SEMESTRAL	15-21	5	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA , CAMBIO DE FILTROS SI SE REQUIERE
				15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
PLANCHA VAPORELGENERAL ELECTRIC	AC_SERVICIOS_GENERALES_U SI_ADM	1250	SEMESTRAL	15-21	5	2022	CONTRATISTA EIUH	REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS, VERIFICACION DE VOLTAJE , VERIFICACION DE FUGAS DE AGUA O VAPOR, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO
				15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
PLANTA ELECTRICAHPOWER P17E	AC_MANTENIMIENTO_USI_ADM INISTRATIVO	164501001001001*PLA-1*0289	SEMESTRAL	01-07	3	2022	CONTRATISTA EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERIA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				01-07	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
PLANTA ELECTRICAHONDA ES 100BS SERIE N° 6929747	AC_CONDUCTOR_UNIDAD_MO VIL_OXD441	164501001001004*PLA-1*0401	SEMESTRAL	08-14	3	2022	CONTRATISTA EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERIA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				08-14	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
PLANTA ELECTRICAKIPORXDE 6.500 T3 SERIE N° 31310010555	AC_CONDUCTOR_UNIDAD_MO VIL_2	164501001001004*PLA-1*0402	SEMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH	CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS , DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE (SI SE REQUIERE), VERIFICACIÓN DE BATERIA ELÉCTRICA, VERIFICAR NIVEL DE REFRIGERANTE(SI REQUIERE), VERIFICACIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN VOLTAJE DE SALIDA, VERIFICACIÓN DE AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE ESTADO FÍSICO DE LA TUBERIS, VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS EN TODOS LOS ELEMENTOS, REVISIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LUCES PILOTO, REVISIÓN DE TUBERÍA A TABLERO CORRECTAMENTE INSTALADA, VERIFICACIÓN DEL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
				15-21	9	2022	CONTRATISTA EIUH	
			CUATRIMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTLADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE

REFRIGERADOR VEST FROST MODELO MK304 SERIE N° 20090254585	AC_CUARTO FRIO	166009001014003*REF-1*0493	CUATRIMESTRAL	15-21	7	2022	CONTRATISTA EIUH	TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
			CUATRIMESTRAL	15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
REFRIGERADOR VEST FROST MK304 SERIE N° 20090254581	AC_CUARTO FRIO	166009001014004*REF-1*0942	CUATRIMESTRAL	15-21	3	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
			CUATRIMESTRAL	15-21	7	2022	CONTRATISTA EIUH	
			CUATRIMESTRAL	15-21	11	2022	CONTRATISTA EIUH	
REFRIGERADOR VERTICAL ULTRALABXXI-02VR	AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	166009001014006*REF-2*1994	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO (FISURAS Y GOLPES), VERIFICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA, VERIFICAR SISTEMA DE VENTILACIÓN(VNTILADOR SI APLICA), VERIFICACIÓN DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES EN SELLADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, LIMPIEZA DE LAS PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2022	CONTRATISTA EIUH	

SECADORA DE CARGA FRONTAL BLANCA QUANTUM 8'4 KGQUANTUMSDG-BQ	AC_SERVICIOS_GENERALES_USI_ADM	165523002001002*SEC-1*2410	ANUAL	10	7	2022	CONTRATISTA	LIMPIEZA DE FILTRO , LIMPIEZA DEL SENSOR DE HUMEDAD, VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA, LIMPIEZA DEL CONDENSADOR, LIMPIEZA INTERNA DE TAMBOR Y LIMPIEZA GENERAL EXTERNA. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION DE VOLTAJE Y CONEXIONES
TERMOSELLADORA EUROSEA UROSEAL2001 SERIE N° ED140001	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	166007001003001*TER-1*0860	ANUAL	10	7	2022	CONTRATISTA	LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERNA DEL EQUIPO, INSPECCIONAR LOS CABLES Y CONEXIONES POR POSIBLES DAÑOS O CONTACTOS FLOJOS, INSPECCIONAR LA TERMOCUPLA POR IMPUREZAS O DETERIORO DE LA MISMA PARA EVITAR LA DESCALIBRACIÓN DE LA MISMA
TERMOSELLADORA EUROSEA UROSEAL2001 SERIE N° ED140001	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	166007005002002*TER-2*2025	ANUAL	10	7	2022	CONTRATISTA	LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERNA DEL EQUIPO, INSPECCIONAR LOS CABLES Y CONEXIONES POR POSIBLES DAÑOS O CONTACTOS FLOJOS, INSPECCIONAR LA TERMOCUPLA POR IMPUREZAS O DETERIORO DE LA MISMA PARA EVITAR LA DESCALIBRACIÓN DE LA MISMA
VENTILADOR INDUSTRIAL	AUDITORIO	N/A	ANUAL	10	7	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVOLUCIONES DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO, REVISIÓN DE PRESIÓN DEL FLUIDO, REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y EMPAQUES.
DESTILADOR BOECCO	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	166501001027002*DES-2*2422	ANUAL			2022	CONTRATISTA EIUH	"LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, DESINCRUSTACIÓN DE CALCAREOS, REVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRES TEMPERATURA Y EL SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACIÓN DE SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, MÓVIL, CON TANQUE, UNIDAD DE RECIRCULACIÓN, RADIADOR Y NIVEL DE AGUA. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL. INFORME DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. INFORME DE VERIFICACIÓN DEL EQUIPO, STICKER DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN"
UPS DE 1.000 W	AC_171 AC_VACUNACIÓN_MONOQUIRA	164501001001007*UPS-4-7*2351	ANUAL	15-30	10	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	Mantenimiento preventivo de UPS: Revisión de parámetros iniciales del equipo, una limpieza integral del equipo tanto de tableros electrónicos como de baterías, medición de parámetros finales del equipo. La UPS debe estar desenergizada antes de realizar y limpiar la unidad. Una vez que el cable no está enchufado a la toma eléctrica, el técnico comienza a realizar el mantenimiento, la limpieza y la revisión de cada una de sus piezas. Esto garantiza la integridad de la máquina, el técnico profesional y el equipo al que se puede conectar a la UPS.
UPS DE 1.000 W	AC_233 AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	164501001001007*UPS-4-5*2349	ANUAL	15-30	10	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	Mantenimiento preventivo de UPS: Revisión de parámetros iniciales del equipo, una limpieza integral del equipo tanto de tableros electrónicos como de baterías, medición de parámetros finales del equipo. La UPS debe estar desenergizada antes de realizar y limpiar la unidad. Una vez que el cable no está enchufado a la toma eléctrica, el técnico comienza a realizar el mantenimiento, la limpieza y la revisión de cada una de sus piezas. Esto garantiza la integridad de la máquina, el técnico profesional y el equipo al que se puede conectar a la UPS.
UPS DE 1.000 W	AC_333 AC_ASESORA JURIDICA	164501001001007*UPS-4-6*2350	ANUAL	15-30	10	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	Mantenimiento preventivo de UPS: Revisión de parámetros iniciales del equipo, una limpieza integral del equipo tanto de tableros electrónicos como de baterías, medición de parámetros finales del equipo. La UPS debe estar desenergizada antes de realizar y limpiar la unidad. Una vez que el cable no está enchufado a la toma eléctrica, el técnico comienza a realizar el mantenimiento, la limpieza y la revisión de cada una de sus piezas. Esto garantiza la integridad de la máquina, el técnico profesional y el equipo al que se puede conectar a la UPS.
UPS ON-LINE	AC_177 AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	167001001006002*UPS-1*0669	ANUAL	01-07	11	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	Mantenimiento preventivo de UPS: Revisión de parámetros iniciales del equipo, una limpieza integral del equipo tanto de tableros electrónicos como de baterías, medición de parámetros finales del equipo. La UPS debe estar desenergizada antes de realizar y limpiar la unidad. Una vez que el cable no está enchufado a la toma eléctrica, el técnico comienza a realizar el mantenimiento, la limpieza y la revisión de cada una de sus piezas. Esto garantiza la integridad de la máquina, el técnico profesional y el equipo al que se puede conectar a la UPS.
UPS 2KVA	AC_177 AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	164501001001008*UPS-5*2392	ANUAL	01-07	11	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	Mantenimiento preventivo de UPS: Revisión de parámetros iniciales del equipo, una limpieza integral del equipo tanto de tableros electrónicos como de baterías, medición de parámetros finales del equipo. La UPS debe estar desenergizada antes de realizar y limpiar la unidad. Una vez que el cable no está enchufado a la toma eléctrica, el técnico comienza a realizar el mantenimiento, la limpieza y la revisión de cada una de sus piezas. Esto garantiza la integridad de la máquina, el técnico profesional y el equipo al que se puede conectar a la UPS.
UPS CAPACIDAD 2 KVA	AC_217 AC_LIDER_SISTEMAS_USI_ADMINISTRATIVO	164501001001005*UPS-3-1*2250	ANUAL	01-07	11	2022	CONTRATISTA MANTENIMIENTO EIUH	Mantenimiento preventivo de UPS: Revisión de parámetros iniciales del equipo, una limpieza integral del equipo tanto de tableros electrónicos como de baterías, medición de parámetros finales del equipo. La UPS debe estar desenergizada antes de realizar y limpiar la unidad. Una vez que el cable no está enchufado a la toma eléctrica, el técnico comienza a realizar el mantenimiento, la limpieza y la revisión de cada una de sus piezas. Esto garantiza la integridad de la máquina, el técnico profesional y el equipo al que se puede conectar a la UPS.
AUTOCLAVE 3 BANDEJAS	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	166007001002003*AUT-1*0861	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA ELECTRÓNICO, (REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, TERMINALES, CONECTORES, TECLADO, DISPLAY). REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. (RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO, CABLE DE POTENCIA, FUSIBLES) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, VÁLVULA DE DESCARGA AIRE/VAPOR, VÁLVULA DE DRENAJE REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TANQUE, CUBIERTA, BANDEJA DIFUSORA. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
				01-07	10	2022	CONTRATISTA EIUH	
AUTOCLAVE	AC_ESTERILIZACIÓN_USI_CENTRO	166007005002001*AUT-2*2024	SEMESTRAL	01-07	4	2022	CONTRATISTA EIUH	LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO, REVISIÓN Y LIMPIEZA SISTEMA ELECTRÓNICO, (REVISIÓN DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, TERMINALES, CONECTORES, TECLADO, DISPLAY). REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. (RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO, CABLE DE POTENCIA, FUSIBLES) REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, VÁLVULA DE DESCARGA AIRE/VAPOR, VÁLVULA DE DRENAJE REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TANQUE, CUBIERTA, BANDEJA DIFUSORA. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

DIRECTOR/GERENTE

KAREN TATIANA CARDENAS MONTAÑEZ





PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

Nombre de la institución **SALUD SOGAMOSO E.S.E.**

Dirección _____

Municipio **Sogamoso - Boyacá**

Fecha de Elaboración **31/12/2021**

Vigencia _____

2022

Recursos asignados para el mantenimiento a equipos de comunicaciones e informática. _____

\$ 50.000.000

Nombre del equipo	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1747	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
ALMACEN	ALMACEN	0363	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
ALMACEN	ALMACEN	0335	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	2331	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	0325	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0314	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
ARCHIVO	ARCHIVO	0285	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
ALMACEN	ALMACEN	0370	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
GERENCIA	GERENCIA	0242	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.

GERENCIA	GERENCIA	0234	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
SIAU	SIAU	0226	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
ARCHIVO	ARCHIVO	0283	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
SALUD PUBLICA	SALUD PUBLICA	0208	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
SALUD PUBLICA	SALUD PUBLICA	0110	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	0204	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
TESORERIA	TESORERIA	0126	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
TESORERIA	TESORERIA	0119	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
COORDINACION ASISTENCIAL	COORDINACION ASISTENCIAL	0330	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
COORDINACION ASISTENCIAL	COORDINACION ASISTENCIAL	0129	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALIDAD	CALIDAD	0233	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
REVISORA FISCAL	REVISORA FISCAL	0108	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.

CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	0104	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IAMI	IAMI	1744	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IAMI	IAMI	0588	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IAMI	IAMI	0091	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
AREA ADMINISTRATIVA	AREA ADMINISTRATIVA	2323	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALLCENTER	CALLCENTER	0173	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALLCENTER	CALLCENTER	2327	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALLCENTER	CALLCENTER	0672	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALLCENTER	CALLCENTER	0828	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
FACTURACION	AUX_FACTURACION	0121	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CITAS MEDICAS	MODULO_5	0828	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CITAS MEDICAS	MODULO_1	0537	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.

CITAS MEDICAS	MODULO_2	2333	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CITAS MEDICAS	MODULO_3	0826	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALLCENTER	CALLCENTER	0825	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALLCENTER	CALLCENTER	0817	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CALLCENTER	CALLCENTER	0815	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
FARMACIA	FARMACIA	0855	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
FARMACIA	FARMACIA	0851	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
FARMACIA	FARMACIA	2335	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA TERMICA	FARMACIA	AC_202	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñoneria.
IMPRESORA LASER	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	AC_232	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñoneria.
IMPRESORA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	AC_229	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñoneria.
IMPRESORA ZEBRA	ARCHIVO DIGITAL	AC_226	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñoneria.

IMPRESORA LASER	GERENCIA	AC_223_1	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
ARCHIVO	ARCHIVO	0844	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	SECRETARIA DE GERENCIA	AC_223	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
IMPRESORA LASER	SIAU	AC_221	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
IMPRESORA LASER	TESORERIA	AC_214	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
IMPRESORA CITAS	CITAS	AC_201	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
IMPRESORA BIXOLON	CITAS	AC_200	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
IMPRESORA LASER	ALMACEN	AC_233	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
IMPRESORA ZEBRA	ALMACEN	AC_233	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.
CONSULTORIO 101	CONSULTORIO 101	0514	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CONSULTORIO 103	CONSULTORIO 103	0233	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULTORIO 103	AC_180	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera.

SCANNER	ARCHIVO CENTRAL	1737	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS	0499	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULTORIO_106	AC_184	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera).
HIGIENE ORAL	HIGIENE ORAL	0920	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
HIGIENE ORAL	HIGIENE ORAL	0740	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
HIGIENE ORAL	HIGIENE ORAL	0739	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULTORIO 210	AC_339	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera).
PYP	PYP	0495	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
NUTRICION	NUTRICION	2329	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CUARTO FRIO	AC_240_1	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera).
CONSULTORIO_102	CONSULTORIO_102	0435	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	IMPRESORA LASER	AC_255	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonera).

IMPRESORA LASER	CONSULTORIO_102	AC_179	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
ODONTOLOGIA_109	ODONTOLOGIA_109	0879	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
ODONTOLOGIA_108	ODONTOLOGIA_108	2045	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	IMPRESORA LASER	AC_262	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	2030	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0333	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
ODONTOLOGIA 110	ODONTOLOGIA 110	2336	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0128	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0671	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
LABORATORIO CLINICO	LABORATORIO CLINICO	0676	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	LABORATORIO CLINICO	AC_177	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
VACUNACION	VACUNACION	0490	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.

IMPRESORA LASER	VACUNACION 204	AC_240	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
IMPRESORA ZEBRA	LABORATORIO CLINICO	AC_177	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
LACTANCIA MATERNA	LACTANCIA MATERNA	0274	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
LACTANCIA MATERNA	LACTANCIA MATERNA	0371	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	0693	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	PSICOLOGIA	AC_231	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
IMPRESORA LASER	CONSULTORIO ROSA	AC_327	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULROTORIO_105	CONSULROTORIO_105	0457	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULROTORIO_105	AC_186	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO_CYD	CONSULTORIO_CYD	0526	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULTORIO_CYD	AC_176	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
ODONTOLOGIA_201	ODONTOLOGIA_201	0434	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.

IMPRESORA LASER	ODONTOLOGIA_201	AC_237	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
ODONTOLOGIA_202	ODONTOLOGIA_202	0993	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	ODONTOLOGIA_202	AC_238	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO_203	CONSULTORIO_203	0472	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	ODONTOLOGIA_203	AC_239	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO_206	CONSULTORIO_206	1743	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	ODONTOLOGIA_206	AC_334	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO_207	CONSULTORIO_207	2044	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CONSULTORIO_208	CONSULTORIO_208	0969	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	ODONTOLOGIA_208	AC_248	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO ROSA	CONSULTORIO ROSA	2046	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CONSULTORIO_209	CONSULTORIO_209	0529	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.

IMPRESORA LASER	ODONTOLOGIA_209	AC_249	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO_210	CONSULTORIO_210	0156	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
CONSULTORIO_304	CONSULTORIO_304	2357	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULROTORIO_304	AC_337	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO_301	CONSULTORIO_301	0555	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULROTORIO_301	AC_252	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
CONSULTORIO_302	CONSULTORIO_302	0565	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULROTORIO_302	AC_253	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
ODONTOLOGIA_303	ODONTOLOGIA_303	0580	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA LASER	CONSULROTORIO_303	AC_254	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñonería.
IAMII	IAMII	0834	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IAMII	IAMII	AC_264	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.

CONTRATACION	CONTRATACION	0269	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
JURIDICA	JURUDICA	2332	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	0210	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	2322	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
PLANEACION	PLANEACION	0087	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
PIC	PIC	0429	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
PIC	PIC	0430	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	0742	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de ventiladores, cambio Pasta Termica discipador del procesador), si el equipo lo requiere, reconfiguración (Instalación de Windows, aplicaciones ofimatica y Antivirus), Copia de seguridad e instalación de programas de CNT.
IMPRESORA ECOTANK	COMUNICACIONES	AC_220	TRIMESTRAL	6	2	2022	RAUL LOPEZ LEAL	Mantenimiento preventivo y correctivo (Limpieza Interna, Externa, lubricación de piñoneria).

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE MONQUIRA


Dirección CARRERA 14 # 16 41 Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 31/12/2021 Vigencia 2022

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$ 15,000,000

Nombre del mueble	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	166009001020001CAM-1-100967	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, revision tapizeria y reposicion.
CAMILLA DIVAN	AC_VACUNACION_MONQUIRA	166009001020001CAM-1-121044	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, <u>revisión tapizeria y reposicion.</u>
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	166009001020002CAM-10715	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, <u>revisión tapizeria y reposicion.</u>
SILLA DE RUEDAS	AC_SALA_DE_ESPERA_MONQUIRA	166009001021001SIL-1-30936	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y ajuste de partes y verificación de aire de llantas
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MONQUIRA	166009001024001CAR-1-40714	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
VITRINA METALICA	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	166501001024002VIT-1-071101	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-130014	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGICO_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-160017	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_VACUNACION_MONQUIRA	9915900010001CAR-1-170018	ANUAL	1-30	10	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
MESA DE MAYO	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	9915900010201MES-1-060078	ANUAL	1-31	10	2021	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-290147	ANUAL	1-30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-310149	ANUAL	1-30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_VACUNACION_MONQUIRA	9915900010501ESC-1-320150	ANUAL	1-31	10	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmo de pintura electrostática, limpieza y desinfección

DIRECTOR/GERENTE

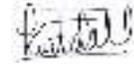

KAREN TATIANA CARDENAS MONTAÑEZ

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución		SALUD SOGAMOSO ESE	
Dirección	CARRERA 14 # 16 41	Municipio	SOGAMOSO
Fecha de Elaboración	31/12/2021	Vigencia	2022
Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$			15,000,000

Nombre del mueble	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	166009001020001CAM-1-090907	ANUAL	1-30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	166009001020001CAM-1-161239	ANUAL	1-30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC_VACUNACION_MAGDALENA	166009001020002CAM-1-21238	ANUAL	1-30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	166009001020003CAM-1-101730	ANUAL	1-30	8	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
SILLA DE RUEDAS	AC_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	166009001021001SIL-1-40989	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio de cojineria , revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección, verificación de llantas
VITRINA METALICA	AC_FARMACIA_MAGDALENA	166501001024002VIT-1-060951	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
VITRINA	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	166501001024003VIT-1-10882	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA_105_MAGDALENA	9915900010001CAR-1-080009	ANUAL	1-31	10	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	9915900010001CAR-1-090010	ANUAL	1-31	10	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	9915900010001CAR-1-100011	ANUAL	1-31	10	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO DE CURACIONES	AC_CONSULTORIO_CYD_MAGDALENA	9915900010001CAR-1-110012	ANUAL	1-31	10	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_101_MAGDALENA	9915900010501ESC-1-240142	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA_MAGDALENA	9915900010501ESC-1-250143	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_VACUNACION_MAGDALENA	9915900010501ESC-1-280146	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO_MEDICO_102_MAGDALENA	9915900010501ESC-1-450163	ANUAL	1-30	11	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mnto de pintura electrostática, limpieza y desinfección



DIRECTOR/GERENTE

KAREN TATIANA CARDENAS MONTAÑEZ

PLAN DE MANTENIMIENTO A MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

SN3000-PMH

Nombre de la institución SALUD SOGAMOSO ESE SEDE CENTRO


Dirección CARRERA 9 N 11 74 Municipio SOGAMOSO

Fecha de Elaboración 31/12/2021 Vigencia 2022

Recursos asignados para el mantenimiento a muebles de uso administrativo y asistencial. \$ 15,000,000

Nombre del mueble	Localización	Nº de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AAAA		
CAMILLA GINECOLOGICA	AC_252AC_ CONSULTORIO_MEDICO_3 01_PYP	166009001020001 CAM-1- 05 ACT 0567	ANUAL	1-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_252AC_ CONSULTORIO_MEDICO_3 01_PYP	9915900010501 ESC-1-13 ACT 0131	ANUAL	1-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO CURACIONES	AC_252AC_ CONSULTORIO_MEDICO_3 01_PYP	166009001024002CAR-1-6 ACT 0557	ANUAL	1-30	4	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_MEDIC O_302_PYP	166009001020001CAM-1- 05 ACT 0567	ANUAL	1-31	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico,	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC_239 AC_CONSULTORIO_MEDIC O_203_PYP	166009001020003 CAM-1- 1 ACT 0474	ANUAL	1-31	5	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC_CONSULTORIO_MEDIC O_209_PYP	166009001020003 CAM-1- 5 ACT 0531	ANUAL	1-31	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_CONSULTORIO MEDICO 206 PYP	9915900010501ESC-1-06 ACT 0124	ANUAL	1-31	7	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_239 AC_CONSULTORIO_MEDIC O_203_PYP	9915900010501 ESC-1-07 ACT 0125	ANUAL	1-31	5	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO CURACIONES	AC_239 AC_CONSULTORIO_MEDIC O_203_PYP	166009001024002CAR-1-2 ACT 0473	ANUAL	1-31	5	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CAMILLA DIVAN	AC_243 AC_CONSULTORIO_204_PY P-NUTRICIO	166009001020001 CAM-1- 04 ACT 0460	ANUAL	1-30	6	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
ESCALERILLA DOS PASOS	AC_243 AC_CONSULTORIO_204_PY P-NUTRICIO	9915900010501 ESC-1-08 ACT 0126	ANUAL	1-31	6	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
CARRO CURACIONES	AC_CONSULTORIO ODONTOLOGICO_202_PYP	166009001024001CAR-1-9 ACT 1249	ANUAL	1-31	5	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio empaques, revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección
SILLA DE RUEDAS	AC_SALA DE ESPERA 2 PISO_PYP	166009001021001SIL-1- 10609	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio de cojineria , revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección, verificación de llantas
SILLA DE RUEDAS	AC_PORTERIA_	166009001021001SIL-1- 20610	ANUAL	1-30	9	2022	Gerente, profesional Ambiente fisico, contratistas	revisión y cambio de cojineria , revisión y mmtto de pintura electrostática, limpieza y desinfección, verificación de llantas

DIRECTOR/GERENTE

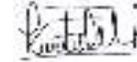

KAREN TATIANA CARDENAS MONTAÑEZ